

Hercules Prime



Frontpolster (Hercules Prime)

Montageanleitung – Zubehör



Front upholstery (Hercules Prime)

Assembly instructions – Accessory



Frontpolster (Hercules Prime)

Art.-Nr.: 9800004330000

Schieben Sie das Sitzpolster nach hinten und entfetten den vorderen Teil der Sitztiefenplatte. Kleben sie nun das Hakenband auf diese auf. Sollten zusätzlich noch Beinführungen verwendet werden, bringen Sie das Hakenband über den jeweiligen Anbindungen an. Befestigen Sie nun das Frontpolster auf dem Hakenband und richten das Sitzpolster wieder aus.



Front upholstery (Hercules Prime)

Item code: 9800004330000

Slide the seat cushion backwards and degrease the front part of the seat depth plate. Now stick the hook tape onto this. If leg guides are also used, attach the hook tape over the respective connections. Now attach the front upholstery to the hook tape and align the seat upholstery again.


Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0)47 61 / 88 60 · Fax: +49 (0)47 61 / 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.