

Hercules Prime · Hercules Small

DE

Inkontinenz Sitzauflage

Montageanleitung – Zubehör

EN

Incontinence seat cover

Assembly instructions – Accessory



DE

Inkontinenz Sitzauflage

Art.-Nr.: 980000497000

Legen Sie die Inkontinenz Sitzauflage auf die Sitzfläche des Rehasitzes und führen das Gurtschloss durch die Öffnung. Die Seiten können je nach Breiteneinstellung hochgeklappt sein. Wenn die Sitzauflage ausgerichtet ist, klappen Sie den hinteren Teil hoch und befestigen die beiden kleinen Hakenbänder auf der Rückseite des Rückenpolsters. Das lange Gurtband wird um die Rückenplatte des Rehasitzes geführt und in der Kunststoffschnalle befestigt. Die nach vorne überstehende Kante der Sitzauflage wird vorne unter dem Sitzpolster befestigt.

EN

Incontinence seat cover

Item code: 980000497000

Place the incontinence seat cover on the seat surface of the rehab seat and guide the belt buckle through the opening. The sides can be folded up depending on the width setting. When the seat cushion is aligned, fold up the rear section and attach the two small hook straps to the back of the back cushion. The long strap is passed around the back plate of the rehab seat and fastened in the plastic buckle. The edge of the seat cushion that protrudes forwards is attached to the front under the seat cushion.

Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0)47 61 / 88 60 · Fax: +49 (0)47 61 / 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.