


RECARO Monza Nova 2 Reha

 **Brugsanvisning** – Reha-autostol RECARO Monza Nova 2 Reha

CE


Thomashilfen



1



2



3



4



5




6



7



8

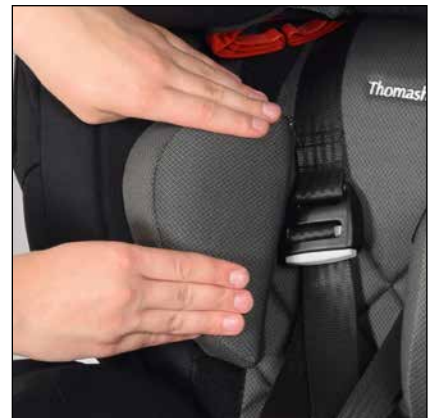

9



10




11



12



13

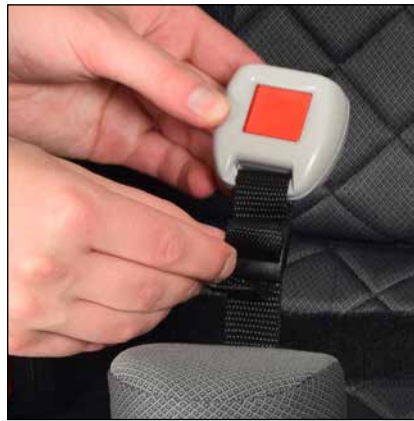

14



15




16



17



18

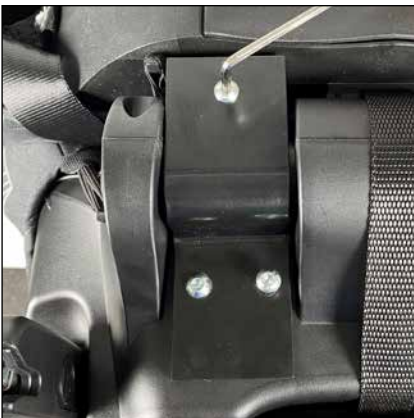

19



20



21



22



23



24



25




26



27



28

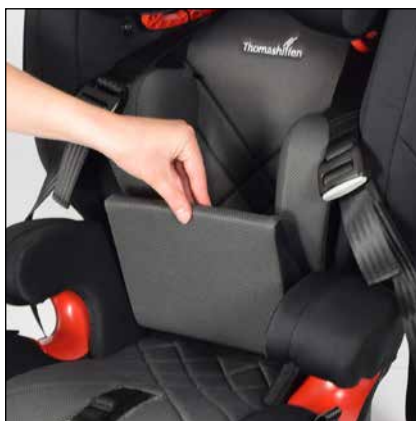

29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44

Kære kunde,

Vi er glade for, at du har valgt vores produkt, og vi vil gerne sige tusind tak for tilliden. For at sikre, at håndteringen af dit nye produkt er sikker, praktisk og komfortabel for både dig og brugeren, bedes du først læse denne brugsanvisning. På den måde undgår du skader og betjeningsfejl. Sørg for, at denne brugsanvisning bliver sammen med produktet, og at den står til rådighed for enhver bruger.

Denne brugsanvisning er et supplement til den oprindelige RECARO-brugsanvisning. På grund af modifikationen af Reha-autostolen er håndteringen af autostolen ændret på enkelte punkter. Ændringerne er beskrevet i denne supplerende brugsanvisning.

Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du kontakte forhandleren eller os.

**Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG**

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde / Tyskland

Telefon: +49 (0) 4761 8860

www.thomashilfen.de

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer. Dette kan medføre forskelle mellem dit produkt og fremstillingen i medierne.

Indholdsfortegnelse

Illustrationer	2
Forord / Fabrikant	6
Mærkning / Modelidentifikation	7
Generel information / Sikkerhedsadvarsel	7
Anvendelsesformål og brugssted	8
– Brug / Anvendelsesområde i overensstemmelse med reglerne	8
– Indikation / Patientmålgruppe, tilsigtet bruger	8
– Anvendelsesrisici og kontraindikationer	9
Produktbeskrivelse	9
– Leveringsomfang / Basisudstyr	9
– Ibrugtagning	9
– Oplæring i brug	9
Indstillingsmuligheder / Ydeevneegenskaber	9
– Tilbehør	11
– Tekniske data	13
– Materialeoplysninger	13
Rengøring, vedligeholdelse og reparation	14
– Rengøring, plejeanvisning og desinfektion til hverdag	14
– Vedligeholdelse og inspektion hos forhandleren / Vedligeholdelsesplan	14
– Reservedele	14
– Opbevaring / Bortskaffelse	15
EU-overensstemmelseserklæring	15
Garanti	15
Brugstid / Levetid	16
Genanvendelse	16
Distributør	16

Mærkning / Modelidentifikation

Mærkning	Betydning
	<p>Stregkodelabel</p> <p>Placering på produkt (Ill. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrikant - Produktnavn - Produktgruppe - Artikelnummer kort / langt - MD = Medicinsk udstyr - Produktionsdato - Serienummer
	<p>Maskinskilt</p> <p>Placering på produkt (Ill. 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrikant - Produktnavn - Brugervægt - CE-mærkning - Følg brugsanvisningen

Information

Generel information

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden produktet tages i brug, eller få eventuelt brugsanvisningen læst op. Hvis du ikke har brugsanvisningen, kan du downloade den på www.thomashilfen.de. Indholdet i den digitale brugsanvisning kan forstørres.
- Undersøg emballagen for transportskader, og kontrollér, om produktet er i upåklagelig stand.
- Ændringer af produktet er kun tilladt som led i de planlagte indstillingsmuligheder.
- Den daglige rengøring og pleje kan udføres af pårørende og hjælpere. Vedligeholdelse og inspektion sker hos forhandleren.
- I nogle lande kræves det, at der medbringes en lægeattest.
- Reha-autostolen kan anvendes både på et af bagsæderne og på passagersædet. Det valgte sæde SKAL være fremadvendt.
- Alle mærker skal forblive på produktet og må ikke ændres på nogen måde.

Sikkerhedsadvarsel

- Kontrollér som minimum hver 3. måned, om indstillingerne for produktet fortsat passer til brugerens aktuelle kropsvægt. Lad en forhandler/ortopædtekniker justere indstillingerne om nødvendigt.
- Kontrollér regelmæssigt (ugentligt) funktionsdygtigheden for indstillingsmulighederne på produktet.
- Overbelast ikke produktet, og overhold den maksimale brugervægt og den maksimale bæreevne (se de tekniske data).
- Efterlad aldrig brugeren alene med produktet uden opsyn.
- Produktet må til enhver tid kun anvendes af en enkelt bruger. Der må ikke placeres flere personer i eller på produktet.
- Alle brugere skal være bekendt med produktets funktioner. Så kan brugeren hurtigt frigøres fra produktet i en nødsituation.
- Lad ikke brugeren komme ind i eller ud af produktet uden opsyn. Ved for stærk belastning af fodstøtten er der risiko for at glide af eller vælte.
- Brugeren skal altid placeres med 5-punktsselen (basisudstyr). Sæde og bruger skal altid fastspændes med køretøjets 3-punktssikkerhedssele.
- Ved stærk sol og varme kan produktets overfladetemperatur blive høj. Det medfører risiko for at komme til skade ved berøring. Brug først produktet igen, når det er kølet tilstrækkeligt af. Beskyt generelt produktet mod direkte sollys.
- Overhold af hensyn til brugerens sikkerhed de sikkerhedsnormer, der gælder for dit køretøj, og som er angivet i brugsanvisningen.
- Brugsanvisningen skal blive sammen med produktet.
- Skulle der mod forventning opstå alvorlige problemer med produktet, bedes du omgående orientere vores virksomhed og den relevante myndighed om dette.

Egnet til op til 50 kg kropsvægt:

Barneautostolen RECARO Monza Nova 2 Reha har hos Dekra (Klettwitz) bestået en overbelastningstest på basis af ECE R 44/04 kravene. RECARO Monza Nova 2 Reha er derfor tilladt som tilbageholdelsesindretning til specielle krav "S".

Anvendelsesformål og brugssted

Brug / Anvendelsesområde i overensstemmelse med reglerne

Reha-autostolen RECARO Monza Nova 2 Reha er medicinsk udstyr i klasse 1.

Den er udviklet til bagudrettet transport og til efterlevelse af en sikker siddeposition for børn i motorkøretøjer. Sædet monteres altid sikkert med 3-punktssikkerhedsselen i køretøjet. 5-punktsselen i Reha-autostolen sørger for, at barnet sidder i en understøttet og opret siddeposition.

Reha-autostolen giver ekstra stabilitet med en sikker siddeposition, stabilisering af hovedkontrol og stabil placering i bækkenområdet samt understøttelse i fodområdet. Desuden findes der et omfattende udvalg af produkttilbehør til individuel tilpasning.

Enhver anden form for brug gælder ikke som i overensstemmelse med reglerne.

Indikation / Patientmålgruppe, tilsigtet bruger

Reha-autostolen anvendes til børn med strukturelle og/eller funktionelle begrænsninger eller fejlstillinger i hoved- og torsoområdet. Den sørger for en stabil og fysiologisk placering, når gængse børneautostole ikke er tilstrækkelige til en stabil siddestilling i køretøjet.

Anvendelsesrisici og kontraindikationer

Ved korrekt brug er der ingen risici ved anvendelse. Der er intet kendskab til kontraindikationer.

Produktbeskrivelse

Leveringsomfang

Produktet bliver leveret med basisudstyret monteret. Eventuelt tilbehør, der også er bestilt, leveres sammen med produktet og skal monteres efterfølgende. Der følger en brugsanvisning med produktet.

Basisudstyr

Sæde og ryglæn med integreret 11-vejs højdejusterbar nakkestøtte; inkl. integrerede låsearme til forankring af sædet i Isofix-monteringspunkterne i køretøjer med passende udstyr; trinløs nakkestøtte i nakkestøtten med integreret luftpude i nakkestøtten; beskyttelse mod sidekollisioner gennem energiabsorberende elementer; aftagelige puder til hoved, brystkasse og sædets sider; faste armlæn; 5-punktsbælte; bælteskjold; aftagelig abduktionsblok; integrerede højttalere i nakkestøtten til tilslutning af mp3-afspiller; lomme til mp3-afspiller på sædet; RECARO Air Circulation System for optimal luftcirkulation; ventileret formstøbt skum; aftageligt betræk

Ibrugtagning

- Fjern omhyggeligt transportsikringen og emballagen.
- Sørg for at holde emballage og eventuelle små dele væk fra børn for at undgå, at de sluger delene eller bliver kvalt.

Oplæring i brug

Brugeren bliver oplært i brug af dette hjælpemiddel af autoriseret fagpersonale i henhold til brugsanvisningen.

Fagkonsulenten skal sammen med brugeren sætte stolen i køretøjet og indstille sædet, så det passer til den aktuelle bruger.

Det er for at sikre, at brugeren er oplært i alle produktets funktioner samt i ind- og udtagning af køretøjet.

Indstillingsmuligheder / Ydeevneegenskaber

5-punkts-positioneringssele

Bemærk venligst:

5-punkts-positioneringssele tjener til positionering af barnet i autostolen og beskytter det ikke ved en trafikulykke. Til sikring af barnet i stolen er det altid nødvendigt at bruge den i bilen tilstedeværende 3-punkts-sikkerhedssele. 5-punkts-selen må ikke føres gennem de røde seleholdere på nakkestøtten. De er kun beregnede til 3-punkts-selen.

Ændring af selens længde:

Træk i de løse selebånd for at gøre selen kortere og for at spænde dem. Tryk på justeringsspændets frigørelsesmekanisme for at gøre selen længere, og træk selen ud til den ønskede længde.

Desuden kan selens længde ved behov ændres via de to seleøkner (skruet fast) på ryggen.

Ill. 3: Skift selelængde

Selens lukning:

For at åbne selen, tryk på den røde fordybning i lukningen. Adskil derefter de to øvre seleholdere. For at lukke selen, fører du de to seleholdere sammen igen, stikker disse i lukningen foroven og trykker denne sammen, til den lukkes med et hørbart „klik“.

Åben venligst også lynlåsen ved det nedre seleskilt, for at kunne tage betrækket af.

Ill. 4: Åben selens lukning („klik“)

Hovedpelotter

For nemmest at kunne montere hovedpelotterne skal sædets sættes i den højeste position. Træk betrækket (pelotterne) henover hovedstøtternes sidedele og fastgør dem med trykknappen. I den nederste del er puderne fastgjort til nakkestøtten med en elastik.

Ill. 5: Pelotter trækkes over sidedele / Ill. 6: Fastgøres nede

Ill. 7: Fastgøres oppe

Thoraxpelotter

Thoraxpelotterne kan i højre og venstre side af ryggen fastgøres med trykknapper og burrebånd i tre forskellige højder. Begynd anbringelsen med trykknapperne.

Ved at trykke på sædets burrebåndstriber sættes pelotterne endnu bedre fast.

Ill. 8: Trykknapper / Ill. 9: Burrebånd

Sædesidepelotter

For nemmest at kunne anbringe sædesidepelotterne stilles ryglænet i vandret position. Træk sidepelottens betræk over siddefladen og fastgør dem bagerst med trykknapperne.

Ill. 10: Pelotter / Ill. 11: Trykknapper bagerst

Abduktionsblok

Abduktionsblokken kan skubbes indad. Den skal først frigøres fra skridtselen. Tag selens endestykke af den løse ende af skridtselen, og træk selen ud af spændet og låsen. Træk abduktionsblokken opad og væk fra skridtselen.

Sæt spændet og låsen på skridtselen igen, og fastgør den løse ende af selen med selens endestykke. Anbring abduktionsblokken efter behov på den dertil beregnede burrebånd på sædet.

For at kunne tage betrækket af skal du først frigøre abduktionsblokken fra skridtselen, som beskrevet ovenfor.

Ill. 12: Selens endestykke / Ill. 13: Aftagning af selens endestykke

Ill. 14: Aftrækning af spændet og låsen / Ill. 15: Fjernelse af abduktionsblokken

For følgende indstillingsmuligheder/ydelsesfunktioner henvises til den separate RECARO Monza Nova 2 brugervejledning.

Model Seatfix (Ill. 16)

Isofix er et specielt norm certificeret sikkerhedssystem til børnesæder. Isofix forankres direkte med køretøjets karosseri. I fastgørelsespunktet kan autosæder med Isofix let og hurtigt forankres. Sædet er også uden barn sikret i bilen og skal ikke fastgøres med bilens 3-punkts-sele. Afprøv inden om din bil har et Isofix-forankring.

Sæde og ryg med integreret 11-positions højdejusterbar nakkestøtte**Trinløs nakkestøtte i nakkestøtten med integreret luftpude i nakkestøtten****Beskyttelse mod sidekollision****Faste armlæn****Bælte skjold polstring****Integrerede højttalere i nakkestøtten til tilslutning af mp3-afspiller****Aftagelige dæksler****Tilbehør**

Tip: Oplysninger om montering findes i den tilhørende brugsanvisning, som følger med tilbehøret. Hvis du ikke har brugsanvisningen, kan du downloade den på www.thomashilfen.de. Montering/afmontering af tilbehør sker med almindeligt værktøj.

Adapterplade (Ill. 17)

Adapterpladen er en forudsætning for brug af yderligere tilbehør. Dette kan anbringes foran på sædet på Reha-autostolen.

Drejeplade med adapter (Ill. 18)

Med drejefunktionen kan Reha-autostolen drejes mod køretøjets dør. For hjælperen bliver flytning af brugeren og adgangen til 5-punktsselen på sædet dermed nemmere. For brugeren bliver det lettere selv at komme ind og ud. På adapteren kan der samtidig anbringes yderligere tilbehør foran på Reha-autostolen.

Rygstabilisator (Ill. 19)

Rygstabilisatoren fikserer den bevægelige ryg på Reha-autostolen. Ved brug af drejefunktionen forhindrer den, at autostolens ryg utilsigtet foldes bagud.

Seatfix-adapter (Ill. 20)

Med Seatfix-adapteren kan der anvendes ISOFIX i køretøjet, hvilket øger Reha-autostolens stabilitet. Den ekstra stabilisering er især vigtig, når der også anvendes en drejefunktion (og/eller vippefunktion). Seatfix-adapteren sikrer også det tomme sæde i køretøjet.

Stabiliseringsbøjle (Ill. 21)

Stabiliseringsbøjlen anbringes bag Reha-autostolen og skubbes ind i revnen mellem sædet og ryglænet i køretøjet. Den er velegnet, hvis der ikke kan benyttes ISOFIX. Den ekstra stabilisering er især vigtig, når der også anvendes en drejefunktion (og/eller vippefunktion).

Støtteben (Ill. 22)

Støttebenet sørger for stabilisering af Reha-autostolen. Den ekstra stabilisering er især vigtig, når der også anvendes en drejefunktion (og/eller vippefunktion).

Siddekile, under (Ill. 23)

Siddekilen (under) lægges på køretøjets sæde under Reha-autostolen for at opnå en sædehældning. Vipning af sædet bagud anvendes til børn med ret lidt kropsspænding og/eller svag kropskontrol.

Siddekilen anbringes midt under autostolen. Den høje kant er forest, for at opnå en optimal hvilestilling til barnet.

Obs: brug af siddekile sammen med drejepladen begrænser dennes funktion betydelig. Vi anbefaler derfor ikke at bruge siddekile og drejeplade samtidig.

Ill. 24: Sæt stol på siddekile / Ill. 25: Slutposition

Siddekile, indvendig (Ill. 26)

Siddekilen (indvendig) lægges på sædet eller nederst på ryggen i Reha-autostolen. På den måde kan brugerens siddestilling ændres hurtigt og variabelt, f.eks. til en aktiv eller passiv siddeholdning, en reducere af sædedybden eller en mere stabil siddestilling.

Siddekilen (indvendig) kan fastgøres i tre forskellige positioner på sædet.

1. Du kan opnå en højere siddeholdning, hvis den højeste del af siddekilen vender bagtil.
2. Fastgør siddekilen med den flade side i den bagerste del for passiv/ hvile position.
3. For at forkorte sidedybden eller opnå en større siddevinkel kan kilen også stå bagerst med den brede side nederst og sættes fast med burrebånd.

De to yderste polstrer for sættes fast for yderligere beskyttelse.

Ill. 27: Aktiv / Ill. 28: Passiv

Ill. 29: Ryggen / Ill. 30: Med sidepolster

Bord (Ill. 31)

Bordet anbringes foran brugerens mave. Det giver brugeren stabilitet og sikkerhed, og brugeren kan støtte sig til det og nemmere holde sig oprejst. Idet det spærrer udsynet til sikkerhedssele-spændet, bliver brugeren ikke opmærksom på at kunne åbne spændet, og overfladen kan anvendes til forskellige aktiviteter.

Skyd bordet på siddefladens to sidedele. Bordet fikseres på hver side med hhv. to burrebånd. Træk bordets burrebånd gennem sædets kunststofringe / stoleryg (bækkensele).

Ill. 32: Sæt bordet på / Ill. 33: Fastgør selen til sædet

Sele-softpuder (Ill. 34)

Sele-softpuderne beskytter brugerens skulderregion mod smertefuldt tryk og mod, at selen strammer ubehageligt.

Seleforbindelsesled (Ill. 35)

Med seleforbindelsesledet forbindes skulderselerne på Reha-autostolen (stiklukning). På den måde forhindres det, at selen drejer sig og glider. Selerne ligger stramt mod brugeren og forhindrer, at brugeren snor sig ud af selen.

Fodstøtte (Ill. 36)

Med fodstøtten sidder brugeren stabilt i Reha-autostolen, idet han/hun kan støtte benene på den. Det forhindres, at brugeren kan glide fra sædet og ned på bunden af køretøjet. Fodstøtten kan foldes sammen for at lette ind- og udstigning. Med fodstøtten er det muligt at træne selvstændig ind- og udstigning fra sædet.

Ved brug af drejehjulet optages fodstøtten i dens fodstøtteadapter. Sikker i så fald generelt fodstøtten med den ved betjeningsvejledningen vedlagte stjerneskrue mod at falde ud. Optagelsen hertil (metalblok med gevind) finder du på fodstøtteadapterens venstre rør.

Til stabilisering af fodstøtten i bunden af køretøjet tilpasses støttestangens højde ved at dreje den ind eller ud på en sådan måde, at stængerne får kontakt med køretøjets bund. Konter derefter støttestængerne vha. stjernegrebene, for at undgå en uønsket uddrejning. Drej dertil stjernegrebs-skruerne så langt som muligt op og spænd dem fast.

Underlårslængde: Justering af underlårslængden sker via fodstøttens højdejustering. Dertil løsner du de to ydre finger-skruer og spænder dem efterfølgende fast igen.

Fodvinkel: Løs de fire skruer til højre og venstre på fodstøttens underside for at indstille den ønskede fodvinkel via skinnerne. Spænd efterfølgende skruerne fast igen.

Bemærk venligst: fodstøtten kan ikke benyttes sammen med sædedybdeforlængelsen.

Ill. 37: Sæt fodstøtten ind / Ill. 38: Sikring

Ill. 39: Højdetilpasning køretøj

Sædedybdeforlængelse (Ill. 40)

Med sædedybdeforlængelsen bliver Reha-autostolens sæde udvidet. Større brugeres længere lår understøttes bedre, så der opnås en stabil siddestilling.

Ved brug af drejepladen optages siddedybdeforlængelsen i dens fodstøtteadapter. Sikker i så fald generelt siddedybdeforlængelsen med den ved betjeningsvejledningen vedlagte stjerneskrue mod at falde ud. Optagelsen hertil (metalblok med gevind) finder du på fodstøtteadapterens venstre rør.

Bemærk venligst: Sædedybdeforlængelsen kan ikke bruges sammen med en fodstøtte.

Ill. 41: Sæt siddedybdeforlængelsen ind / Ill. 42: Sikring

Anti-escape-vest (Ill. 43)

Anti-escape-vesten forhindrer, at barnet kan sno sig ud af autostolens sele. Farlige huller mellem sele og barn bliver dækket til, så barnet ikke kan bruge dem til at trække selen væk fra skuldrene.

Autostolbeskyttelse med ryg (Ill. 44)

Autostolbeskyttelsen ligger under børneautostolen på køretøjets sæde og på ryglænet. Den beskytter køretøjets sæde og ryglæn mod skader. I lommerne foran kan der opbevares mindre genstande.

Tekniske data**RECARO Monza Nova 2 Reha**

Dybde af sæde	30 cm
med forlængelse af sædets dybde	43 cm
Sædebredde foran	29 cm
Sædebredde bag (med sædekile, indvendig)	24 cm (20 cm)
Ryglænets højde (sæde)	60 - 77 cm
Skulderhøjde (bælteføring)	33 - 48 cm
Underbenets længde (fra fodstøtte til drejeplade)	23 - 42 cm
Samlede mål (B x H x D)	54 x 66 x 42 cm
Vægt af sæde	7 kg
Brugervægt	15 - 50 kg

Materialeoplysninger

Polster: Polyester – Trevira CS / 100% Polyester - RECARO Prime

Det anvendt polstermateriale er „brandhæmmende“, certificeret i henhold til DIN EN 1021-1 samt DIN EN 1021-2.

Graden af modstandsdygtighed over for antændelse for materialer og komponenter er certificeret i henhold til standarden og vurderet som ufarlig.

Stoffet, som er 100 % Trevira CS / RECARO Prime, er et førsteklasses, åndbart tekstil og blev testet positivt i forhold til biokompatibilitet. (DIN EN ISO 10993-5 og 10993-10 Trevira CS sort)

Rengøring, vedligeholdelse og reparation

Rengøring, plejeanvisning og desinfektion til hverdag

Polster

Polsteret er nemt at tage af og kan vaskes separat. Det består af et stofbetræk og eventuelt et indlæg af skumstof. Kontrollér, om polsteret har lynlås eller burrelukning. Hvis det er tilfældet, skal du åbne polsteret og tage indlægget af skumstof ud inden vask. Vær opmærksom på følgende plejeanvisning.

RECARO Prime:



Trevira CS:



Vi gør opmærksom på, at også stof af høj kvalitet kan blive bleget ved konstant og intensivt sollys eller ved hyppig vask.

Burrelukning

For at bevare burrelukningens funktionalitet skal burrebåndet med jævne mellemrum børstes med en børste. Ved vask skal burrebåndet altid lukkes eller dækkes til.

Kunststofdele

Produktdele af kunststof kan rengøres og desinficeres med almindelig sæbe (neutral).

Metaldele

Produktdele af metal kan rengøres og desinficeres med almindelig sæbe (neutral).

Desinfektion

Rengør inden desinfektion polsteret, kunststofdele og metaldele.

Tør alle kunststof- og metaldele på produktet af med desinfektionsmiddel. Der må udelukkende anvendes vandbaserede midler. Ved desinfektion skal anvisningerne for brug fra den pågældende producent overholdes.

Polsteret og betrækket skal desinficeres, inden det sættes på igen.

Vedligeholdelse og inspektion hos forhandleren

Forberedelse

Der skal følge en brugsanvisning med produktet. Hvis der ikke følger en med, skal du bede producenten om en. Lær produktets funktioner at kende. Hvis du ikke kender produktet, skal du læse brugsanvisningen, inden du tager det i brug. Rengør produktet inden ibrugtagning. Overhold plejeanvisningerne og de produktspecifikke tips til anvendelse i brugsanvisningen. Hvis du har flere spørgsmål, bedes du kontakte din fagkonsulent eller kontakte Thomashilfen direkte.

Service og reparation af produktet må kun udføres af faglært personale. Brugeren af dette produkt skal sørge for, at de foreskrevne undersøgelser og den anbefalede vedligeholdelse udføres regelmæssigt og rettidigt. Hvis der er synlige skader, skal brugeren aktivt informere fagpersonalet og straks lade dem udbedre skaden.

Vedligeholdelsesplan – Årlig undersøgelse

	Område	Funktion	Skade	Udskiftning
1	Kunststofkorpus	👁	👁	
2	Justeringsmuligheder	👁	👁	
3	Polster		👁	
4	Sele	👁	👁	
5	Kunststofdele	👁	👁	
6	Skruer og møtrikker	👁	👁	
7	Mærkning		👁	
Tilbehør				
8	Polster		👁	
9	Sele	👁	👁	
10	Justeringsmuligheder	👁	👁	
11	Kunststofdele	👁	👁	
12	Metaldele	👁	👁	
13	Skruer og møtrikker	👁	👁	
udført af:			d.:	
👁 = Undersøgelse ✓ = Kontrol udført				

Reserve dele

Kun originale reservedele må anvendes til reparationer. Du kan finde en liste med reservedele på hjemmesiden www.thomashilfen.de. For at få den rigtige reservedel eller en eventuel teknisk tilbagekaldelse skal vi have angivet serienummer/UDI-PI og det korrekte UDI-DI.

Afmontering/montering af reservedele må grundlæggende kun udføres af fagpersonale! Ved påkrævet returnering skal du sørge for, at produktet er emballeret korrekt og sikkert.

Opbevaring

Opbevar produktet et sikkert sted, når det ikke er i brug. Undgå at lægge eller stille tunge genstande på produktet under opbevaring. Beskyt produktet mod vind og vejr, f.eks. regn, stærk sol og frost. Hvis produktet bliver vådt, skal du tørre metal- og kunststofdele af og tørre polsteret, inden produktet sættes til opbevaring.

Bortskaffelse

Hvis produktet grundet sin tilstand ikke længere er funktionsdygtigt, eller hvis det har nået slutningen af sin levetid, kan det genanvendes af lokale kompetente virksomheder. Vær i den forbindelse opmærksom på de bestemmelser, der lokalt er gældende for genanvendelse og bortskaffelse.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed at være eneansvarlig for, at dette produkt og diverse varianter og tilbehør overholder de grundlæggende bestemmelser. En aktuell EU-overensstemmelseserklæring kan downloades på www.thomashilfen.de eller fås ved direkte henvendelse til os.

Garanti

Thomashilfen tilbyder to års lovmæssig garanti på dette produkt. Perioden starter på tidspunktet for overdragelse af varen. Garantien omfatter alle krav, der forringer funktionen. Undtaget er skader, der opstår grundet uhensigtsmæssig brug (f.eks. overbelastning) eller naturlig slitage.

Brugstid

Produktet har en brugstid på op til 6 år ved korrekt og regelmæssig vedligeholdelse baseret på producentens anvisninger. Produktet kan anvendes ud over denne periode, hvis det er i en sikker og teknisk upåklagelig tilstand.

Den teoretiske brugstid er ikke en garanteret brugstid. Den afhænger af brugsintensiteten og er altid underlagt en undersøgelse af forhandleren fra gang til gang.

Brugstiden ender inden det angivne tidsrum, hvis brugeren har nået den maksimale kropsvægt eller den maksimale kropsstørrelse for sikker anvendelse af produktet.

Brugstiden henviser ikke til sliddele som polster, betræk osv.

Levetid

Produktet har en levetid på 8 år, når de angivne forudsætninger for brugstiden er opfyldt. Levetiden består af både brugstiden og opbevaringstiden lagt sammen.

Genanvendelse

Dette produkt er ikke egnet til genanvendelse. Funktionsdygtigheden for autostole til børn kan ikke fastslås med sikkerhed ved et teoretisk skift af bruger. Produktet kan have ikke synlige skader, som udelukker fortsat sikker anvendelse. Salg og køb af brugte autostole til børn er derfor udelukket af producenten.

Distributør



Meyland-Smith A/S

Mads Clausens Vej 1

9800 - Hjørring

Phone: +45 9896 1985

Fax: +45 9896 1986

info@meyland-smith.dk

www.meyland-smith.dk









Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de