

RECARO Monza Nova 2 Reha



Lietošanas instrukcija - Rehabilitācijas auto sēdekļītis
RECARO Monza Nova 2 Reha

CE


Thomashilfen



1



2



3



4



5




6



7



8

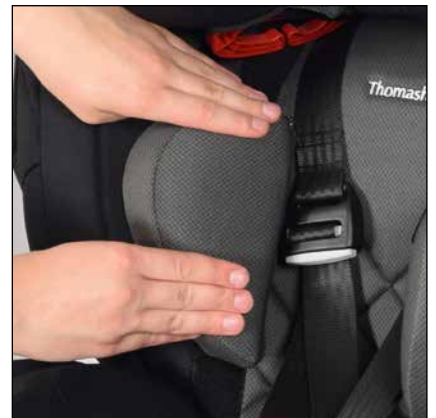

9



10




11



12



13

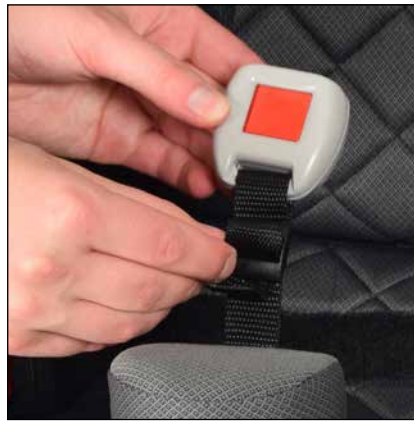

14



15




16



17



18

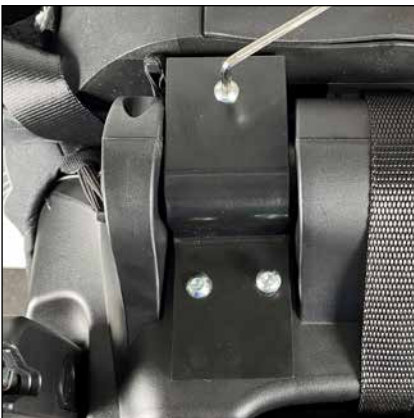

19



20



21



22



23



24



25




26



27



28

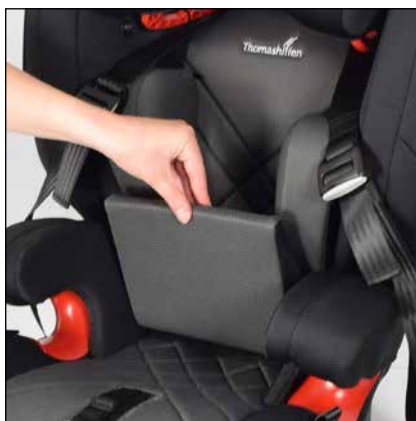

29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44

Cienījamais klients,

Jūs esat izvēlēties mūsu produktu, un mēs vēlamies jums pateikties par izrādīto uzticību. Lai nodrošinātu, ka darbs ar jauno izstrādājumu ir drošs, praktisks un ērts gan jums, gan lietotājam, vispirms izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tas palīdzēs jums izvairīties no bojājumiem un ekspluatācijas kļūdām. Lūdzu, pārliecinieties, ka šī lietošanas instrukcija paliek kopā ar izstrādājumu un ir pieejama katram lietotājam.

Šī lietošanas instrukcija papildina oriģinālo RECARO lietošanas instrukciju. Rehabilitācijas autokrēslīņa modifikācija dažos punktos maina autokrēslīņa lietošanu. Izmaiņas ir aprakstītas šajās papildu lietošanas instrukcijās. Ēc imate kakršna kōli vprašanja, se obrnite na svojega specializiranega prodajalca ali neposredno na nas.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar savu specializēto izplatītāju vai tieši ar mums.

**Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG**

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde

Telefonas: +49 (0) 4761 8860






www.thomashilfen.de

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Tas var radīt novirzes starp jūsu produktu un attēlojumu plašsaziņas līdzekļos.

Satura rādītājs

Ilustrācijas	2
Priekšvārds / Ražotājs	6
Etiķetes / modeļa identifikācija	7
Vispārīga informācija / drošības norādījumi	7
Mērķis	8
– Paredzētais lietojums / Piemērošanas jomas.	8
– Indikācijas / mērķa pacientu grupa, paredzētais Lietotāji	8
– Lietošanas riski un kontraindikācijas	9
Produkta apraksts	9
– Piegādes apjoms / pamataprīkojums	9
– Nodošana ekspluatācijā	9
– Izmantojiet apmācību.	9
Iestatīšanas opcijas / Veiktspējasfunkcijas	9
– Aksesuāri	11
– Tehniskie dati	13
– Materiālu specifikācijas	13
Tīrīšana, apkope un remonts	14
– Tīrīšana, kopšanas instrukcijas un dezinfekcija ikdienā.	14
– Tehniskā apkope un pārbaude, ko veic speciālisti / Tehniskās apkopes grafiks	14
– Rezerves daļas	14
– Uzglabāšana / iznīcināšana	15
ES atbilstības deklarācija	15
Garantija	15
Derīgās lietošanas laiks / kalpošanas laiks.	16
Atkārtota izmantošana	16
Dīleri	16

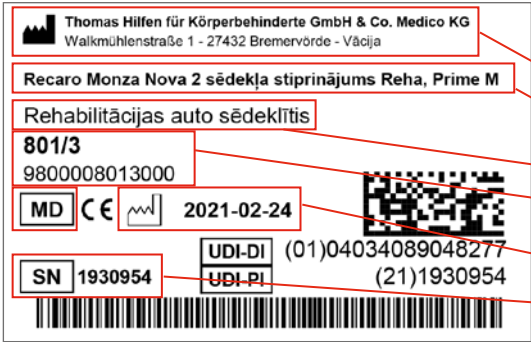Etīketes / Modeļa identifikācija

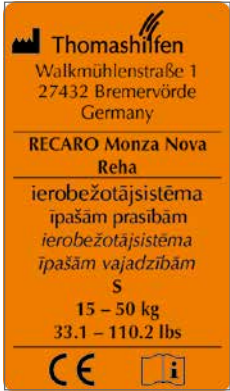Uzlīme	Nozīme
 <p> Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG Walkmühlenstraße 1 - 27432 Bremervörde - Vācija Recaro Monza Nova 2 sēdekļa stiprinājums Reha, Prime M Rehabilitācijas auto sēdekļītis 801/3 9800008013000 MD CE  2021-02-24 UDI-DI (01)04034089048277 UDI-PI (21)1930954 SN 1930954  </p>	<p>Svītrkoda etiķete</p> <p>Atrašanās vieta uz izstrādājuma (1. attēls)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ražotājs - Produkta nosaukums - Produktu grupa - Vienuma numurs īss / garš - MD = medicīnas ierīce - Izgatavošanas datums - Sērijas numurs
 <p> Thomashilfen Walkmühlenstraße 1 27432 Bremervörde Germany RECARO Monza Nova Reha ierobežotājsistēma īpašām prasībām ierobežotājsistēma īpašām vajadzībām S 15 – 50 kg 33.1 – 110.2 lbs CE  </p>	<p>Nosaukuma plāksnīte</p> <p>Novietojums uz izstrādājuma (2. attēls)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ražotājs - Produkta nosaukums - Lietotāja svars - CE zīme - Ievērojiet lietošanas instrukcijas

Piezīmes

Vispārīgas piezīmes

- Pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai, ja jums ir grūtības to izlasīt, palūdziet to izlasīt. Ja lietošanas instrukcijas nav, varat tās lejupielādēt no www.thomashilfen.de. Digitālās lietošanas instrukcijas saturu var palielināt.
- Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā iepakojums nav bojāts un vai produkts ir labā stāvoklī.
- Izstrādājuma izmaiņas ir atļautas tikai paredzēto pielāgošanas iespēju robežās.
- Uzkopšanas un ikdienas aprūpes darbus var veikt radnieki un aprūpētāji. Uzturēšanu un pārbaudi veic specializētās profesijas pārstāvji.
- Dažās valstīs ir nepieciešama medicīniskā izziņa.
- Rehabilitācijas autokrēsliņi var izmantot uz viena no aizmugurējiem sēdekļiem un pasažiera sēdekļa. Izvēlētajam autokrēsliņam jābūt vērstam uz priekšu.
- Visiem marķējumiem jāpaliek uz izstrādājuma, un tos nedrīkst bojāt.

Drošības instrukcijas

- Vismaz reizi 3 mēnešos pārbaudiet, vai izstrādājuma iestatījumi joprojām atbilst pašreizējiem lietotāja ķermeņa izmēriem. Vajadzības gadījumā iestatījumus koriģējiet pie specializēta tirgotāja/ortopēda tehniķa.
- Regulāri (reizi nedēļā) pārbaudiet izstrādājuma regulēšanas iespēju funkcionalitāti.
- Lūdzu, nepārslodziet izstrādājumu un ievērojiet maksimālo lietotāja svaru vai maksimālo kravnesību (skatīt tehniskos datus).
- Nekad neatstājiet lietotājus ar izstrādājumu bez uzraudzības.
- Vienlaikus izstrādājumu drīkst lietot tikai viens lietotājs. Izstrādājumā vai uz tā nedrīkst atrasties citas personas.
- Visi lietotāji ir jāinstruē par izstrādājuma funkcijām. Šādā veidā avārijas gadījumā lietotāju var ātri atbrīvot no izstrādājuma.
- Neatstājiet lietotāju bez uzraudzības, kad viņš iekāpj vai izkāpj no izstrādājuma. Ja kāju balsts ir pārāk noslogots, pastāv risks, ka tas var izslīdēt vai apgāzties.
- Lietotājam vienmēr jābūt novietotam ar 5 punktu pozicionēšanas jostu (pamataprīkojums). Sēdekļis un lietotājs vienmēr jānostiprina ar transportlīdzekļa 3 punktu drošības jostu.
- Spēcīga saules gaisma un karstums var izraisīt augstu produkta virsmas temperatūru. Tad, pieskaroties izstrādājumam, pastāv risks gūt traumas. Neizmantojiet izstrādājumu, kamēr tas nav pietiekami atdzisis. Kopumā pasargājiet izstrādājumu no tiešiem saules stariem.
- Lai nodrošinātu lietotāja drošību, ievērojiet drošības standartus, kas attiecas uz jūsu transportlīdzekli, kas norādīti transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā.
- Lietošanas instrukcijai jāpaliek uz produkta.
- Ja, pretēji gaidītajam, ar izstrādājumu notiktu nopietns negadījums, lūdzu, nekavējoties ziņojiet par to mūsu uzņēmumam un kompetentajai iestādei.

Piemērots līdz 50 kg ķermeņa svara:

RECARO Monza Nova 2 Reha ir sekmīgi izturējis pārslodzes testu Dekra (Klettwitz), pamatojoties uz ECE R 44/04 prasībām. Tādējādi RECARO Monza Nova 2 Reha ir apstiprināta kā "ierobežotājsistēma īpašām prasībām ("S")". apstiprināta.

Mērķis

Paredzētais lietojums / Piemērošanas jomas

RECARO Monza Nova 2 Reha rehabilitācijas autokrēsliņš ir 1. klases medicīnas ierīce.

Tā ir paredzēta bērnu ar invaliditāti pārvadāšanai un drošas bērnu sēdvietas uzturēšanai mehāniskajos transportlīdzekļos. Sēdekļi vienmēr nostiprina ar transportlīdzekļa 3 punktu drošības jostu. Rehabilitācijas autokrēsliņa 5 punktu drošības josta tiek izmantota, lai novietotu un atbalstītu bērna vertikālu sēdpozīciju.

Rehabilitācijas autokrēsliņš nodrošina papildu atbalstu drošai sēdēšanai, galvas kontroles stabilizāciju un stabilu sēdvietu iegurņa zonā, kā arī atbalstu pēdu zonā. Turklāt izstrādājums piedāvā plašu piederumu klāstu individuālai pielāgošanai.

Jebkāda cita veida izmantošana vai izmantošana, kas pārsniedz šos nosacījumus, tiek uzskatīta par neatbilstošu.

Indikācijas / mērķa pacientu grupa, paredzētais Lietotāji

Rehabilitācijas autokrēsliņu izmanto bērniem ar strukturāliem un/vai funkcionāliem ierobežojumiem vai nepareizu galvas un ķermeņa novietojumu. Tas nodrošina stabilu un fizioloģisku novietojumu, ja standarta bērnu autokrēsliņš nav pietiekams, lai nodrošinātu stabilu sēdpozīciju transportlīdzeklī.

Lietošanas riski un kontrindikācijas

Pareizi lietojot, lietošanas laikā riskus var izslēgt. Kontrindikācijas nav zināmas.

Produkta apraksts

Piegādes joma

Jūsu izstrādājums tiek piegādāts jau samontēts pamatkonfigurācijā. Visi pasūtītie piederumi ir pievienoti izstrādājumam un ir jāuzstāda vēlāk. Ražojumam ir pievienota lietošanas instrukcija.

Pamataprīkojums

Sēdekļi un atzveltne ar integrētu 11 pozīciju augstumā regulējamu pagalvi; t.sk. integrētas fiksācijas siksnas sēdekļa nostiprināšanai attiecīgi aprīkotu transportlīdzekļu ISOFIX stiprinājuma punktos; bezgalīgi regulējams galvas balsta kakla balsts ar galvas balstā integrētu gaisa spilvenu; aizsardzība pret sānu triecieniem, izmantojot enerģiju absorbējošus elementus; noņemami galvas, krūškurvja un sēdekļa sānu spilventiņi; fiksēti roku balsti; 5punktu pozicionēšanas drošības josta; drošības jostas aizsargplāksne; noņemams abdukcijas bloks; galvas balstā integrēti skaļruņi mp3 atskaņotāja pieslēgšanai; mp3 atskaņotāja kabata sēdekļi; RECARO gaisa cirkulācijas sistēma optimālai gaisa cirkulācijai; vēdināmas profilētas putas; noņemami pārvalki.

Nodošana ekspluatācijā

- Uzmanīgi noņemiet transportēšanas slēdzenes un iepakojumu.
- Pārliedzinieties, ka iepakojuma materiāls un mazas detaļas nevar nokļūt bērnu rokās, lai izvairītos no norīšanas vai aizrīšanās riska.

Lietotāju apmācība

Lietotāju par šī palīglikdzekļa lietošanu instruē pilnvarots speciālists, ņemot vērā šo lietošanas instrukciju.

Tehniskajam konsultantam kopā ar lietotāju jāuzstāda sēdekļi transportlīdzeklī un jāpielāgo sēdekļi attiecīgā lietotāja izmēriem.

Jānodrošina, ka lietotājs ir instruēts par visām izstrādājuma funkcijām, kā arī par uzstādīšanu un noņemšanu no transportlīdzekļa.

Iestatīšanas opcijas / Veiktspējasfunkcijas

5 punktu pozicionēšanas josta

Lūdzu, ņemiet vērā:

Piecu punktu pozicionēšanas drošības josta tiek izmantota, lai novietotu bērnu autokrēsliņā, un tā neaizsargā bērnu negadījuma gadījumā. Bērna nostiprināšanai sēdekļī vienmēr jāizmanto automašīnā esošā 3 punktu drošības josta. 5punktu drošības jostu nedrīkst novilkt caur sarkanajām drošības jostu vadotnēm uz pagalvja. Tās ir paredzētas tikai 3 punktu drošības jostai.

Jostas garuma maiņa:

Velciet vaļējās siksnas, lai saīsinātu un savilktu siksnas. Lai pagarinātu siksnas, nospiediet regulēšanas sprādzes atbrīvošanas pogu un pēc tam pavelciet siksnu līdz vēlamajam garumam.

Turklāt vajadzības gadījumā siksnas garumu var mainīt, izmantojot divas siksnas cilpas (ieskrūvētas) aizmugurē. 3. attēls: Jostas garuma maiņa

Drošības jostas stiprinājums:

Nospiediet sprādzes sarkano padziļinājumu, lai to ieeļļotu. Pēc tam atdaliet abus augšējos jostas turētājus. Lai aizvērtu jostu, ievietojiet jostas turētājus atsevišķi sprādzē un piespiediet tos kopā, līdz tie saslēdzas ar dzirdamu "klikšķi".

Lūdzu, atveriet arī rāvējslēdzēju uz apakšējā jostas vairoga, lai pārsegu varētu viegli noņemt. 4. attēls:

Drošības jostas sprādzes atvēršana un aizvēršana ("klikšķis")

Galvas pelīte

Lai atvieglotu galvas spilventiņu piestiprināšanu, noregulējiet sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā. Pārvelciet galvas spilvenu pārvalkus pāri galvas balsta sānu daļām un piestipriniet tos augšpusē ar spiedpogu. Apakšējā daļā piestipriniet galvas spilventiņus pie pagalvja ar elastīgo lenti.

5. attēls: spilventiņu pārklājums / 6. attēls: stiprinājums apakšā 7. attēls: stiprinājums augšpusē

Krūškurvja spilventiņi

Krūškurvja pelotes spilventiņus var piestiprināt muguras kreisajā un labajā pusē ar spiedpogām un Velcro trīs dažādos augstumos. Piestiprinot, sāciet ar spiedpogu.

Labāku fiksāciju var panākt, piespiežot pie vilnas sloksnēm sēdekļa aizmugurē. 8. attēls: Push poga / 9. attēls: Velcro stiprinājums

Sēdekļa sānu spilventiņi

Lai atvieglotu sānu spilventiņu piestiprināšanu, novietojiet atzveltni horizontālā stāvoklī. Novelciet sānu spilventiņu pārvalkus pāri sēdekļa sānu daļām un nostipriniet tos aizmugurējā daļā ar spiedpogu.

10. attēls: Pārvilšana pāri spilventiņam / 11. attēls: Spiedes tapa aizmugurē

Abdukcijas bloks

Abdukcijas bloku var pārvietot dziļumā. Lai to izdarītu, tas vispirms jāatvieno no kājstarpes siksnas. Noņemiet siksnas galu no kājstarpes siksnas vaļējā gala un atvienojiet siksnu no bīdāmās sprādzes un siksnas sprādzes. Izvelciet abdukcijas bloku uz augšu no starpenes siksnas.

Uzvelciet bīdāmo sprādzi un sprādzi atpakaļ uz kājstarpes siksnas un nostipriniet siksnas vaļējo galu ar siksnas galu. Novietojiet abdukcijas bloķīti atbilstoši nepieciešamībai uz Velcro, kas atrodas uz sēdekļa virsmas.

Lai varētu noņemt pārsegu, vispirms ir jāatvieno abdukcijas bloks no kājstarpes siksnas, kā aprakstīts iepriekš.

12. attēls: Siksnas gals / 13. attēls: Siksnas gala daļas noņemšana

14. attēls: Bīdāmās sprādzes un jostas sprādzes atiešana / 15. attēls: Abdukcijas bloka noņemšana

Attiecībā uz šādām iestatījumu iespējām / veikspējas funkcijām skatiet atsevišķu RECARO Monza Nova 2 lietošanas instrukciju.

Seatfix modelis (16. attēls)

ISOFIX ir starptautiski standartizēta bērnu sēdeklišu stiprināšanas sistēma. Transportlīdzekļa pusē attiecīgie ISOFIX stiprinājumi ir stingri savienoti ar automašīnas virsbūvi. Autosēdeklišus ar ISOFIX var ātri un viegli nostiprināt šajos standartizētajos stiprinājuma punktos. Tādējādi sēdeklītis ir labi nostiprināts pat tad, ja bērns nav automašīnā, un tas vairs nav papildus jātur ar automašīnas 3punktu drošības jostu. Lūdzu, iepriekš pārbaudiet, vai jūsu transportlīdzeklī ir ISOFIX stiprinājumi.

Sēdekļis un atzveltne ar integrētu 11 virzienos regulējamu galvas balstu**Bezpakāpju galvas balsts kakla atbalstam ar galvas balstā integrētu gaisa spilvenu Aizsardzība pret sānu triecienu****Fiksētie roku balsti Drošības jostas****vairoga polsterējums****galvas balstā iebūvēti skaļruņi mp3 atskaņotāja pieslēgšanai noņemami****pārsegi****Aksesuāri**

Piezīme: Informācija par uzstādīšanu ir sniegta attiecīgajās lietošanas instrukcijās, kas ir pievienotas piederumiem. Ja lietošanas instrukcijas trūkst, varat tās lejupielādēt no www.thomashilfen.de. Palīgierīces tiek montētas/demontētas, izmantojot standarta instrumentus.

Adaptēra plāksne (17. attēls)

Adaptēra plate ir priekšnoteikums citu piederumu izmantošanai. Tā ir piestiprināta rehabilitācijas autokrēslīņa priekšpusē.

Vinilplašu galds ar adapteri (18. attēls)

Izmantojot grozāmo funkciju, rehabilitācijas autokrēslīņu var pagriezt pret transportlīdzekļa durvīm. Aprūpētājiem ir vieglāk pārvietot lietotāju un piekļūt sēdekļa 5 punktu pozicionēšanas jostai. Lietotājam ir vieglāk patstāvīgi iekāpt automašīnā un izkāpt no tās. Vienlaikus rehabilitācijas autokrēslīņa priekšpusē esošajam adapterim var pievienot citus piederumus.

Muguras stabilizators (19. attēls)

Atzveltnes stabilizatori nostiprina rehabilitācijas autokrēslīņa kustīgo atzveltņi. Izmantojot grozāmo funkciju, tie neļauj autokrēslīņa atzveltnei nejauši nolocīties atpakaļ.

Seatfix adapteris (20. attēls)

Izmantojot Seatfix adapteri, ISOFIX var izmantot transportlīdzeklī, lai palielinātu rehabilitācijas autokrēslīņa stabilitāti. Papildu stabilizācija ir īpaši nepieciešama, ja tiek izmantota arī pagriešanas funkcija (un/vai sasvēršanas funkcija). Seatfix adapteris arī nostiprina tukšo sēdekli transportlīdzeklī.

Stabilizācijas kronšteins (21. attēls)

Stabilizācijas stienis tiek piestiprināts pie rehabilitācijas autokrēslīņa aizmugures un iebīdīts spraugā starp sēdekļa virsmu un transportlīdzekļa sēdekļa atzveltņi. Tas ir piemērots, ja nav iespējams izmantot ISOFIX. Papildu stabilizācija ir īpaši nepieciešama, ja tiek izmantota arī pagriešanas funkcija (un/vai sasvēršanas funkcija).

Atbalsta kājiņa (22. attēls)

Atbalsta kājiņa nodrošina rehabilitācijas autokrēslīņa stabilizāciju. Papildu stabilizācija ir īpaši nepieciešama, ja tiek izmantota arī pagriešanās funkcija (un/vai sasvēršanās funkcija).

Sēdekļa ķīlis, apakšdaļa (23. attēls)

Sēdekļa ķīli (zemāk) novieto uz transportlīdzekļa sēdekļa zem rehabilitācijas autosēdekļa, lai panāktu sēdekļa slīpumu. Sēdekļa slīpumu atpakaļ izmanto bērniem ar mazu ķermeņa sasprindzinājumu un/vai vāju galvas kontroli.

Sēdekļa ķīlis ir novietots centrāli zem automašīnas sēdekļa. Augstā mala ir priekšpusē, lai panāktu optimālu bērna atpūtas pozīciju.

Uzmanību: sēdekļa ķīļa izmantošana kopā ar grozāmo plāksni ievērojami ierobežo tā funkciju. Tāpēc mēs neiesakām sēdekļa ķīli un grozāmo plāksni izmantot vienlaicīgi.

24. attēls: Sēdekļa novietošana uz sēdekļa ķīļa / 25. attēls: Galīgais stāvoklis

Sēdekļa ķīlis, iekšpusē (26. attēls)

Sēdekļa ķīli (iekšpusē) novieto uz sēdekļa virsmas vai uz rehabilitācijas autokrēslīņa muguras apakšējās daļas. Tas ļauj ātri un mainīgi mainīt lietotāja sēdēšanas pozīciju, piemēram, aktīvai vai pasīvai sēdēšanai, sēdekļa dziļuma samazināšanai vai stabilākai sēdēšanai.

Sēdekļa ķīli (iekšpusē) var nostiprināt trīs dažādās pozīcijās uz sēdekļa virsmas:

1. Aktīvu sēdēšanas pozu var panākt, novietojot sēdekļa ķīli uz sēdekļa virsmas ar augsto pusi uz aizmuguri un to piestiprinot.
2. Piestipriniet sēdekļa ķīli ar plakano pusi aizmugurējā daļā, lai nodrošinātu pasīvāku sēdēšanas/atpūtas pozīciju.
3. Lai saīsinātu sēdekļa dziļumu vai palielinātu sēdekļa leņķi, sēdekļa ķīli var piestiprināt arī vertikāli ar platāko pusi uz leju uz aizmugurējās sēdekļa virsmas.

Divi ārējie spilventiņi papildu aizsardzībai ir piestiprināti sānos. 27. attēls: aktīvais / 28. attēls: pasīvais

29. attēls: mugura / 30. attēls: ar sānu spilventiņiem

Apakšdelmu balsts (31. attēls)

Priekšdelma balsts ir novietots lietotāja vēdera priekšā. Tas nodrošina lietotājam stabilitāti un drošību, lietotājs var uz tā balstīties un labāk turēties. Kā vizuāla barjera drošības jostas sprādzēšanai tā novērš uzmanību no atsprādzēšanās, un lietotājs var izmantot virsmu aktivitātēm.

Uzsieniet balstu uz abām sēdekļa virsmas sānu daļām. Apakšdelmu balsts abās pusēs ir piestiprināts ar divām Velcro siksnām. Velcro siksnas no padušu balsta izvelciet cauri plastmasas gredzeniem uz sēdekļa / sēdekļa atzveltnes (ieguņa jostas).

32. attēls: Galda novietošana / 33. attēls: Siksnu piestiprināšana pie sēdekļa

Drošības jostas mīkstais spilventiņš (34. attēls)

Siksnu mīkstie spilventiņi pasargā lietotāju plecu zonā no sāpīga spiediena un siksnu iegriešanas.

Jostas savienotājs (35. attēls)

Drošības jostas savienotājs tiek izmantots, lai savienotu rehabilitācijas autokrēslīņa plecu drošības jostas (push-in stiprinājums). Tas novērš siksnu savērpšanos un slīdēšanu. Siksnas cieši pieguļ lietotājam un neļauj lietotājam izkrist

Kāju balsts (36. attēls)

Izmantojot kāju balstu, lietotājs stabili sēž rehabilitācijas autokrēslī, jo var stingri atbalstīt kājas. Ir novērsta iespēja izslīdēt no sēdekļa uz transportlīdzekļa grīdas. Kāju balstu var nolocīt, lai būtu vieglāk iekāpt automašīnā un izkāpt no tās. Kāju balstu var izmantot, lai trenētu patstāvīgu iekāpšanu sēdekli un izkāpšanu no tā.

Ja tiek izmantota grozāmā plāksne, kāju balsts tiek ievietots kāju balsta adapterī. Šādā gadījumā vienmēr nostipriniet kāju balstu pret izkrišanu ar lietošanas instrukcijā pievienoto zvaigžņveida skrūvi. Tās turētājs (metāla bloks ar vītņi) atrodas kāju balsta adaptera kreisajā caurulē.

Lai stabilizētu kāju balstu uz transportlīdzekļa grīdas, noregulējiet balsta stieņu augstumu, pagriežot tos uz iekšu vai uz āru tā, lai stieņi saskartos ar transportlīdzekļa grīdu. Pēc tam nobloķējiet atbalsta stieņus ar zvaigžņveida rokturiem, lai novērstu to netīšu atskrūvēšanu. Lai to izdarītu, pagrieziet zvaigžņu grīfuļus uz augšu, cik vien iespējams, un stingri pievilciet tos.

Apakšējo kāju garums: apakšējo kāju garums tiek regulēts, pielāgojot kāju balsta augstumu. Lai to izdarītu, atskrūvējiet abas ārējās sešstūra skrūves un pēc tam atkal pietiekami pievelciet.

Kāju leņķis: Atskrūvējiet četras skrūves labajā un kreisajā pusē kāju balsta apakšpusē, lai ar slīdēm regulētu vēlamo kāju leņķi. Pēc tam skrūves atkal pievelciet.

Lūdzu, ņemiet vērā: kāju balstu nevar izmantot kopā ar sēdekļa dziļuma pagarinājumu. 37. attēls: Balsta ievietošana / 38. attēls: Stiprinājums 39. attēls: Augstuma regulēšanas transportlīdzeklis

Sēdekļa dziļuma pagarinājums (40. attēls)

Sēdekļa dziļuma pagarinājums paplašina rehabilitācijas autokrēslīņa sēdvirsmu. Augstāku lietotāju garākie augšstilbi tiek labāk atbalstīti, lai nodrošinātu stabilu sēdēšanas pozīciju.

Izmantojot grozāmo plāksni, sēdekļa dziļuma pagarinājums tiek ievietots tā kāju balsta adapterī. Šādā gadījumā sēdekļa dziļuma pagarinājumu vienmēr nostipriniet pret izkrišanu ar lietošanas instrukcijā pievienoto zvaigžņveida skrūvi. Tās turētājs (metāla bloks ar vītņi) atrodas kāju balsta adaptera kreisajā caurulē.

Lūdzu, ņemiet vērā: sēdekļa dziļuma pagarinājumu nevar izmantot kopā ar kāju balstu. 41. attēls: Balsta ievietošana / 42. attēls: Piestiprināšana

Veste pret izbēgšanu (43. attēls)

Drošības josta pret izkļūšanu neļauj bērnam izkļūt no automašīnas drošības jostas. Tiek aizklāti bīstamie spraugas starp drošības jostu un bērnu, ko bērns citādi izmantotu, lai izslīdētu no drošības jostas no pleciem.

Autosēdekļa aizsargs ar atzveltni (44. attēls)

Autokrēslīņa aizsargs atrodas zem bērnu autokrēslīņa uz transportlīdzekļa sēdekļa un atzveltnei. Tas pasargā autokrēslīņa sēdekli un atzveltni no bojājumiem. Priekšējās kabatās var glabāt nelielus priekšmetus.

Tehniskie dati**RECARO Monza Nova 2 Rehab**

Sēdekļa dziļums	30 cm
ar sēdekļa dziļuma pagarinājumu	43 cm
Sēdekļa platums priekšpusē	29 cm
Sēdekļa platums aizmugurē (ar sēdekļa ķīli, iekšpusē)	24 cm (20 cm)
Atzveltnei augstums (sēdekļa augstums)	60 - 77 cm
Plecu augstums (drošības jostas vadotne)	33 - 48 cm
Apakšējo kāju garums (no kāju balsta līdz grozāmajai plāksnei)	23 - 42 cm
Kopējie izmēri (W x H x D)	54 x 66 x 42 cm
Sēdekļa svars	7 kg
Lietotāja svars	15 - 50 kg

Materiālu specifikācijas

Poliesters - Trevira CS / 100% poliesters - RECARO Prime

Izmantotais polsterējuma materiāls ir "ugunsdrošs", pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 1021-1 un DIN EN 1021-2.

Materiālu un mezglu ugunsizturības pakāpe ir pārbaudīta saskaņā ar standartiem un atzīta par drošu.


100% Trevira CS Stoff / RECARO Prime ir augstas kvalitātes, elpojošs audums, kas ir pozitīvi pārbaudīts attiecībā uz bioloģisko saderību. (DIN EN ISO 10993-5 un 10993-10 Trevira CS Black).

Tīrīšana, apkope un remonts Tīrīšana, kopšanas


norādījumi un dezinfekcija ikdienā Mīkstās apdares materiāli

Spilveni ir viegli noņemami ar pāris roku kustībām, un tos var mazgāt atsevišķi. Tie sastāv no stoff vāks un, ja nepieciešams, putuplasta stoff ieliktni. Pārbaudiet, vai spilvenam ir rāvējslēdzējs vai Velcro aizdare. Ja tas tā ir, pirms mazgāšanas atveriet spilvenu un, ja nepieciešams, izņemiet putuplasta ieliktni. Lūdzu, ievērojiet arī turpmāk minētos kopšanas norādījumus.

RECARO Prime:

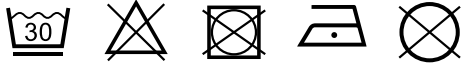

Trevira CS:

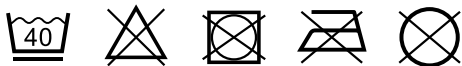

Vēlamies norādīt, ka pat augstas kvalitātes stoffe var izbalināt pastāvīgas un intensīvas saules gaismas vai biežas mazgāšanas dēļ.

Velcro stiprinājumi

Lai saglabātu Velcro stiprinājumu funkcionalitāti, laiku pa laikam notīriet Velcro siksnīņas ar birstīti. Veļas mazgāšanas laikā vienmēr aizveriet vai aizsedziet Velcro siksnīņas.

Plastmasas detaļas

Izstrādājuma plastmasas daļas var tīrīt un dezinficēt ar tirdzniecībā pieejamām ziepēm (neitrālām ziepēm).

Metāla detaļas

Izstrādājuma metāla daļas var tīrīt un dezinficēt ar tirdzniecībā pieejamām ziepēm (neitrālām ziepēm).

Dezinfekcija

Pirms dezinfekcijas notīriet polsterējumu, plastmasas daļas un metāla daļas.

Noslaukiet visas izstrādājuma plastmasas un metāla daļas ar mitru dezinfekcijas līdzekli. Jāizmanto tikai līdzekļi uz ūdens bāzes. Veicot dezinfekciju, jāievēro attiecīgā ražotāja lietošanas instrukcijas.

Speciālistu veikta apkope un pārbaude

Sagatavošana

Ražojumam jāpievieno lietošanas instrukcija. Ja tādas nav, lūdziet tās sniegt ražotājam. Iepazīstieties ar izstrādājuma funkcijām. Ja neesat iepazinies ar izstrādājumu, pirms testēšanas izlasiet lietošanas instrukciju. Pirms testa uzsākšanas notīriet izstrādājumu. Ievērojiet lietošanas instrukcijā ietvertos kopšanas norādījumus un testēšanas norādījumus, kas attiecas uz konkrēto izstrādājumu. Ja jums rodas papildu jautājumi, sazinieties ar apmācītu speciālistu konsultantu vai tieši ar Thomashilfen.

Produkta apkopi un remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Šī izstrādājuma lietotājam ir jānodrošina, lai paredzētās pārbaudes/tehniskā apkope tiktu veiktas regulāri un savlaicīgi. Ja ir redzami bojājumi, lietotājam ir aktīvi jāinformē kvalificēts personāls, kas nekavējoties novērš bojājumus.

Uzturēšanas plāns - ikgadēja pārbaude

	Platība	Funkcija	Bojājumi	Aizstāt
1	Plastmasas korpuss	👁	👁	
2	Pielāgošanas iespējas	👁	👁	
3	Spilvens		👁	
4	Jostas	👁	👁	
5	Plastmasas detaļas	👁	👁	
6	Skrūves un uzgriežņi	👁	👁	
7	Rādītāji		👁	
Aksesuāri				
8	Spilvens		👁	
9	Jostas	👁	👁	
10	Pielāgošanas iespējas	👁	👁	
11	Plastmasas detaļas	👁	👁	
12	Metāla detaļas	👁	👁	
13	Skrūves un uzgriežņi	👁	👁	
veic:			am:	
👁 = pārbaude 🔄 = atkārtota izmantošana ✓ = veikta pārbaude				

Rezerves daļas

Remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas. Rezerves daļu sarakstu var atrast internetā www.thomashilfen.de. Lai iegūtu pareizās rezerves daļas vai iespējamu tehnisku atsaukumu gadījumā, mums vienmēr ir nepieciešams sērijas numurs / UDI-PI un precīzs UDI-DI.

Rezerves daļu demontāžu / montāžu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls! Nepieciešamās atgriešanas gadījumā pārliecinieties, ka izstrādājums ir droši iepakots transportēšanai.

Uzglabāšana

Ja izstrādājums netiek lietots, uzglabājiet to drošā vietā. Uzglabāšanas laikā nenovietojiet un nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus. Aizsargājiet izstrādājumu no laikapstākļu ietekmes, piemēram, lietus, spēcīgas saules gaismas un sala. Ja izstrādājums ir slapjš, noslaukiet metāla un plastmasas daļas sausā veidā un nosusiniet spilventiņus pirms izstrādājuma uzglabāšanas.

Izmešana

Ja izstrādājums vairs nav derīgs tā stāvokļa dēļ vai tā kalpošanas laiks ir beidzies, to var nodot otrreizējai pārstrādei vietējā atbildīgajā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos pārstrādes un utilizācijas noteikumus.

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums, visi tā varianti un piederumi atbilst pamatnoteikumiem. Aktuālo ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt no interneta www.thomashilfen.de vai pieprasīt tieši no mums.

Garantija

Thomashilfen piedāvā divu gadu juridisko garantiju šim produktam. Termins sākas no preces nodošanas brīža. Garantija attiecas uz visām pretenzijām, kas ietekmē funkcijas. Nav ietverti bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ (piemēram, pārslodzes dēļ), kā arī dabiskā nolietojuma dēļ.

Derīgās lietošanas laiks

Izstrādājuma kalpošanas laiks ir līdz 6 gadiem, ja tiek veikta pareiza un regulāra apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ražojumu var lietot ilgāk, ja tas ir drošā un tehniski nevainojamā stāvoklī.

Teorētiskais kalpošanas laiks nav garantēts kalpošanas laiks. Tas ir atkarīgs no lietošanas intensitātes, un to vienmēr katrā gadījumā atsevišķi pārbauda speciālisti.

Lietošanas periods beidzas pirms noteiktā termiņa, kad lietotājs ir sasniedzis maksimālo ķermeņa svaru vai augumu, kas nepieciešams drošai produkta lietošanai.

Eksploatācijas laiks neattiecas uz nodilstošajām detaļām, piemēram, polsterējumu, pārvalkiem utt.

Mūža periods

Izstrādājuma kalpošanas laiks ir 8 gadi, ja tiek ievēroti kalpošanas laikā norādītie nosacījumi. Kalpošanas laiku veido lietderīgās lietošanas laiks un glabāšanas laiks.

Atkārtota izmantošana

Produkts nav piemērots atkārtotai izmantošanai. Bērnu autokrēsliņu funkcionālo piemērotību nevar precīzi noteikt, ja teorētiski mainās lietotājs. Izstrādājumam var būt neredzami bojājumi, kas nepieļauj turpmāku drošu lietošanu. Tādēļ ražotājs izslēdz lietotu bērnu autokrēsliņu pārdošanu un iegādi.

Dīleri



SIA Kanins

Smerla iela 2B

1006 Rīga

Phone: +371/67315451

kanins@latnet.lv





Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de