

RECARO Sport HERO Reha

 **Bruksanvisning** – Rehab-bilbarnstol RECARO Sport HERO Reha

CE


Thomashilfen





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32

Bästa kund,

du har valt en av våra produkter och vi vill passa på att tacka för förtroendet. Läs denna bruksanvisning först, så att du kan använda din nya produkt på ett säkert, praktiskt och bekvämt sätt för både dig och brukaren. På så sätt undviker du skador och handhavandefel. Se till att bruksanvisningen alltid finns i anslutning till produkten och finns tillgänglig för den som behöver den.

Denna bruksanvisning är ett komplement till RECARO originalbruksanvisning. Genom modifieringen av Reha-bilstolen ändras handhavandet av bilstolen på några punkter. Ändringarna beskrivs i denna kompletterande bruksanvisning.

Kontakta en fackhandel eller oss direkt om du har frågor om produkten.

**Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG**

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde / Tyskland

Telefon: +49 (0) 4761 8860

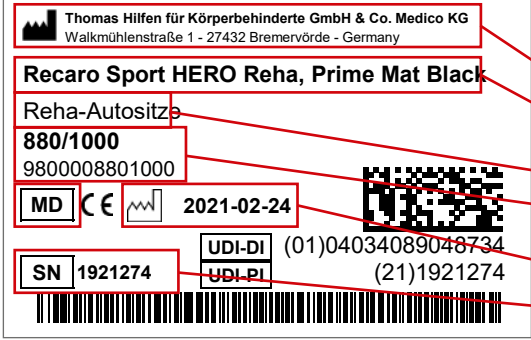

www.thomashilfen.de

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. Det kan göra att det finns skillnad mellan din produkt och vad som visas i media.

Innehållsförteckning

Illustrationer	3
Förord / Tillverkare	6
Märkningar / Modellidentifiering	7
Allmänna anvisningar / Säkerhetsanvisningar	8
Avsedd användning och användningsplats	9
– Avsedd användning / Tillämpningsområden	9
– Indikation / Patientmålgrupp, avsedda användare	9
– Risker med användning och kontraindikationer	9
Produktbeskrivning	9
– Leveransomfång / Grundutförande	9
– Idrifttagning	9
– Instruktion i användning	9
Inställningsmöjligheter / Teknisk prestanda	10
– Tillbehör	11
– Tekniska specifikationer	13
– Materialuppgifter	13
Rengöring, underhåll och reparation	14
– Rengöring, skötselanvisningar och desinfektion i vardagen	14
– Underhåll och inspektion i fackhandel / Underhållsplan	15
– Reservdelar	15
– Lagring / Kassering	15
EU-försäkran om överensstämmelse	15
Garanti	16
Nyttjandeperiod / Livslängd	16
Återanvändning	16
Distributör	16

Märkningar / Modellidentifiering

Märkning	Betydelse
	<p>Strekkodsetikett</p> <p>Position på produkten (Ill. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tillverkare - Produktnamn - Produktgrupp - Artikelnummer kort / långt - MD = Medicinteknisk produkt - Tillverkningsdatum - Serienummer
	<p>Typskylt</p> <p>Position på produkten (Ill. 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tillverkare - Produktnamn - Brukarvikt - CE-märkning - Beakta bruksanvisningen

Anvisningar

Allmänna anvisningar

- Läs bruksanvisningen noggrant innan första användningen, eller låt någon läsa upp den för dig om du har lässvårigheter. Om du inte har tillgång till bruksanvisning finns det att ladda ner på www.thomashilfen.de. Innehållet i den digitala bruksanvisningen går att förstora.
- Kontrollera om förpackningen har transportskador och att produkten är felfri.
- Ändringar av produkten är bara tillåtna enligt vad de befintliga inställningsmöjligheterna medger.
- Rengöring och skötsel i vardagen kan göras av anhöriga och assistenter. Underhåll och inspektion görs i fackhandeln.
- I vissa länder krävs att läkarintyg medförs.
- Reha bilstol kan användas både i baksätet och passagerarsätet. Vald bilstol MÅSTE vara framåtriktad.
- Alla märkningar måste finnas kvar på produkten och får inte på något sätt manipuleras.

Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera som minst var 3:e månad att produktens inställningar passar brukarens kroppsmått. Låt ev. en fackhandel eller ortopedtekniker anpassa inställningarna.
- Kontrollera regelbundet (varje vecka) att produktens inställningsmöjligheter är funktionsdugliga.
- Överbelasta inte produkten och beakta alltid maximal användarvikt resp. maximal belastning (se tekniska specifikationer).
- Lämna inte brukaren ensam utan uppsikt i produkten.
- Produkten får bara användas av en användare åt gången. Inga ytterligare personer får placeras i eller på produkten.
- Alla användare måste ha instruerats i produktens funktioner. Detta för att alla användare ska kunna befria brukaren ur produkten i nödsituationer.
- Låt inte brukaren stiga i eller ur produkten ensam utan uppsikt. Om fotstödet utsätts för allt för hög belastning finns det risk att det halkar eller välter.
- Brukaren ska alltid placeras med 5-punktsbältet (grundutrustning). Stol och brukare måste alltid säkras med fordonets 3-punktsbälte.
- Vid starkt solsken och värma kan produktens yta bli mycket varm. Beröring kan medföra brännskador. Använd produkten först den är tillräckligt sval igen. Skydda generellt produkten från direkt solsken.
- Beakta alla gällande säkerhetsstandarder i bruksanvisningen till ditt fordon och garantera på så sätt brukarens säkerhet.
- Bruksanvisningen måste förvaras på produkten.
- Om det, tvärtemot förväntningarna, inträffar en allvarlig incident med produkten, ska du omedelbart rapportera detta till vårt företag och ansvariga myndigheter.

Avsedd användning och användningsplats

Avsedd användning / tillämpningsområden

Rehab-bilbarnstolen RECARO Sport HERO Reha är en medicinteknisk produkt i klass 1.

Den har utformats för handikappanpassad transport och för att hålla barn i en säker sittställning i fordon. Stolen säkras alltid med fordonets egna trepunktssäkerhetsbälte. Med rehab-bilbarnstolens fempunktsbälte positioneras och stöds barnet i en upprätt sittställning. Dessutom har rehab-bilbarnstolen inbyggd vinkeljustering.

Rehab-bilbarnstolen ger ytterligare fasthållning i en säker sittställning, stabiliserad huvudkontroll och stabilt säte för bäckenet, samt ett fotstöd. Dessutom har produkten ett brett utbud av tillbehör för individuell anpassning.

All annan eller utökad användning betraktas som felaktig.

Indikation/patientmålgrupp, avsedda användare

Rehab-bilbarnstolen används för barn med strukturella och/eller funktionella begränsningar eller fel hållning för huvud och torso. Den garanterar en stabil och fysiologisk positionering, om en vanlig bilbarnstol inte räcker till för en stabil sittställning i fordonet.

Risker med användning och kontraindikationer

Vid korrekt användning går det att utesluta risker vid användning. Inga kända kontraindikationer finns.

roductbeskrivning

Leveransomfång

Din produkt levereras förmonterad i grundutförande. Det tillbehör som eventuellt har beställts medföljer produkten och måste monteras i efterhand. En bruksanvisning medföljer produkten.

Grundutförande

Sittplats och ryggstöd med 4-läges höj- och sänkbart nackstöd, integrerad 5-punktssele med central justering, höj- och sänkbart axelsäte med HERO-selepolstringssystem inkl. seleskyddspolstring (liten), extra breda sidoabsorbenter (ASP), bärhandtag, justerbart viloplatsläge, avtagbara huvud-, bröstkorgs- och sätessidokuddar, avtagbara överdrag

Idrifttagning

- Ta noggrant bort transportsäkringar och förpackningar.
- Var uppmärksam på att inte förpackningsmaterial och smådelar inte kommer i händerna på barn, för att undvika att de sväljer dem och utsätter sig för kvävningsrisk.

Instruktion i användning

Användaren instrueras i hur detta hjälpmedel används av auktoriserad yrkesperson utifrån denna bruksanvisning.

Yrkespersonen ska montera stolen i bilen tillsammans med användaren, och ställa in stolen enligt den aktuella brukarens mått.

Man måste säkerställa att användaren har instruerats i produktens alla funktioner, samt i- och urmontering i fordonet.

Inställningsmöjligheter / Teknisk prestanda

Vänligen observera:

Det i barnsätet integrerade 5-punkts säkerhetsbältet är endast avsett för användning i ECE-grupp I. Förutsättningen är att barn-bilsätet först har säkrats med det 3-punktsbälte som finns i fordonet.

Barn-bilsätet RECARO Sport HERO Reha har klarat Dekras (Dresden) belastningstest i enlighet med riktlinjerna i ECE R 44/04. RECARO Sport HERO Reha är därmed godkänt som anordning för fasthållning enligt de speciella kraven „S“.

ECE-grupp II-III (18–36 kg):

Detta test har bevisat, att 5-punkt bältet för barn med en kroppsvikt på mer än 18 kg kan användas som extra positioneringsbälte. När du använder 5-punkt bältet ska barnet ALLTID också säkras med bilens 3-punkt säkerhetsbälte och det är viktigt att beakta alla instruktioner som gäller den rätta installationen enligt original RECARO monterings- och bruksanvisningen.

Det i barnstolen integrerade 5 punkt positioneringsbältet har INGEN säkerhetsfunktion, utan säkerhetsfunktionen är endast säkerställd genom bilens 3-punkt säkerhetsbälte. 5-punkt bältet är endast avsett som positioneringsbälte för barn med en kroppsvikt på mer än 18 kg, d.v.s. det ska ge barnet ett extra stöd.

För att ditt barn ska kunna använda RECARO Sport HERO Reha så länge som möjligt kan man demontera 5 punkt bältet inklusive styrröret. Beakta i detta fall instruktionerna i original RECARO monterings- och bruksanvisningen. Om 5-punkt positioneringsbältet även ska användas för stora barn så rekommenderar vi att använda vår bältesförlängning.

5-punkts bälte

Ytterligare information om användning av bältet hittar ni i den bifogade bruksanvisningen för RECARO-sitsen.

Ändring av bältets längd:

Lyft sitsens sidodyna lite och lossa tygbandet med kardborrband. Nu ser man bältets centralinställningsanordning, som sitter i sitskålen. För att ändra bältets längd, trycker man spaken nedåt och ställer in bältet genom att dra i den bältesände som hänger nerpå (förkorta) eller genom att dra båda bältena framåt (förlänga).

Ill. 3: Ändra bältets längd

Bälteslås:

För att öppna, tryck in den röda fördjupningen i låset. Dela sedan de båda övre bälteshållarna. För att stänga bältet för man samman de båda bälteshållarna igen, sticker in dem i låset och trycker dem samman, tills man hör att de hakar fast med ett hörbart „klick“.

Ill. 4: Öppna bälteslåset („Klick“)

Huvuddyna

Dra överdraget så stramt som möjligt över huvudstödet sidodel, och sätt fast den uppepå med skruvarna.

Ill. 5: Dra huvuddynan över sidodelen / Ill. 6: Fastsättning vid skruv

Thoraxdyna

För att ställa in Thoraxdynan, sätter man den löst i sitsen och för sedan de båda kardborrbanden bakom ryggdynan. Klistra sedan samman banden bakom dynan.

Ill. 7: Positionering i sätet / Ill. 8: Fastsättning av kardborrband

Sätets sidodynor

RECARO Sport HERO Reha är utrustad med en stolförminskare. På denna stolförminskare monteras stolens stödkuddar på sidorna. För att göra det drar du stolens stödkuddar på sidorna över sidodelarna på stolförminskaren. Fäst sedan stolens stödkuddar med hjälp av kardborrebanden på stolförminskaren.

Ill. 9: Dra stolens stödkuddar över stolförminskaren / Ill. 10: Kardborreband

För följande inställningsalternativ/prestandaegenskaper hänvisas till den separata bruksanvisningen för RECARO Sport HERO.

Sits och rygg med 4-vägs höj- och sänkbart nackstöd

Höj- och sänkbart axelbälte med HERO-bälteskuddsystem inkl. bälteskudde (liten)

Extra breda, sidoabsorbenter (ASP)

Bärhandtag

Justerbar viloposition

Avtagbara skydd

Tillbehör

Anvisning: Information om montering finns i respektive bruksanvisning, som medföljer tillbehöret. Om du inte har tillgång till bruksanvisning finns det att ladda ner på www.thomashilfen.de. Monteringen/demonteringen av tillbehöret görs med vanliga verktyg.

Adapterskiva (Ill. 11)

Adapterskivan är en förutsättning för att andra tillbehör ska kunna användas. Denna sätts fram på Reha-bilstolens säte.

Rengör plastytan på sätets undersidan med rengöringsmedel som finns i handeln (t.ex. vatten och diskmedel) innan det sätts fast, så att den är fullständigt fri från fett.

Lossa sedan kardborrbandet (mjuka delen) från adapterplattan och sätt den på sätets undersida. Den delen av kardborrbandet som har hakar lämnas kvar på adapterplattan.

Ill. 12: Positionering av kardborrbanden på sätet

Ställ in sätet i 90° vinkel framme på adaptern (adapterns grepp pekar framåt) och luta sätet på adaptern, så att sittytan sitter fast.

Ill. 13: Fastsättning av adaptern på sätet

Vridskiva med adapter (Ill. 14)

Med hjälp av vridfunktionen kan Reha-bilstolen vridas mot bildörren. Det innebär att det blir lättare för assistenten att förflytta brukaren och att få åtkomst till sätets 5-punktsbälte. Det blir också lättare för användaren att själv ta sig i och ur bilen. Adaptern kan också användas för att fästa andra tillbehör fram på Reha-bilstolen.

Seatfix-adapter (Ill. 15)

Med Seatfix-adapter kan man använda ISOFIX-fästet i bilen och på så sätt förbättra Reha-bilstolens stabilitet. Den extra stabiliteten behövs särskilt när man använder vridfunktionen (och/eller lutningsfunktionen). Samtidigt säkrar Seatfix-adaptern det tomma sätet i bilen.

Stabiliseringsbygel (Ill. 16)

Stabiliseringsbygeln fästs bak på Reha-bilstolen och skjuts in i spalten mellan bilsätets säte och ryggstöd. Den används när det inte finns något ISOFIX-fäste. Den extra stabiliteten behövs särskilt när man använder vridfunktionen (och/eller lutningsfunktionen).

Stödfot (Ill. 17)

Stödfoten stabiliserar Reha-bilstolen. Den extra stabiliteten behövs särskilt när man använder vridfunktionen (och/eller lutningsfunktionen).

Fotstöd (Ill. 18)

Med fotstödet sitter användaren stabilt i Reha-bilstolen, eftersom brukaren kan stödja benen. Det förhindrar att brukaren halkar ur stolen ner mot bilgolvet. Fotstödet kan fällas in för att underlätta i- och urstigning. Med hjälp av fotstödet kan brukaren träna på att själv ta sig i och ur stolen.

Skjut in fotstödens rör fram in i adaptern. För att göra det trycker du in låsfjädern på fotstödet. Säkra alltid fotstödet med stjärnskruven på vänster rör på fotstödsadaptern så att fotstödet inte kan lossna. I fotstödsrören finns flera hål så att du kan anpassa det hela till djupet på bilsätet.

Ill. 19: Föra in stöden

För att göra fotstöden stabila på fordonets golv ska stödstångens höjd anpassas genom att vrida in resp. ut den, så att stången har markkontakt i fordonet. Lås därefter stödstångerna genom stjärngreppen, för att förhindra att de vrids ur av misstag. Vrid stjärngreppsskruvarna så långt uppåt som möjligt, och dra åt ordentligt.

Ill. 20: Höjdanpassning fordon

Underbenslängd:

Inställning av underbenslängd sker genom att ställa in fotstödens höjd. För att göra detta lossar man de båda yttre skruvarna med räfflade huvuden, och dra sedan åt dem tillräckligt hårt.

Fotvinkel:

Lossa de fyra skruvarna till höger och vänster på fotstödet undersida, för att ställa in den önskade fotvinkeln över skenor. Dra sedan åt skruvarna igen.

Upphöjningsblock för fotstöd (Ill. 21)

Upphöjningsblocket för fotstöd gör att även brukare med kortare underben kan använda fotstödet.

Säteskil, undre (Ill. 22)

Säteskilen (undre) läggs på bilsätet, under Reha-bilstolen, när man vill ha en lutning av stolen. Den kan lutas bakåt för barn med svag kroppstonus och/eller svag huvudkontroll.

Sitskilen positioneras i mitten under bilsätet. Den höga kanten befinner sig framtill, för att barnet ska få en optimal viloposition.

Varning: Användning av sitskil tillsammans med vridplattan inskränker dess funktion väsentligt. Vi rekommenderar därför inte samtidigt användande av sitskil och vridplatta.

Ill. 23: Sätta sitsen på sitskilen / Ill. 24: Slutposition

Bord (Ill. 25)

Bordet sätts framför magen på brukaren. Det ger brukaren stabilitet och säkerhet, eftersom brukaren säkert kan stödja sig på det och lättare hålla sig upprätt. Den följer också bälteslåset, så att brukaren inte kan få upp det, och samtidigt använda ytan för aktiviteter.

Montera först bordets sidodelar, genom att dra det på sätets runda hörnpunkter. Sidan med det längre tygstycket måste visa utåt. Sätt fast tyget på sätets inställningshjul med hjälp av de avsedda öppningarna i sidodelarnas överdrag. Överblivet tyg kläms in under sitsdynan.

Ill. 26: Placera sidodelar

Sätt sedan fast bordet på sidodelarnas kardborreband. För sedan bältet i sidled igen till framsidan på utsidan bakom sätets baksida och fäst det på bordets kardborreband (fleece).

Ill. 27: Sätta fast borde

Tips: Om bordet används bör av utrymmesskäl ett eventuellt befintligt bältesbrickas dyna avlägsnas.

Bälteslåsavderring (Ill. 28)

Bältesavderring sätts fast under bälteslåset på 5-punktsbältet i Reha-bilstolen. Den skyddar användaren från ett oönskat tryck mot magen från bälteslåset och fjädrar rörelse och tryck tillbaka till stegområdet.

Bältesavderring (Ill. 29)

Bältesavderringen skyddar användarens axelområdet från smärtsamt tryck och skärning från bältet.

Bältesförlängning (Ill. 30)

Bältesförlängningen behövs ev. vid större brukare, så att bältet passar bra. (Endast för ECE-grupp II + III, 18 - 36 kg.)

Anti-Escape-väst (Ill. 31)

Anti-Escape-västen förhindrar att barnet slingrar sig ur bilstolens bälte. Farliga luckor mellan bälte och barn, som barnet annars använder för att dra av bältet från axlarna, täcks över.

Bilstolsskydd med rygg (Ill. 32)

Bilstolsskyddet ligger under barnbilstolen på bilens säte och ryggstöd. Den skyddar sätets och ryggstödet yta mot skador. I den främre fickan kan man förvara små föremål.

Tekniska specifikationer**RECARO Sport HERO Reha**

Sättdjup (med sittedynor)	31 cm (26 cm)
Sättsbredd fram (med sättdynor) (med sättsreducerare)	31 cm (21 cm) 27 cm
Sättsbredd bak (med sättdynor) (med sättsreducerare)	29 cm (20 cm) 25 cm
Rygg höjd (sits)	53 - 73 cm
Axel höjd (bältesstyrning)	23 - 42 cm
Totala mått (B x H x D)	54 x 55 (max. 81) x 52 cm
Sätets vikts	ca. 8 kg
Brukarvikt	9 - 36 kg

Materialuppgifter

Stoppning: Polyester - Trevira CS / 100% Polyester - RECARO Prime

Det stoppningsmaterialet som används är "mycket brandfarligt", testad enligt DIN EN 1021-1 samt DIN EN 1021-2.

Beständighet mot antändlighet hos material och komponenter har testats enligt gällande normer och befunnits ofarlig.

Tyget 100 % Trevira CS Stoff / RECARO Prime är en högkvalitativ väv som andas, och testats på biokompatibilitet med positivt resultat. (DIN EN ISO 10993-5 och 10993-10 Trevira CS svart)

Rengöring, underhåll och reparation

Rengöring, skötselanvisningar och desinfektion i vardagen

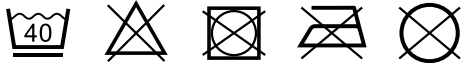
Stoppning

Stoppningen går lätt att ta av med några få handgrepp och kan tvättas separat. Den består av ett tygöverdrag och ev. inlägg av skumgummi. Kontrollera om stoppningen har blyxtlås- eller kardborreförslutning. Om ja, öppna den och ta ur stoppningen eller inläggen av skumgummi innan tvätt. Observera följande skötselanvisningar.

RECARO Prime:



Trevira CS:



Vi vill upplysa om att även högkvalitativa tyg kan blekas av frekvent och intensivt solsken eller frekvent tvätt.

Kardborreförslutningar

För att kardborreförslutningen ska bevaras, ska kardborrebanden borstas av med en borste till och från. Sätt alltid ihop, eller täck över, kardborrebanden när du tvättar dem.

Plastdelar

Plastdelar på produkten kan rengöras och desinficeras med vanliga (neutrala) rengöringsmedel.

Metalldelar

Metalldelar på produkten kan rengöras och desinficeras med vanliga (neutrala) rengöringsmedel.

Desinfektion

Rengör stoppning, plastdelar och metalldelar före desinfektion.

Torka av alla plast- och metalldelar på produkten med en fuktig trasa med desinfektionsmedel. Använd uteslutande vattenbaserade desinfektionsmedel. Beakta instruktionerna från respektive tillverkare vid desinfektion.

Förberedelse

Bruksanvisningen måste medfölja produkten. Om ingen bruksanvisning finns, beställ den av tillverkaren. Gör dig bekant med produktens funktioner. Om du inte är bekant med produkten, läs bruksanvisningen innan du kontrollerar den. Rengör produkten innan du kontrollerar den. Beakta skötselanvisningarna och de produktspecifika kontrollanvisningarna i bruksanvisningen. Kontakta din återförsäljare, eller Thomashilfen direkt, om du har ytterligare frågor.

Service och reparation av produkten får endast utföras av kunnig yrkesperson. Användaren av denna produkt måste se till att föreskrivna inspektioner/underhållsarbeten utförs regelbundet och i rätt tid. Om en skada upptäcks, måste brukaren informeras och skadan omedelbart åtgärdas av en kunnig yrkesperson.

Underhållsplan – Årlig inspektion

	Område	Funktion	Skada	Byt ut
1	Säte och ryggstöd i plast	👁	👁	
2	Justeringsmöjligheter	👁	👁	
3	Stoppning		👁	
4	Bälte	👁	👁	
5	Plastdelar	👁	👁	
6	Skrivar och muttrar	👁	👁	
7	Märkningar		👁	
Tillbehör				
8	Stoppning		👁	
9	Bälte	👁	👁	
10	Justeringsmöjligheter	👁	👁	
11	Plastdelar	👁	👁	
12	Metalldelar	👁	👁	
13	Skrivar och muttrar	👁	👁	
utförd av:			den:	
👁 = Inspektion ✓ = Kontroll utförd				

Reservdelar

Använd uteslutande originalreservdelar vid reparationer. En lista över reservdelar finns på www.thomashilfen.de. För att få rätt reservdelar, eller vid möjliga tekniska återkallanden, behöver vi veta serienumret/UDI-PD och exakt UDI-DI.

Demontering/montering av reservdelar får uteslutande utföras av kunnig yrkesperson! Om produkten måste returneras måste du se till att den förpackas på ett transportsäkert sätt.

Lagring

Förvara produkten på en säker plats när den inte används. Ställ eller lägg inga tunga föremål på produkten under lagring. Skydda produkten från väderpåverkan som regn, starkt solsken och frost. Om produkten är våt, torka av metall- och plastdelar och torka stoppningen innan du lagrar produkten.

Kassering

Om produkten inte kan återanvändas, pga. dåligt skick, eller har nått slutet av sin livscykel kan den lämnas in på en loka återvinningsstation för återvinning. Beakta de lokalt gällande bestämmelserna för återvinning och kassering.

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi försäkras härmed under eget ansvar att produkten och ev. varianter och tillbehör överensstämmer med de principiella bestämmelserna. En aktuell EU-försäkran om överensstämmelse finns alltid att ladda ner på www.thomashilfen.de eller kan beställas genom oss.

Garanti

Thomashilfen lämnar två års garanti för denna produkt, enligt lag. Garantiperioden börjar gälla när varan överlämnas. Garantin omfattar alla krav gällande funktion. Undantaget är skador till följd av felaktig användning (t.ex. överbelastning) samt normalt slitage.

Nyttjandeperiod

Produkten har en förväntad nyttjandeperiod på upp till 6 år vid korrekt och regelbundet underhåll enligt tillverkarens uppgifter. Produkten kan användas efter detta om den är i säkert och tekniskt invändningsfritt skick.

Den teoretiska nyttjandeperioden är ingen garanterad nyttjandeperiod. Den beror på hur intensivt produkten används och ska prövas från fall till fall genom fackhandeln.

Nyttjandeperioden förkortas om brukaren har nått maximal kroppsvikt eller maximal kroppsstorlek för att säkert kunna använda produkten.

Nyttjandeperioden omfattar inte slitdelar som stoppning, överdrag etc.

Livslängd

Produkten har en livslängd på 8 år om den har använts enligt förutsättningarna för full nyttjandetid. Livslängden består av nyttjandeperiod och lagringstider.

Återanvändning

Denna produkt kan inte återanvändas. Barnstolars funktionsduglighet kan inte fastställas på ett säkert sätt vid ett teoretiskt byte av brukare. Produkten kan ha skador som inte syns och som utesluter vidare säker användning. Inköp och införskaffande av begagnade barnstolar utesluts av tillverkaren.

Distributör



MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
43439 Kungsbacka
Phone: +46 (0) 300 56 97 00
Fax: +46 (0) 300 56 97 01
info@maydayaid.se
www.maydayaid.se





Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de