


RECARO Sport HERO Reha

 **Használati útmutató** – Rehab autósülés RECARO Sport HERO Reha

CE


Thomashilfen





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32

Kedves vásárló,

Ön a mi termékünket választotta, és szeretnénk megköszönni a belénk vetett bizalmát. Annak érdekében, hogy az új termék kezelése biztonságos, praktikus és kényelmes legyen az Ön és a felhasználó számára, kérjük, először olvassa el ezt a használati útmutatót. Ez segít elkerülni a sérüléseket és a működési hibákat. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy ez a használati utasítás a termékkel együtt maradjon, és minden felhasználó számára elérhető legyen.

Ez a használati utasítás az eredeti RECARO használati utasítás kiegészítése. A rehabilitációs autósülés módosítása néhány ponton megváltoztatja az autósülés kezelését. A változtatásokat ez a kiegészítő használati utasítás ismerteti.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez vagy közvetlenül hozzánk.





Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
 Walkmühlenstraße 1
 27432 Bremervörde / Németország
 Telefon: +49 (0) 4761 8860
 www.thomashilfen.de

A technikai változtatások jogát fenntartjuk. Ez eltérésekhez vezethet az Ön terméke és a médiában megjelenő ábrázolás között.

Tartalomjegyzék

Képek	3
Előszó / gyártó	6
Címkék / modell azonosítása	7
Általános információk / biztonsági utasítások	8
Rendeltetés	9
– Rendeltetészerű használat / alkalmazási területek	9
– Javallat / betegcélcsoport, tervezett felhasználók	9
– Használati kockázatok és ellenjavallatok	9
Termékleírás	9
– Szállítási terjedeleme / alapfelszereltség	9
– Üzembe helyezés	9
– Felhasználói képzés	9
Beállítási lehetőségek / teljesítményjellemzők	10
– Tartozékok	11
– Műszaki adatok	13
– Anyagra vonatkozó előírások	13
Tisztítás, karbantartás és javítás	14
– Tisztítási, ápolási és fertőtlenítési utasítások a mindennapi életben	14
– Karbantartás és ellenőrzés a szakszerviz által / karbantartási ütemterv	15
– Pótalkatrészek	15
– Tárolás / ártalmatlanítás	15
EU-megfelelőségi nyilatkozat	15
Garancia	16
Hasznos élettartam / élettartam	16
Újrafelhasználás	16
Forgalmazó	16

Címkék / modell azonosítása

Matrica	Jelentése
	<p>Vonalkódos címke</p> <p>Elhelyezkedés a terméken (1. ábra)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyártó - Termék neve - Termékcsoport - Tételszám rövid/hosszú - MD = Orvostechnikai eszköz - A gyártás dátuma - Sorszám
	<p>Névtábla</p> <p>Elhelyezkedés a terméken (2. ábra)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyártó - Termék neve - Felhasználói súly - CE-jelölést - Kövesse a használati utasításokat

Megjegyzések

Általános megjegyzések

- Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, vagy olvasási nehézség esetén olvastassa fel magának. Ha a használati utasítás hiányzik, letöltheti a www.thomashilfen.de oldalról. A digitális használati utasítás tartalma kibővíthető.
- Ellenőrizze a csomagolást a szállítási sérülések szempontjából, és hogy a termék tökéletes állapotban van-e.
- A termék módosítása csak a tervezett beállítási lehetőségek keretein belül megengedett.
- A mindennapi életben a takarítást és a gondozást a hozzátartozók és a gondozók végezhetik. A karbantartást és az ellenőrzést szakkereskedők végzik.
- Egyes országokban orvosi igazolással kell rendelkezni.
- A rehabilitációs autósülés az egyik hátsó ülésen és az utasülésen is használható. A kiválasztott autósülésnek előre nézőnek kell lennie.
- Minden jelölésnek a terméken kell maradnia, és azt nem szabad megváltoztatni.

Biztonsági utasítások

- Legalább 3 havonta ellenőrizze, hogy a termék beállításai még mindig megfelelnek-e a felhasználó aktuális testméreteinek. Szükség esetén a beállításokat szakkereskedővel/ortopédiai szakemberrel állíttassa be.
- Rendszeresen (hetente) ellenőrizze a termék beállítási lehetőségeinek működését.
- Kérjük, ne terhelje túl a terméket, és tartsa be a maximális felhasználói súlyt vagy a maximális terhelhetőséget (lásd a műszaki adatokat).
- Soha ne hagyja a felhasználókat felügyelet nélkül a termékkel.
- A terméket egyszerre csak egy felhasználó használhatja. A termékben vagy a terméken kívül más személyek nem tartózkodhatnak.
- Minden felhasználót ki kell oktatni a termék funkcióiról. Így vészhelyzetben a felhasználó gyorsan kiszabadulhat a termékből.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a felhasználót, amikor be- vagy kiszáll a termékből. Ha a lábtartó túlságosan meg van terhelve, fennáll a csúszás vagy a felborulás veszélye.
- A felhasználót mindig az 5 pontos pozícionáló övvel kell elhelyezni (alapfelszerelés). Az ülést és a használót mindig a jármű 3 pontos biztonsági övével kell rögzíteni.
- Az erős napfény és a hő magas felületi hőmérsékletet okozhat a terméken. Ekkor fennáll a sérülés veszélye. Ne használja újra a terméket, amíg az kellőképpen le nem hűlt. Általában védje a terméket a közvetlen napfénytől.
- Kérjük, a felhasználó biztonsága érdekében tartsa be a járművére vonatkozó, a jármű használati utasításában szereplő biztonsági előírásokat.
- A használati utasításnak a termékkel együtt kell maradnia.
- Ha a várakozásokkal ellentétben a termékkel súlyos incidens történik, kérjük, haladéktalanul jelezze azt vállalatunknak és az illetékes hatóságnak..

Rendeltetés

Rendeltetésszerű használat / alkalmazási területek

A RECARO Sport HERO Reha rehabilitációs autósülés 1. osztályú orvostechnikai eszköz.

Fogyatékkal élő gyermekek szállítására és a gyermekek biztonságos üléspozíciójának fenntartására tervezték a gépjárművekben. Az ülés mindig a jármű saját 3 pontos biztonsági övével van rögzítve. A rehabilitációs autósülés 5 pontos övét a gyermek egyenes ülőhelyzetének beállítására és támogatására használják. Ezenkívül a rehabilitációs autósülés integrált ülésdöntővel rendelkezik.

A rehabilitációs autósülés további támogatást nyújt a biztonságos üléshez, stabilizálja a fej irányítását és a stabil ülést a medence területén, valamint támaszt nyújt a lábtérben. Ezenkívül a termék széleskörű tartozékokat kínál az egyéni alkalmazkodáshoz.

Bármilyen más vagy ezen túli használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Javallat / betegcélcsoport, tervezett felhasználók

A rehabilitációs autósülést olyan gyermekek számára használják, akiknek a fej és a törzs területén szerkezeti és/vagy funkcionális korlátok vagy helytelen helyzetek vannak. Stabil és fiziológiás testhelyzetet biztosít, ha a hagyományos gyermekülés nem elegendő a járműben való stabil üléshez.

Használati kockázatok és ellenjavallatok

Megfelelő használat esetén a kockázatok kizárhatók az alkalmazás során. Ellenjavallatok nem ismertek.

Termékleírás

Szállítási terjedelem

A terméket alapkonfigurációban, előre összeszerelve szállítjuk. A megrendelt tartozékokat a termékhez mellékeljük, és azokat utólag kell felszerelni. A termékhez mellékelte használati útmutatót mellékeljük.

Alapfelszerelés

Ülés és háttámla 4 pozícióban állítható magasságú fejtámlával; integrált 5 pontos heveder központi állítóval; állítható magasságú vállheveder HERO hevederpárnarendszerrel, beleértve a hevederpajzs párnát (kicsi); extra széles oldalsó energiaelnyelők (ASP); hordozófogantyú; állítható pihenőhelyzet; levehető fej-, mellkas- és ülésoldali párnák; levehető huzatok.

Üzembe helyezés

- Óvatosan távolítsa el a szállítási zárat és a csomagolást.
- Győződjön meg arról, hogy a csomagolóanyag és az apró alkatrészek nem kerülhetnek a gyermekek kezébe, hogy elkerülje a lenyelést vagy a fulladás veszélyét.

Felhasználói képzés

A felhasználót a segédeszköz használatára felhatalmazott szakszemélyzet oktatja ki a jelen használati utasítás alapján.

A szaktanácsadónak a felhasználóval együtt be kell szerelnie az ülést a járműbe, és az ülést az adott felhasználó méreteire kell beállítania.

Biztosítani kell, hogy a felhasználó a termék minden funkcióját, valamint a járműbe való beszerelést és a járműből való eltávolítást illetően oktatásban részesült.

Beállítási lehetőségek / teljesítményjellemzők

Kérjük, vegye figyelembe:

A gyermekülésbe integrált 5 pontos biztonsági öv csak az ECE I. csoportban (18 kg-ig) való használatra alkalmas. Ennek előfeltétele, hogy a gyermekülés korábban a járműben található 3 pontos biztonsági övvel legyen rögzítve.

A RECARO Sport HERO Reha gyermekülés sikeresen teljesítette a Dekra (Drezda) által az ECE R 44/04 követelményei alapján végzett terhelési tesztet. A RECARO Sport HERO Reha tehát "S" különleges követelményekhez jóváhagyott utasbiztonsági rendszer.

A II-III. ECE-csoport (18-36 kg) esetében:

Ez a vizsgálat megerősítette, hogy az 5 pontos öv 18 kg testsúly feletti gyermekek esetében kiegészítő pozicionáló övként használható. Ebben az esetben MINDIG rögzítse gyermekét a 3 pontos biztonsági övvel a járműben, és kövesse a helyes beszerelésre vonatkozó utasításokat az eredeti RECARO beszerelési és használati útmutató szerint.

A gyermekülésbe integrált 5 pontos biztonsági öv NEM releváns a biztonság szempontjából. Ebben az esetben a gyermeket a jármű 3 pontos biztonsági öve rögzíti; az 5 pontos öv csak a 18-36 kg testtömegű gyermekek kiegészítő támogatására szolgáló pozicionáló övként szolgál.

Annak érdekében, hogy a RECARO Sport HERO Reha-t gyermeke a lehető leghosszabb ideig használhassa, az 5 pontos övrendszer a terelőcsővel együtt eltávolítható. Kérjük, kövesse az eredeti RECARO telepítési és használati útmutatóban található utasításokat. Ha az 5 pontos pozicionáló övet magasabb gyermekek esetében is használni kell, javasoljuk az övhosszabbító övünket.

5 pontos biztonsági öv

Az öv használatával kapcsolatos további információkat az üléshez mellékelt RECARO használati utasításban talál.

Az öv hosszának megváltoztatása:

Emelje meg kissé az üléspárnát, és a tépőzárral oldja ki a szövetszárnyat. Most látni fogja az üléskaagylóba ágyazott központi övbeállítót. Az öv hosszának módosításához nyomja le a kart, és állítsa be az övet a lefelé lógó övpántra húzva (rövidítés) vagy mindkét öv előre húzásával (hosszabbítás).

3. ábra: A szíj hosszának megváltoztatása

Övrögzítő:

A nyitáshoz nyomja meg a piros mélyedést a rögzítőben. Ezután válassza szét a két felső hevedertartót. Az öv lezárásához ismét hozza össze a két felső övtartót, illeszse be őket a csat felső részébe, és nyomja össze, amíg hallható "kattanással" be nem kapcsolódik.

4. ábra: Az övcsat kinyitása ("kattanás")

Fejpárna

Húzza a párnák huzatát a lehető legszorosabban a fejtámla oldalsó részeire, és rögzítse őket a tetején lévő csavarokhoz.

5. ábra: A fejtámasz ráhúzása az oldalsó részre / 6. ábra: Rögzítés a csavarra

Thorax pelotte párna

A mellkaspárna rögzítéséhez helyezze lazán az ülésbe, majd vezesse a két tépőzárás pánatot a hátpárna mögé. Tépőzárral rögzítse a hevedereket a kárpit mögött.

7. ábra: Az ülésen való elhelyezés / 8. ábra: Tépőzárás rögzítés

Ülés oldalsó párna

A RECARO Sport HERO Reha ülészsökkentővel van felszerelve. Az ülés oldalsó párnái ehhez az ülészsűkítőhöz vannak rögzítve. Ehhez húzza át az ülés oldalsó párnáit az ülészsűkítő oldalsó részein. Ezután rögzítse az ülés oldalsó pelotte párnáit az ülés zsűkítőjének külső oldalára.

9. ábra: Az ülés oldalsó pelotte párnájának áthúzása az ülészsűkítőn / 10. ábra: Tépőzárás rögzítés

A következő beállítási lehetőségeket/teljesítményjellemzőket lásd a külön RECARO Sport HERO használati utasításban.

Ülés és háttámla 4 irányban állítható magasságú fejtámlával

állítható magasságú vállheveder HERO hevederpárnázási rendszerrel, beleértve a hevederpajzs párnázását (kicsi) extra széles, oldalsó energiaelnyelők (ASP)

fogantyú

állítható pihenőhelyzet

levegőtő fedelek

Tartozékok

Megjegyzés: Az összeszereléssel kapcsolatos információkat a megfelelő használati utasításban találja, amelyet közvetlenül a tartozékokhoz mellékelnek. Ha a használati utasítás hiányzik, letöltheti a www.thomashilfen.de oldalról. A tartozékok felszerelése/szerelése szabványos szerszámokkal történik.

Adapterlemez (11. ábra)

Az adapterlemez előfeltétele a többi tartozék használatának. Ez a rehabilitációs autósülés elejére van rögzítve.

Rögzítés előtt tisztítsa meg a műanyag felületet az ülés alján a kereskedelemben kapható szerekkel (pl. vízzel és mosogatószerrel), amíg teljesen zsírintes nem lesz.

Most vegye le a tépőzáras csíkokat (gyapjú) az adapterlemezeiről, és rögzítse őket az ülés alá. A tépőzáras csíkok (kam-pók) az adapterlemezen maradnak.

12. ábra: A tépőzáras szalag rögzítése az üléshez

Most helyezze az ülést 90°-os szögben az adapter elejére (az adapter fogantyúja előrefelé mutat), és döntse az ülést az adapterlemezre úgy, hogy az ülés felülete tépőzáras legyen.

13. ábra: Helyezze az ülést az adapterre.

Forgótányér adapterrel (14. ábra)

A forgatható funkcióval a rehab autósülés a jármű ajtaja felé fordítható. Az ápolók számára megkönnyíti a felhasználó áthelyezését és az ülés 5 pontos biztonsági övének elérését. A felhasználónak könnyebb önállóan be- és kiszállni a kocsiból. Ugyanakkor a rehab autósülés elején lévő adapterhez más tartozékok is csatlakoztathatók.

Ülésrögzítő adapter (15. ábra)

A Seatfix adapterrel az ISOFIX használható a járműben a rehab autósülés stabilitásának növelése érdekében. A kiegészítő stabilizációra különösen akkor van szükség, ha a forgó funkciót (és/vagy a dőlés funkciót) is használják. A Seatfix adapter az üres ülést is rögzíti a járműben.

Stabilizáló konzol (16. ábra)

A stabilizáló rúd a rehabilitációs autósülés háttámlájához van rögzítve, és az ülésfelület és a járműülés háttámlája közötti részbe van benyomva. Alkalmas, ha az ISOFIX nem használható. A kiegészítő stabilizációra különösen akkor van szükség, ha a forgó funkciót (és/vagy a dőlés funkciót) is használják.

Támasztóláb (17. ábra)

A támasztóláb stabilizálja a rehabilitációs autósülést. A kiegészítő stabilizációra különösen akkor van szükség, ha a forgó funkciót (és/vagy a dőlés funkciót) is használják.

Lábtartó (18. ábra)

A lábtartó segítségével a felhasználó stabilan ül a rehabilitációs autósülésben, mert a lábát szilárdan meg tudja támasztani. Az ülésből a jármű padlójára való kicsúszás megakadályozható. A lábtartó lehajtható, hogy megkönnyítse a be- és kiszállást. A lábtartó használható az ülésbe való önálló be- és kiszállás gyakorlásához.

Nyomja a lábtartó csöveit az első adapterbe. Ehhez nyomja be a lábtartón lévő rögzítő rugót. A lábtartót mindig rögzítse a lábtartóadapter bal oldali csövén lévő csillagcsavarral a kiesés ellen. A lábtartócsöveken található több furat lehetővé teszi a jármű ülésének mélységéhez való igazodást.

19. ábra: A támasz beillesztése

A lábtartónak a jármű padlóján való stabilizálásához állítsa be vagy ki a tartó rudak magasságát úgy, hogy a rudak érintkezzenek a jármű padlójával. Ezután rögzítse a tartórudakat a csillaggombokkal, hogy megakadályozza azok véletlen kicsavarodását. Ehhez fordítsa felfelé a csillaggomb csavarjait, amennyire csak lehetséges, és húzza meg őket erősen.

20. ábra: Magasságállító jármű

Alsó lábszár hossza:

Az alsó lábszár hossza a lábtartó magasságállításával állítható. Ehhez lazítsa meg a két külső imbuszcsavart, majd húzza meg őket újra megfelelően.

Lábszög:

Lazítsa meg a lábtartó alján jobbra és balra található négy csavart, hogy a síneken keresztül beállítsa a kívánt lábszöveget. Ezután húzza meg ismét a csavarokat.

A lábtartó emelőblokkja (21. ábra)

A lábtartó emelőblokkja csökkenti a szükséges alsó lábszárhosszat, ha a felhasználó lábai nem elég hosszúak.

Ülőke, alsó (22. ábra)

Az ülésdőlés elérése érdekében az ülésdőlés eléréséhez az ülés ékét (alul) a jármű ülésén, a rehabilitációs autósülés alatt helyezik el. Az ülés hátrafelé dőlése a kis testfeszültségű és/vagy gyenge fejkontrollal rendelkező gyermekek esetében használható.

Az ülőlapot középen, az autósülés alatt helyezik el. A magas perem elöl van, hogy a gyermek számára optimális pihenőhelyzetet biztosítson.

Vigyázat: Az ülőlap és a forgótányér együttes használata jelentősen korlátozza az ülőlap működését. Ezért nem javasoljuk, hogy egyszerre használja az ülőlapot és a forgólemezt.

23. ábra: Az ülés felhelyezése az ülőlapra / 24. ábra: Végső helyzet

A hónaljtámasz (25. ábra)

Az alkartámasz a felhasználó hasa előtt helyezkedik el. A felhasználónak stabilitást és biztonságot ad, a felhasználó jobban támaszkodhat rá, és jobban tarthatja magát. Az övcsat vizuális akadályként eltereli a figyelmet a csat levételéről, és a felhasználó a felületet tevékenységekre használhatja.

Először szerelje össze a hónaljtámasz oldalsó részeit az ülés kerek sarkaira húzva. A hosszabb anyagú oldalnak minden esetben kifelé kell mutatnia. Az oldalsó részek borításán található nyílásokon keresztül rögzítse a szövetet az ülésállító kerekhez. A lefelé kilógó szövetet most az üléspárna alá dugja.

26. ábra: Az oldalsó részek rögzítése

Ezután rögzítse a hónaljtartót az oldalsó részek tépőzáras csíkjaihoz. Ezután vezesse a hevedert kívülről az ülés háttámlája mögött oldalirányban újra előre, és rögzítse a hónaljtámla tépőzáras (gyapjú) részéhez.

27. ábra: A hónaljtámasz felszerelése

Megjegyzés: A hónaljtámasz használata esetén az övvédő párnát helytakarékosági okokból el kell távolítani.

Biztonsági övvédő párna (28. ábra)

Az övvédő párnát a rehabilitációs autósülés 5 pontos övének övcsatja alá kell rögzíteni. Megvédi a használót az övcsat kellemetlen nyomásától a hasra, és tompítja a mozgást és a nyomást az ágyéktájékon.

Puha övpárna (29. ábra)

A hevederek puha párnái védik a felhasználót a váll területén a fájdalmas nyomástól és a hevederek bevágásától.

Övhosszabbító (30. ábra)

Nagyobb felhasználók esetében szükség lehet a hámhosszabbítóra, hogy a hámm még mindig illeszkedjen. (Csak a II+III. ECE-csoportba tartozó, 18-36 kg-os súlycsoportok esetében.)

Menekülésgátló mellény (31. ábra)

A menekülésgátló mellény megakadályozza, hogy a gyermek kibújjon az autó biztonsági övéből. Az öv és a gyermek közötti veszélyes rések el vannak takarva, amelyeket a gyermek egyébként arra használna, hogy lecsúsztassa az övet a válláról.

Autósülésvédő háttámlával (32. ábra)

Az autósülésvédő a gyermekülés alatt fekszik a jármű ülésén és háttámláján. Megvédi az autósülés ülését és háttámláját a sérülésektől. Az elülső zsebekben kisebb tárgyak tárolhatók.

Műszaki adatok

RECARO Sport HERO Reha

Ülésmélység (ülőpárnákkal)	31 cm (26 cm)
Ülésszélesség elöl (ülőpárnákkal)	31 cm (21 cm)
(ülésszűkítővel)	27 cm
Ülésszélesség hátul (ülőpárnákkal)	29 cm (20 cm)
(ülésszűkítővel)	25 cm
Hátmagasság (ülés)	53 - 73 cm
Vállmagasság (övvezető)	23 - 42 cm
Teljes méretek (szélesség x magasság x mélység)	54 x 55 (max. 81) x 52 cm
Ülés súlya	kb. 8 kg
Felhasználói súly	9 - 36 kg

Anyagra vonatkozó előírások

Kárpit: Poliészter - Trevira CS / 100% poliészter - RECARO Prime.

A felhasznált kárpitanyag "égésgátló", a DIN EN 1021-1 és a DIN EN 1021-2 szabvány szerint tesztelve.

Az anyagok és szerelvények gyulladással szembeni ellenállásának mértékét a szabványoknak megfelelően megvizsgálták és ártalmatlannak minősítették.

A 100% Trevira CS szövet / RECARO Prime kiváló minőségű, légáteresztő anyag, és pozitívan tesztelték a biológiai kompatibilitást. (DIN EN ISO 10993-5 és 10993-10 Trevira CS fekete)

Tisztítás, karbantartás és javítás

Tisztítási, ápolási és fertőtlenítési utasítások a mindennapi életben

Párna

A párnák néhány lépésben könnyen eltávolíthatók, és külön moshatók. Szövetborításból és szükség esetén habbetétekből állnak. Ellenőrizze, hogy a párna cipzárral vagy tépőzárral van-e ellátva. Ha igen, nyissa ki a párnát, és ha szükséges, mosás előtt távolítsa el a habbetétet. Kérjük, vegye figyelembe a következő ápolási utasításokat is.

RECARO Prime:



Trevira CS:



Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy még a kiváló minőségű szövetek is kifakulhatnak az állandó és intenzív napsugárzás vagy a gyakori mosás miatt.

Tépőzárás rögzítők

A tépőzárás rögzítők működőképességének megőrzése érdekében a tépőzárás pántokat időnként kefével kefélje át. Mosáskor mindig zárja vagy takarja le a tépőzárás pántokat.

Műanyag alkatrészek

A termék műanyag részei tisztíthatók és fertőtleníthetők a kereskedelemben kapható szappanokkal (semleges szappan).

Fém alkatrészek

A termék fém alkatrészei tisztíthatók és fertőtleníthetők a kereskedelemben kapható szappanokkal (semleges szappan).

Fertőtlenítés

Fertőtlenítés előtt tisztítsa meg a kárpitot, a műanyag és a fém alkatrészeket.

A termék minden műanyag és fém részét fertőtlenítőszerrel nedvesen törölje át. Csak vízbázisú szereket szabad használni. Fertőtlenítéskor kövesse a megfelelő gyártó alkalmazási utasításait.

Karbantartás és ellenőrzés a szakiparban

Előkészítés

A termékhez mellékelni kell a használati utasítást. Ha nincsenek, kérje a gyártótól. Ismerkedjen meg a termék funkcióival. Ha nem ismeri a terméket, a tesztelés előtt olvassa el a használati utasítást. A teszt megkezdése előtt tisztítsa meg a terméket. Tartsa be a használati utasításban szereplő ápolási utasításokat és a termékspecifikus vizsgálati utasításokat. Ha további kérdése van, forduljon képzett szaktanácsadóhoz vagy közvetlenül a Thomashilfenhez.

A termék szervizelését és javítását csak szakképzett személyzet végezheti. A termék felhasználójának gondoskodnia kell arról, hogy az előírt ellenőrzéseket/karbantartást rendszeresen és időben elvégezzék. Ha sérülés észlelhető, a felhasználónak aktívan értesítenie kell a felhasználót, és a sérülést azonnal szakszeméllyel kell kijavíttatnia.

Karbantartási terv - éves ellenőrzés

	Terület	Funkció	Kár	Cserélje ki a címet.
1	Műanyag test	👁	👁	
2	Beállítási lehetőségek	👁	👁	
3	Kárpitozás		👁	
4	Szíjak	👁	👁	
5	Műanyag alkatrészek	👁	👁	
6	Csavarok és csavarok	👁	👁	
7	Jelölések		👁	
Tartozékok				
8	Párna		👁	
9	Szíjak	👁	👁	
10	Beállítási lehetőségek	👁	👁	
11	Műanyag alkatrészek	👁	👁	
12	Fém alkatrészek	👁	👁	
13	Csavarok és csavarok	👁	👁	
végzi:			am:	
👁 = Ellenőrzés 🔄 = Újrafelhasználás ✓ = Befejezett vizsga				

Pótalkatrészek

A javításhoz csak eredeti pótalkatrészek használhatók. A pótalkatrészek listáját az interneten a www.thomashilfen.de oldalon találja. A megfelelő pótalkatrészek beszerzéséhez vagy az esetleges műszaki visszahívásokhoz mindig szükségünk van a sorozatszámra / UDI-PI-re és a pontos UDI-DI-re.

A pótalkatrészek szétszerelését/összeszerelését csak szakképzett személyzet végezheti! Ha visszaküldésre van szükség, kérjük, gondoskodjon a termék biztonságos csomagolásáról a szállításhoz.

Tárolás

Tárolja a terméket biztonságos helyen, amikor nem használja. A tárolás során ne helyezzen vagy tegyen nehéz tárgyakat a termékre. Védje a terméket az időjárás hatásaitól, például esőtől, erős napsütéstől és fagytól. Ha a termék nedves, törölje szárazra a fém- és műanyag részeket, és szárítsa meg a párnákat, mielőtt a terméket tárolja.

Eltávolítás

Ha a termék állapota miatt már nem használható, vagy elérte élettartama végét, a helyileg illetékes hulladékkezelő vállalatnál újrahasznosítható. Kérjük, tartsa be az újrahasznosításra és ártalmatlanításra vonatkozó helyi előírásokat.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék, a változatok és a tartozékok, ha vannak, megfelelnek az alapvető előírásoknak. Az aktuális EU-megfelelőségi nyilatkozat letölthető az internetről a www.thomashilfen.de címen, vagy közvetlenül tőlünk kérhető.

Garancia

A Thomashilfen erre a termékre két év törvényes garanciát vállal. Az időszak az áru átadásának időpontjában kezdődik. A garancia minden olyan igényre kiterjed, amely a funkciót érinti. A nem rendeltetésszerű használat (pl. túlterhelés), valamint a természetes elhasználódás okozta károk kizárásra kerülnek.

Hasznos élettartam

A termék hasznos élettartama a gyártó utasításai szerinti megfelelő és rendszeres karbantartás mellett akár 6 év is lehet. A termék ezen időszakon túl is használható, ha biztonságos és műszakilag kifogástalan állapotban van.

Az elméleti élettartam nem garantált élettartam. Ez a használat intenzitásától függ, és mindig a szakma eseti vizsgálatának tárgyát képezi.

A hasznos élettartam a meghatározott időszak előtt véget ér, amikor a felhasználó elérte a termék biztonságos használatához szükséges maximális testsúlyt vagy testmagasságot.

A használati idő nem vonatkozik a kopó alkatrészekre, például a párnákra, huzatokra stb.

Élethosszig tartó

A termék élettartama 8 év, ha az élettartamban meghatározott feltételek teljesülnek. Az élettartam a hasznos élettartamból és a tárolási időkből tevődik össze.

Újrafelhasználás

A termék nem alkalmas újrafelhasználásra. A gyermekülések funkcionális alkalmasságát nem lehet biztonsággal meghatározni a felhasználó elméleti változása esetén. A terméken láthatatlan sérülések keletkezhetnek, amelyek kizárják a további biztonságos használatot. A használt gyermekülések értékesítését és vásárlását ezért a gyártó kizárja.

Forgalmazó



Supreme Medical Bt

Office: Kőrösy József utca 15. 3/16

1117 Budapest

Showroom:

Buda: 1027 Budapest, Királyfürdő u.4.

Pest: 1089 Bp, Bláthy Ottó u.1. 10-es

épület

Telefon: +36 20 5750972

Telefon: +36 30 3363930

info@supremedical.hu

www.supremedical.hu









Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de