

RECARO Sport HERO Reha

FI Käyttöohjeilla – Kuntoutusturvaistuin RECARO Sport HERO Reha

CE


Thomashilfen





1



2



3



4



5



6




7



8



9

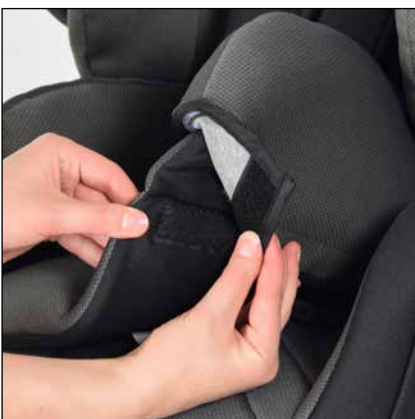

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32

Hyvä asiakas,

Olet päättänyt hankkia tuotteemme ja haluaisimme kiittää sinua osoittamastasi luottamuksesta. Lue ensin tämä käyttöohje, jotta uuden tuotteesi käyttäminen olisi sinulle itsellesi ja sen käyttäjälle turvallista, käytännöllistä ja mukavaa. Siten voit välttää vaurioita ja käyttövirheitä. Huolehdi siitä, että tämä käyttöohje säilyy tuotteen läheisyydessä ja että se on jokaisen käyttäjän käytettävissä.

Tämä käyttöohje täydentää alkuperäistä RECARO-käyttöohjetta. Kuntoutusturvaistuimen muuttaminen aiheuttaa joiltakin osin muutoksia autoistuimen käyttöön. Muutokset on kuvattu tässä täydentävässä käyttöohjeessa.

Jos sinulla on kysymyksiä, käänny vastaavan erikoisliikkeen puoleen tai ota yhteyttä suoraan meihin.

**Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG**

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde / Saksa

Puhelin: +49 (0) 4761 8860



www.thomashilfen.de

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Tämä saattaa aiheuttaa eroavaisuuksia tuotteesi ja medioissa esitettyjen kuvausten välillä.

Sisällysluettelo

Kuvat	3
Johdanto / Valmistajalla	6
Merkinnät / Mallin tunnistetiedot	7
Yleiset ohjeet / Turvaohjeet	8
Käyttötarkoitus ja käyttöpaikat	9
– Suunniteltu tarkoitus / Käyttöalueet	9
– Käyttötarkoitus / Potilaskohderyhmä, tarkoitetut käyttäjät	9
– Käyttöön liittyvät riskit ja käytön esteet	9
Tuotteen kuvaus.	9
– Toimituslaajuus / Perusvarustus	9
– Käyttöönotto.	9
– Käyttökoulutus	9
Säätömahdollisuudet / Suoritusarvot	10
– Lisätarvikkeet	11
– Tekniset tiedot.	13
– Materiaalitiedot.	13
Puhdistaminen, kunnossapito ja korjaaminen	14
– Puhdistaminen, hoito-ohjeet ja päivittäinen desinfiointi	14
– Erikoisliikkeen suorittama huolto ja tarkastus / Huoltoaikataulu	15
– Varaosat	15
– Varastointi / Hävittäminen.	15
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	15
Takuu	16
Käyttöikä / Kestoikä	16
Uudelleenkäyttö	16
Jakelijalla	16

Merkinnät / Mallin tunnistetiedot

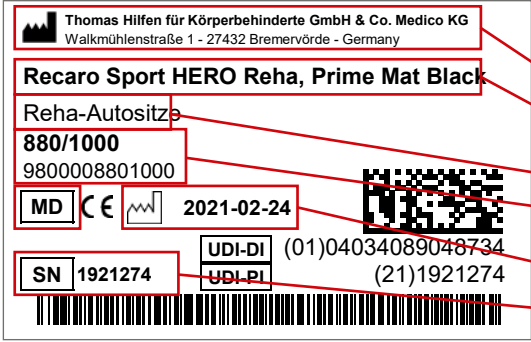Merkintä	Merkitys
	<p>Viivakoodimerkki</p> <p>Sijainti tuotteessa (Kuva 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valmistajalla - Tuotteen nimi - Tuoteryhmä - Tuotenumero lyhyt / pitkä - MD = Lääkinnällisellä laitteella - Valmistuspäivämäärä - Sarjanumero
	<p>Tyypikilpi</p> <p>Sijainti tuotteessa (Kuva 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valmistajalla - Tuotteen nimi - Käyttäjän paino - CE-merkinnällä - Noudata käyttöohjetta

Ohjeet

Yleiset ohjeet

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa tai pyydä, että se luetaan sinulle, jos sinulla on lukemisvaikeuksia. Jos käyttöohje puuttuu, voit ladata sen osoitteesta www.thomashilfen.de. Digitaalisen käyttöohjeen sisältö voidaan esittää suurennettuna.
- Tarkasta, että pakkauksessa ei ole kuljetusvaurioita ja että tuote on virheettömässä kunnossa.
- Tuotteeseen saa tehdä muutoksia vain tarkoitettujen säätömahdollisuuksien osalta.
- Omaiset ja hoitajat voivat huolehtia päivittäisestä puhdistuksesta ja kunnossapidosta. Erikoisliike vastaa huollosta ja tarkastuksesta.
- Jossakin maissa mukana on oltava lääkärintodistus.
- Kuntoutusturvaistuinta voidaan käyttää myös takaistuimella tai etumatkustajan istuimella. Valittu ajoneuvoistuin TÄY-TYY asentaa menosuuntaan.
- Tuotteen kaikki merkinnät on säilytettävä eikä niitä saa muokata.

Turvaohjeet

- Tarkasta vähintään kolmen kuukauden välein, että tuotteen asetukset ovat vielä sopivat käyttäjän sen hetkisille vartalon mitoille. Anna tarvittaessa erikoisliikkeen tai apuneuvoteknikon sovittaa asetukset.
- Tarkasta säännöllisesti (viikoittain) tuotteen säätömahdollisuuksien toiminta.
- Älä ylikuormita tuotetta. Huomioi käyttäjän enimmäispaino tai enimmäiskuormitus (katso tekniset tiedot).
- Älä jätä käyttäjää koskaan yksin tuotteen kanssa ilman valvontaa.
- Tuotetta saa käyttää vain yksi käyttäjä kerrallaan. Tuotteeseen tai sen päälle ei saa asettaa lisähenkilöitä.
- Kaikkien käyttäjien on saatava opastus tuotteen käytöstä. Siten käyttäjä voidaan vapauttaa tuotteesta nopeasti hätätapauksessa.
- Älä jätä käyttäjää yksin tuotteeseen asettumisen tai siitä poistumisen aikana. Jalkatuen liiallinen kuormittaminen aiheuttaa liukastumis- tai kallistumisvaaran.
- Käyttäjä on aina asetettava paikalleen 5-pistevyöllä (perusvaruste). Istuin ja käyttäjä on kiinnitettävä ajoneuvon 3-pisteturvavyöllä.
- Suora auringon säteily ja helle voivat aiheuttaa tuotteen pintalämpötilojen nousemisen korkeiksi. Silloin kosketus voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä tuotetta vasta sen jäähtytyä riittävästi. Pidä tuotetta yleensä suoralta auringon säteilyltä suojattuna.
- Huomioi ajoneuvon käyttöohjeessa mainitut turvallisuusmääräykset käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi.
- Käyttöohjeet on säilytettävä tuotteen lähellä.
- Jos odotusten vastaisesti ilmenee jokin merkittävä tuotteeseen liittyvä tapahtuma, ilmoittakaa siitä välittömästi meille ja asianmukaisille viranomaisille.

Käyttötarkoitus ja käyttöpaikat

Suunniteltu tarkoitus / käyttöalueet

Kuntoutusturvaistuin RECARO Sport HERO Reha on luokkaan 1 kuuluva lääkinällinen laite.

Se on suunniteltu liikuntarajoitteisten kuljetukseen ja lasten turvallisen istuma-asennon ylläpitämiseen autoissa. Istuin kiinnitetään aina auton omalla kolmipisteturvavyöllä. Kuntoutusturvaistuimen viisipisteturvavyö auttaa asettamaan lapsen oikeaan asentoon ja tukemaan suoraa istuma-asentoa. Lisäksi kuntoutusturvaistuimessa on integroitu istumakulman säätö.

Kuntoutusturvaistuin antaa lisätukea turvalliselle istumiselle, vakauttaa pään hallintaa ja tarjoaa vakaan istuimen lantion alueelle sekä tuen jalka-alueelle. Laitteessa on lisäksi kattavat laitteet yksilöllistä mukauttamista varten.

Muunlaista tai tästä poikkeavaa käyttöä pidetään ei suunniteltuna tarkoituksena.

Käyttötarkoitus / potilaskohderyhmä, tarkoitettut käyttäjät

Kuntoutusturvaistuinta käytetään lapsille, joilla on rakenteellisia ja/tai toiminnallisia rajoituksia tai virheasentoja pään ja vartalon alueella. Se huolehtii vakaasta ja fysiologisesta asettamisesta oikeaan asentoon, mikä ei ole tavanomaisissa lasten turvaistuimissa riittävää vakaan istuma-asennon ylläpitämiseen autossa.

Käyttöön liittyvät riskit ja käytön esteet

Käyttöön liittyviltä riskeiltä vältytään, kun tuotetta käytetään asianmukaisesti. Käytön esteitä ei ole tiedossa.

Tuotteen kuvaus

Toimituslaajuus

Tuotteesi toimitetaan esiasennettuna, jos siinä on perusvarustus. Tuotteen mukana mahdollisesti tilatut lisätarvikkeet sisältyvät toimitukseen ja ne on asennettava jälkikäteen. Tuotteen mukana on käyttöohje.

Perusvarustus

Istuin ja selkänöja 4-asentoisella korkeussäädettävällä pääntuella; integroidut 5-pistevaljaat keskisäätimellä; korkeussäädettävät olkavaljaat HERO-valjaiden pehmustejärjestelmällä, sis. valjaiden suojakilven pehmusteen (pieni); erittäin leveät sivuttaiset energianvaimentimet (ASP); kantokahva; säädettävä lepoasento; irrotettavat pään-, rintakehän- ja istuimen sivutyyny; irrotettavat suojukset

Käyttöönotto

- Poista kuljetusvarmistimet ja pakkaukset.
- Nielemis- tai tukehtumisvaaran välttämiseksi huolehdi siitä, että pakkausmateriaali ja pienet osat eivät päädy lasten käsiin.

Käyttökoulutus

Valtuutettu ammattihenkilöstö opastaa käyttöohjeen avulla käyttäjää tämän apuvälineen käyttämisessä.

Teknisen neuvonantajan tulisi asentaa istuin ajoneuvoon yhdessä käyttäjän kanssa ja säätää se käyttäjän nykyisten mittojen mukaiseksi.

On varmistettava, että käyttäjä saa opastuksen tuotteen kaikista toiminnoista sekä asentamisesta ajoneuvoon ja poistamisesta ajoneuvosta.

Säättömahdollisuudet / Suoritusarvot

Huom!

Turvaistuimeen integroitu 5-pisteturvavyö on tarkoitettu käytettäväksi ECE ryhmä I:ssä. Edellytyksenä on, että turvaistuin on etukäteen kiinnitetty paikoilleen ajoneuvon omilla 3-pistevoilla.

Lasten RECARO Sport HERO Reha -turvaistuin noudattaa ECE R 44/04 -määräyksiä ja on menestyksekkäästi läpäissyt Dekran (Dresden) ylikuormitustestin. RECARO Sport HERO Reha on siksi hyväksytty tukiväline (erikoisvaatimukset "S").

ECE ryhmä II-III (18–36 kg):

Tämän testin puitteissa vahvistettiin, että 5-pistevyötä voidaan käyttää yli 18 kg painavien lasten kiinnityksen tukivyönä. Varmista tällöin lapsesi AINA ajoneuvossa olevalla 3-pisteturvavyöllä ja noudata alkuperäisessä RECARO-asennus- ja käyttöohjeessa annettuja ohjeita istuimen oikeasta paikalleen asentamisesta.

Lastenistuimen integroitu turvavyö EI OLE turvallisuudelle välttämätön. Lapsi pidetään tässä tapauksessa istuimessaan ajoneuvossa olevalla 3-pistevoilla, 5-pistevyö on tarkoitettu vain ylimääräiseksi tukivyöksi lapsille, joiden paino on 18 ja 36 kg:n välillä.

Jotta lapsesi voi käyttää RECARO Sport HERO Reha -istuinta mahdollisimman pitkään, voidaan 5-pistevyöjärjestelmä sekä ohjausputki ottaa pois. Noudata tätä tehtäessä alkuperäisessä RECARO-asennus- ja käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Jos suuremmatkin lapset halutaan varmistaa istuimeen 5-pistetukivyön avulla, suosittelemme käyttämään vyönjatkettamme.

5-pistevoilla

Lisätietoja turvavyön käytöstä on istuimen mukana olevassa RECARO-käyttöohjeessa.

Vyön pituuden muuttaminen:

Nosta istuimen sivupehmustetta kevyesti ylöspäin ja irrota vetoketjullinen kangassuojus. Tällöin istuimen turvavyön keskussäätöosa paljastuu. Kun haluat lyhentää vyön pituutta, paina vipua alaspäin ja säädä vyötä vetämällä alapuolella roikkuvaa vyön osaa alaspäin. Vyön pidentämiseksi vedä molempia ylhäällä olevia vöitä eteenpäin.

Kuva 3: Vyön pituuden muuttaminen

Vyölukko:

Avataksesi vyön paina lukon punaista, syvennettyä kohtaa. Sen jälkeen erota molemmat, ylemmät vyökiinnittimet toisistaan. Vyö suljetaan niin, että molemmat ylemmät vyökiinnittimet liitetään jälleen yhteen ja työnnetään yhtä aikaa ylhäällä olevaan lukkoon samalla painaen osia yhteen, kunnes vyö lokahtaa kuuluvasti (klik-ääni) kiinni.

Kuva 4: Vyön lukituksen avaaminen ("klik")

Päätuki

Vedä tukien suojukset mahdollisimman kireästi päänojan sivuosien yli ja kiinnitä suojat ylhäältä ruuveihin.

Kuva 5: Päätuon vetäminen sivuosan ylitse / Kuva 6: Kiinnitys ruuveilla

Rintakehän tuki

Rintakehän tuen kiinnittämiseksi aseta tuki istuimelle ja sen jälkeen vie molemmat tarranauhalliset hihnat selkäpehmusteen taakse. Kiinnitä tarranauhat yhteen pehmusteen takana.

Kuva 7: Asettaminen istuimeen / Kuva 8: Tarrakiinnitys

Istuinosan sivutuet

RECARO Sport HERO Reha -istuin on varustettu istuimen pienentimellä. Tähän istuimen pienentimeen kiinnitetään istuimen sivutukipehmusteet. Vedä tätä varten istuimen sivutukipehmusteet istuimen pienentimen sivuosien päälle. Kiinnitä istuimen sivutukipehmusteet sitten tarranauhakiinnityksellä istuimen pienentimen ulkosivulle.

Kuva 9: Vedä istuimen sivutukipehmusteet istuimen pienentimen päälle / Kuva 10: Tarranauhakiinnitys

Seuraavien säätömahdollisuuksien / suorituskykyominaisuuksien osalta katso erilliset RECARO Sport HERO -käyttöohjeet.

Istuin ja selkänoja 4-suuntaisesti korkeussäädettävällä pääntuella varustettuna

Korkeussäädettävä olkavyö, jossa HERO-vyötyynyjärjestelmä, sis. vyönsuojatyynyn (pieni).

Erittäin leveät, sivuttaiset energianvaimentimet (ASP).

Kantokahva

Säädettävä lepoasento

Irrotettavat kannet

Lisätarvikkeet

Ohje: Asentamista koskevia tietoja on käyttöohjeessa, joka toimitetaan lisätarvikkeiden mukana. Jos käyttöohje puuttuu, voit ladata sen osoitteesta www.thomashilfen.de. Lisätarvikkeiden asentamiseen/irrottamiseen käytetään tavanomaisia työkaluja.

Sovitinlevy (Kuva 11)

Sovitinlevy on edellytyksenä muiden lisävarusteiden käytölle. Se kiinnitetään turvaistuimen istuinpinnan etupuolelle.

Puhdista istuimen alapuolen muoviosat ennen kiinnittämistä tavallisella seoksella (esim. vedellä ja pesuaineella) niin, että ne ovat täysin rasvattomat.

Irrota nyt tarranauhat (fleece) sovitinlevystä ja kiinnitä nämä istuimen alapuolelle. Tarranauhat (hakaset) pysyvät sovitinlevyssä.

Kuva 12: Istuimen tarranauhojen asettaminen

Aseta nyt istuin tiukasti 90 asteen kulmassa sovittimen etuosaan (sovittimen kädensija osoittaa eteenpäin) ja kallista istuin sovittimeen niin, että istuinpinta kiinnittyy tarroilla.

Kuva 13: Istuimen asettaminen sovittimeen

Kääntölevy sovittimella (Kuva 14)

Turvaistuin voidaan kääntää kääntötoiminnolla ajoneuvon oven suuntaan. Näin hoitajan on helpompi siirtää käyttäjää ja saavuttaa istuimen 5-pisteturvavyö. Käyttäjän on helpompi nousta autoon ja poistua siitä itsenäisesti. Turvaistuimen etupuolen sovittimeen voidaan samalla kiinnittää muita lisävarusteita.

Seatfix-sovitin (Kuva 15)

Seatfix-sovitin mahdollistaa ISOFIX:n käytön ajoneuvossa ja lisää siten turvaistuimen vakautta. Lisävakautta tarvitaan erityisesti käytettäessä myös kääntötoimintoa (ja/tai kallistustoimintoa). Seatfix-sovitin turvaa myös ajoneuvon tyhjän istuimen.

Vakautuskahva (Kuva 16)

Vakautuskahva kiinnitetään turvaistuimen takapuolelle ajoneuvon istuimen istuinpinnan ja selkänojan väliseen rakoön. Sitä voidaan käyttää, mikäli ISOFIX ei ole käytettävissä. Lisävakautta tarvitaan erityisesti käytettäessä myös kääntötoimintoa (ja/tai kallistustoimintoa).

Tukijalka (Kuva 17)

Tukijalka takaa turvaistuimen vakauden. Lisävakautta tarvitaan erityisesti käytettäessä myös kääntötoimintoa (ja/tai kallistustoimintoa).

Jalkatuki (Kuva 18)

Jalkatuen avulla käyttäjä istuu vakaasti turvaistuimella, koska hän voi tukea jalkansa tukevasti. Istuimesta liukuminen ajoneuvon lattialle estetään. Jalkatuki voidaan taittaa alas, mikä helpottaa sisään ja ulos nousemista. Jalkatuen avulla voi harjoitella itsenäistä istuimeen nousemista ja istuimelta poistumista.

Työnä jalkatuen putket edestä sovittimeen. Paina tätä varten jalkatuen lukitusjouset sisään. Varmista aina, ettei jalkatuki putoa pois, kiristämällä jalkatuen sovittimen vasemmassa putkessa oleva tähtikantaruuvi. Jalkatuen putkissa olevat useimmat reiät mahdollistavat sen säätämisen ajoneuvosi istuimen syvyyteen sopivaksi.

Kuva 19: Tukin asettaminen

Jalkatukien pysymiseksi vakaasti ajoneuvon lattiaa vasten sovita tukitankojen korkeus sisään- ja ulospäin kääntämällä niin, että tangot osuvat ajoneuvon lattiaan. Varmista sen jälkeen tukitangot kiristimellä, jotteivät ne vahingossa löysty. Käännä kiristintä mahdollisimman tiukasti ja mahdollisimman pitkälle ylöspäin.

Kuva 20: Korkeuden säätö ajoneuvon mukaisesti

Sääripituus:

Sääriosan pituutta säädetään säätämällä jalkatuen korkeutta. Löysää ensin molemmat ulkouraruuvit ja sen jälkeen kiristä ne jälleen riittävän tiukasti.

Jalkakulma:

Kun jalkatukien alapuolella vasemmalla ja oikealla olevat 4 ruuvia löysätään, voidaan asettaa haluttu jalkakulma kiskojen avulla. Tämän jälkeen ruuvit on jälleen kiristettävä.

Jalkatuen korotuslohko (Kuva 21)

Jalkatuen korotuslohko pienentää tarvittavaa sääripituutta, kun käyttäjän jalat eivät ole riittävän pitkät.

Istuinkiila, ala (Kuva 22)

Istuinkiila (ala) sijoitetaan ajoneuvon istuimen päälle turvaistuimen alapuolelle istuimen kallistusta varten. Istuinta kallistetaan taaksepäin lapsille, joiden kehon lihasjänteys on vähäisempi ja/tai pään hallinta heikompi.

Istuinkiila asetetaan turvaistuimen alle keskelle. Korkea reuna on edessä, jotta lapsi saa parhaimman mahdollisen lepoasennon.

Huom: Istuinkiilan käyttäminen yhdessä kääntölevyn kanssa heikentää huomattavasti näiden toimintaa. Emme siksi suosittele istuinkiilan ja kääntölevyn käyttämistä samanaikaisesti.

Kuva 23: Istuimen asettaminen istuinkiilaan / Kuva 24: Lopullinen asento

Pöytä (Kuva 25)

Pöytä kiinnitetään käyttäjän vatsan eteen. Se tarjoaa käyttäjälle vakautta ja turvaa, käyttäjä voi nojata siihen ja pysyä paremmin suorassa asennossa. Vyölukon näköesteenä se kääntää huomion pois vyön avaamisesta, ja käyttäjä voi käyttää pöydän pintaa eri aktiviteetteihin.

Asenna ensin pöydän sivuosat niin, että vedät ne istuimen pyöreiden kulmapisteiden ylle. Sivun, jonka kangas on pidempi, on osoitettava kulloinkin ulospäin. Kiinnitä kangas istuinsäätörenkasiin sivuosan kankaassa tätä varten olevien aukkojen avulla. Alapuolella jäävä kangas kiinnitetään istuinpehmusteen alapuolelle.

Kuva 26: Sivuosien kiinnittäminen

Kiinnitä lopuksi pöytä sivuosien tarranauhoihin. Ohjaa sitten vyö taas sivuttain eteen ulkopuolelle istuimen selkänojan taakse ja kiinnitä se pöydän tarranauhaan (fleece).

Kuva 27: Pöydän asettaminen

Tärkeää! Pöytää käytettäessä tilasyistä mahdollinen vyösuojapehmuste olisi irrotettava.

Turvavyöpehmuste (Kuva 28)

Turvavyöpehmuste kiinnitetään turvaistuimen 5-pisteturvavyön soljen alapuolelle. Se suojaa käyttäjää, ettei vyönsolki paina epämiellyttävästi vatsaa, ja pehmentää liikettä ja painetta haarojen alueella.

Pehmeä turvavyöpehmuste (Kuva 29)

Pehmeät turvavyöpehmusteet suojaavat käyttäjää, etteivät turvavyöt paina kivuliaasti hartioiden aluetta tai leikkaudu hartioiden alueelle.

Turvavyön jatko-osa (Kuva 30)

Turvavyön jatko-osa voi olla tarpeen isompikokoisille käyttäjille, jotta vyö pysyy sopivana. (Ainoastaan ECE-ryhmille II + III, 18 - 36 kg.)

Anti-Escape-liivi (Kuva 31)

Anti-Escape-liivi estää lapsen kieturtelemisen pois turvaistuimen turvavyöstä. Turvavyön ja lapsen välillä olevat vaaralliset aukot peittyvät, joita lapsi käyttäisi muuten turvavyön vetämiseen pois olkapäiden ympäriltä.

Istuinsuoja selkäosalla (Kuva 32)

Istuinsuoja sijaitsee ajoneuvon istuimen ja selkänojan päällä lastenistuimen alla. Se suojaa ajoneuvon istuimen istuinpintaa ja selkänojaa vaurioilta. Etutaskuihin voi laittaa pieniä esineitä.

Tekniset tiedot**RECARO Sport HERO Reha**

Istuimen syvyys (istuintyyntyjen kanssa)	31 cm (26 cm)
Istuimen leveys edessä (istuintyyntyjen kanssa) (istuimen pienennysosan kanssa)	31 cm (21 cm) 27 cm
Istuimen leveys takana (istuintyyntyjen kanssa) (istuimen pienennysosan kanssa)	29 cm (20 cm) 25 cm
Selkänojan korkeus (istuin)	53 - 73 cm
Olkapään korkeus (vyön ohjain)	23 - 42 cm
Kokonaismitat (L x K x S)	54 x 55 (max. 81) x 52 cm
Istuimen paino	noin. 8 kg
Käyttäjän paino	9 - 36 kg

Materiaalitiedot

Pehmuste: Polyesteri – Trevira CS / 100% Polyesteri - RECARO Prime

Käytetty pehmustemateriaali on vaikeasti syttyvää ja se on tarkastettu standardien DIN EN 1021-1 ja DIN EN 1021-2 mukaisesti.

Materiaalien ja osakokonaisuuksien syttymisen kestävyys on testattu standardin mukaisesti ja ne on todettu turvallisiksi.

100 % Trevira CS / RECARO Prime -kangas on korkealaatuinen, hengittävä kangas ja sen biologinen yhteensopivuus osoittautunut testeissä positiiviseksi. (DIN EN ISO 10993-5 ja 10993-10 Trevira CS, musta)


Puhdistaminen, kunnossapito ja korjaaminen

Puhdistaminen, hoito-ohjeet ja päivittäinen desinfiointi

Pehmuste

Pehmusteet voidaan irrottaa parilla käden liikkeellä ja ne voidaan pestä erikseen. Ne koostuvat kangaspäällysteestä ja mahdollisesti vaahtomuovisuusuksesta. Tarkasta, onko pehmusteessa vetoketju tai tarranauhakiinnitys. Jos sellainen on, avaa pehmuste ja irrota mahdollinen vaahtomuovisuus ennen pesua. Huomioi myös seuraavat hoito-ohjeet.

RECARO Prime:

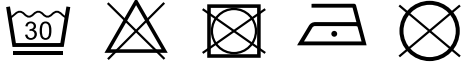

Trevira CS:



Huomautamme, että myös korkealaatuiset kankaat voivat haalistua, jos ne ovat pitkään alttiina voimakkaalle auringonsäteilylle tai jos niitä pestään usein.

Tarranauhakiinnitykset

Jotta tarranauhakiinnitykset pysyvät toimintakykyisinä, tarranauhat tulisi harjata silloin tällöin harjalla. Sulje tai peitä tarranauhat aina pesun ajaksi.

Muoviosat

Tuotteen muoviosat voidaan pestä tavallisilla saippuilla (neutraali saippua) ja desinfioida.

Metalliosat

Tuotteen metalliosat voidaan pestä tavallisilla saippuilla (neutraali saippua) ja desinfioida.

Desinfiointi

Puhdista pehmuste, muoviosat ja metalliosat ennen desinfiointia.

Pyyhi kaikki tuotteen muovi- ja metalliosat desinfiointiaineella kosteiksi. Ainoastaan vesipohjaisia aineita tulee käyttää. Desinfiointissa tulee noudattaa kyseisen valmistajan käyttöohjeita.

Erikoisliikkeen suorittama huolto ja tarkastus

Valmistelu

Käyttöohjeen on oltava tuotteen yhteydessä. Jos käyttöohjetta ei ole käytettävissä, pyydä se valmistajalta. Tutustu tuotteen toimintoihin. Jos et tunne tuotetta, lue käyttöohje ennen testaamista. Puhdista tuote ennen testaamisen aloittamista. Huomioi käyttöohjeessa olevat hoito-ohjeet ja tuotekohtaiset tarkastusohjeet. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen neuvonantajaan tai suoraan Thomasilfeniin.

Vain ammattihenkilöstö saa huoltaa ja korjata tuotetta. Tämän tuotteen käyttäjän on huolehdittava siitä, että vaaditut tarkastukset/huollot suoritetaan säännöllisesti ja oikeaan aikaan. Jos vaurioita havaitaan, käyttäjän on ilmoitettava niistä oma-aloitteisesti ja annettava ammattihenkilöstön korjata vauriot.

Huoltoaikataulu – Vuosittainen tarkastus

	Alue	Toiminto		Vaurio		Korvaa	
1	Muovirunko	👁		👁			
2	Säätömahdollisuudet	👁		👁			
3	Pehmuste			👁			
4	Hihnat	👁		👁			
5	Muoviosat	👁		👁			
6	Ruuvit ja mutterit	👁		👁			
7	Merkinnät			👁			
Lisätarvikkeet							
8	Pehmuste			👁			
9	Hihnat	👁		👁			
10	Säätömahdollisuudet	👁		👁			
11	Muoviosat	👁		👁			
12	Metalliosat	👁		👁			
13	Ruuvit ja mutterit	👁		👁			
suorittanut:				aika:			
👁 = Tarkastus ✓ = Tarkastus suoritettu							

Varaosat

Korjauksiin saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Varaosaluettelo löytyy internetistä osoitteesta www.thomashilfen.de. Oikean varaosan toimittamista varten tai mahdollisia teknisiä takaisinsoittoja varten edellytämme yleensä sarjanumeron/UDI-PI:n ja tarkan UDI-DI:n antamista.

Vain ammattihenkilöstö saa yleensä irrottaa/asentaa varaosia! Jos palautus on tarpeen, varmista, että tuote on pakattu turvallisesti kuljetusta varten.

Varastointi

Säilytä tuotetta turvallisessa paikassa silloin, kun sitä ei käytetä. Älä aseta tuotteen päälle raskaita esineitä varastoinnin aikana. Suojaa tuote sään vaikutuksilta, kuten sateelta, voimakkaalta auringon säteilyltä ja pakkaselta. Jos tuote on märkä, pyyhi metalli- ja muoviosat kuiviksi ja kuivaa pehmuste ennen tuotteen varastointia.

Hävittäminen

Jos tuote on sellaisessa kunnossa, että sitä ei voi enää käyttää tai jos sen kestoikä on lopussa, se voidaan kierrättää paikallisessa jätehuoltoyrityksessä. Ota tällöin huomioon paikallisesti voimassa olevat kierrätystä ja hävittämistä koskevat määräykset.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme yksinomaaisesti vastuullisena, että tämä tuote sekä sen versiot ja lisätarvikkeet täyttävät perusmääräysten vaatimukset. Voimassa oleva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata internetistä osoitteesta www.thomashilfen.de tai sen voi pyytää suoraan meiltä.

Takuu

Thomashilfen tarjoaa tälle tuotteelle kaksivuotisen lakisääteisen takuun. Määräaika alkaa hetkestä, jolloin tavara luovutetaan. Takuu käsittää kaikki vaatimukset, joilla on vaikutusta toimintaan. Poikkeuksena ovat vauriot, jotka ovat seurausta epäasianmukaisesta käytöstä (esim. ylikuormitus) sekä luonnollisesta kulumisesta.

Käyttöikä

Tuotteen käyttöikä on enintään 6 vuotta, mikäli sitä huolletaan asianmukaisesti ja säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tuotetta voidaan käyttää tätä ajanjaksoa pitempään, mikäli se on turvallisessa ja teknisesti virheettömässä kunnossa.

Teoreettinen käyttöikä ei ole taattu käyttöikä. Se riippuu käytön intensiivisyydestä ja erikoisliikkeen suorittamasta yksilöllisestä tarkastuksesta.

Käyttöikä päättyy ennen annettua ajanjaksoa, jos käyttäjä on saavuttanut tuotteen turvallisen käytön kannalta suurimman sallitun painon tai koon.

Käyttöikä ei koske kulutusosia, kuten pehmusteita, päällysteitä jne.

Kestoikä

Tuotteen kestoikä on 8 vuotta, jos käyttöiälle annetut vaatimukset täyttyvät. Kestoikä koostuu käyttöiästä ja varastointiajoista.

Uudelleenkäyttö

Tämä tuote ei sovellu uudelleenkäyttöön. Lasten turvaistointien toimivuutta ei voitaisi varmistaa, jos käyttäjää vaihdettaisiin. Tuotteessa voi olla vaurioita, jotka eivät ole näkyviä. Tämä estää käytön jatkamisen turvallisesti. Tästä syystä valmistaja ei hyväksy käytettyjen lasten turvaistuinten myyntiä ja hankkimista.

Jakelijalla



Haltija Oy

Koivuhannantie 2-4 D

01510 Vantaa

Phone: +358 207 912740

Fax: +358 207 912759

ptkeslus@ptkeskus.fi

www.haltija.fi





Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de