

RECARO Sport HERO Reha



Instrukcja używania – Fotelik samochodowy Rehab
RECARO Sport HERO Reha

CE


Thomashilfen

The logo for Thomashilfen features a stylized rainbow arc above the company name, which is written in a blue, sans-serif font.





1



2



3



4



5



6




7



8



9

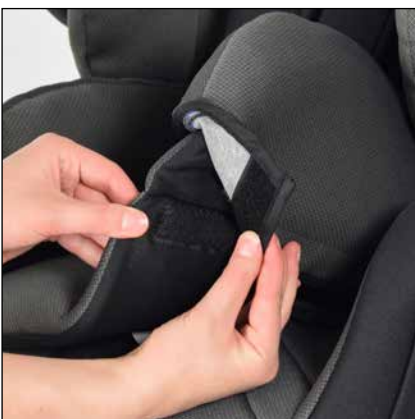

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32

Szanowni Klienci!

Serdecznie dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie naszego produktu. Aby korzystanie z nowego produktu było dla Państwa bezpieczne, praktyczne i komfortowe, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Dzięki temu mogą Państwo uniknąć uszkodzeń i błędów w obsłudze produktu. Należy pozostawić niniejszą instrukcję obsługi przy produkcie, aby była dostępna dla każdego użytkownika.

Niniejsza instrukcja obsługi jest uzupełnieniem oryginalnej instrukcji obsługi RECARO. Modyfikacja rehabilitacyjnego fotelika samochodowego zmienia w kilku punktach sposób obsługi fotelika samochodowego. Zmiany są opisane w tej uzupełniającej instrukcji obsługi.

W razie pytań należy zwrócić się do właściwego działu handlowego lub bezpośrednio do nas.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG



Walkmühlenstraße 1
27432 Bremervörde / Niemcy
Telefon: +49 (0) 4761 8860
www.thomashilfen.de

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych. Może to oznaczać wystąpienie różnic między Państwa produktem a produktami prezentowanymi w mediach.

Spis treści

Ilustracje	3
Wstęp / Producent	6
Oznaczenia / Identyfikator modelu	7
Uwagi ogólne / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8
Przeznaczenie produktu i miejsce stosowania	9
– Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem / Obszary zastosowania	9
– Wskazanie / Grupa docelowa pacjentów, potencjalni użytkownicy	9
– Zagrożenia związane ze stosowaniem i przeciwwskazania	9
Opis produktu	9
– Zawartość zestawu / Wyposażenie podstawowe	9
– Uruchomienie	9
– Przeszkolenie w zakresie obsługi	9
Możliwości regulacji / Właściwości	10
– Akcesoria	11
– Dane techniczne	13
– Dane materiałowe	13
Czyszczenie, konserwacja i naprawa	14
– Czyszczenie, wskazówki dotyczące pielęgnacji i dezynfekcja w codziennym użytkowaniu	14
– Czynności serwisowe i kontrolne wykonywane przez sprzedawcę / Plan konserwacji	15
– Części zamienne	15
– Przechowywanie / Utylizacja	15
Deklaracja zgodności UE	15
Gwarancja	16
Okres użytkowania / Okres eksploatacji	16
Ponowne wykorzystanie	16
Dystrybutor	16

Oznaczenia / Identyfikator modelu

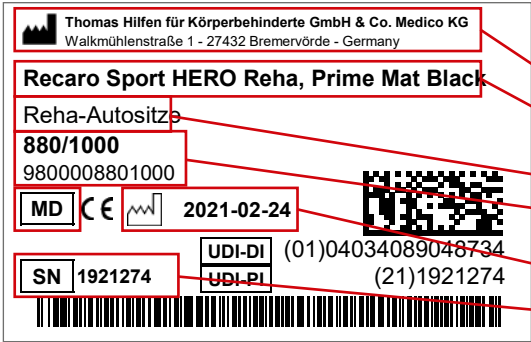Oznaczenie	Znaczenie
	<p>Etykieta z kodem kreskowym</p> <p>Umiejscowienie na produkcie (Rys. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producent - Nazwa produktu - Grupa produktów - Numer artykułu skrócony / długi - MD = Wyrób medyczny - Data produkcji - Numer seryjny
	<p>Tabliczka znamionowa</p> <p>Umiejscowienie na produkcie (Rys. 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producent - Nazwa produktu - Waga użytkownika - Oznakowanie CE - Należy przestrzegać instrukcji obsługi

Wskazówki

Uwagi ogólne

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi lub poprosić o jej odczytania w razie trudności z czytaniem. W razie braku dostępu do instrukcji obsługi można pobrać ją ze strony www.thomashilfen.de. Zawartość elektronicznej instrukcji obsługi można wyświetlić w powiększeniu.
- Należy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń transportowych oraz prawidłowego stanu produktu.
- Zmiany produktu są dopuszczalne wyłącznie w ramach przewidzianych możliwości ustawienia.
- Codzienne czyszczenie i czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez rodzinę i opiekunów. Czynności serwisowe i kontrolne są wykonywane przez sprzedawcę.
- W niektórych krajach niezbędne jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego.
- Rehabilitacyjny fotelik samochodowy może być używany na jednym z tylnych foteli oraz na fotelu pasażera obok kierowcy. Wybrany fotel w samochodzie MUSI być zwrócony przodem w kierunku jazdy.
- Wszystkie oznaczenia muszą pozostać na produkcie i nie wolno wprowadzać żadnych zmian w tym zakresie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przynajmniej raz na 3 miesiące należy sprawdzić, czy ustawienia produktu nadal pasują do aktualnych wymiarów ciała użytkownika. W razie potrzeby należy zwrócić się do sprzedawcy / technika ortopedy o dostosowanie ustawień.
- Należy regularnie (co tydzień) sprawdzać funkcjonalność regulacji produktu.
- Nie wolno przeciążać produktu i należy przestrzegać wymogów dotyczących maksymalnej wagi użytkownika lub maksymalnego obciążenia (zobacz dane techniczne).
- Nie wolno nigdy pozostawiać użytkownika samego z produktem bez odpowiedniego nadzoru.
- Produkt może być używany tylko przez jednego użytkownika w danym czasie. Nie wolno umieszczać żadnych dodatkowych osób w produkcie lub na produkcie.
- Wszyscy użytkownicy muszą być przeszkoleni w zakresie funkcji produktu. W ten sposób w sytuacji awaryjnej można szybko wydostać użytkownika z produktu.
- Nie wolno pozostawiać użytkownika bez nadzoru podczas wsiadania i wysiadania z produktu. Nadmierne obciążenie podnóżka stwarza ryzyko ześlizgnięcia się lub przewrócenia produktu.
- Użytkownik powinien być zawsze przymocowany pięciopunktowym pasem (wyposażenie podstawowe). Siedzisko i użytkownik muszą być zawsze zabezpieczeni trzypunktowym pasem bezpieczeństwa dostępnym w pojeździe.
- Przy silnym nasłonecznieniu i podczas upału temperatura powierzchni produktu może być wysoka. Dotknięcie jej może skutkować oparzeniem. Należy użyć produktu dopiero po jego wystarczającym ochłodzeniu. Generalnie należy chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Należy przestrzegać norm bezpieczeństwa obowiązujących dla Państwa pojazdu, określonych w jego instrukcji obsługi, aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkownika.
- Instrukcja obsługi musi być pozostawiona przy produkcie.
- Jeżeli wbrew oczekiwaniom doszłoby do poważnego zdarzenia z udziałem produktu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do naszej firmy i właściwych władz.

Przeznaczenie produktu i miejsce stosowania

Przewidziane zastosowanie / obszary zastosowania

Fotelik rehabilitacyjny RECARO Sport HERO Reha to produkt medyczny klasy 1.

Przeznaczony jest do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zapewnia bezpieczną pozycję siedzącą dzieci w pojazdach. Fotelik zabezpieczony jest przy użyciu 3-punktowego pasa bezpieczeństwa w pojeździe. 5-punktowy pas fotelika rehabilitacyjnego służy do ustawienia i utrzymania wyprostowanej pozycji siedzącej dziecka. Fotelik rehabilitacyjny ma również zintegrowane pochylenie siedzenia.

Fotelik rehabilitacyjny zapewnia dodatkowe wsparcie dla bezpiecznego siedzenia, stabilizację podparcia głowy i stabilne siedzisko w okolicy miednicy, a także wsparcie w obszarze stóp. Ponadto do produktu dedykowana jest szeroka gama akcesoriów, dzięki którym można dostosować go do własnych potrzeb.

Każde inne lub dodatkowe zastosowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

Wskazanie / grupa docelowa pacjentów, potencjalni użytkownicy

Fotelik rehabilitacyjny jest również stosowany do transportu dzieci z ograniczeniami fizycznymi/funkcjonalnymi w obszarze głowy i tułowia. Zapewnia stabilną i fizjologiczną pozycję, gdy standardowy fotelik samochodowy nie utrzymuje stabilnej pozycji siedzącej w pojeździe.

Zagrożenia związane ze stosowaniem i przeciwwskazania

Przy prawidłowym użytkowaniu można wykluczyć ryzyko związane ze stosowaniem. Nie są znane żadne przeciwwskazania.

Opis produktu

Zawartość zestawu

Produkt jest dostarczany w stanie zmontowany wraz z wyposażeniem podstawowym. Ewentualne zamówione akcesoria są dołączone do produktu i wymagają zamontowania. Do produktu dołączona jest instrukcja obsługi.

Wyposażenie podstawowe

Siedzisko i oparcie z 4-pozycyjnym zagłówkiem o regulowanej wysokości; zintegrowane 5-punktowe szelki bezpieczeństwa z centralnym regulatorem; szelki naramienne o regulowanej wysokości z systemem wyściełania szelek HERO, w tym wyściełanie szelek (małe); bardzo szerokie boczne absorbery energii (ASP); uchwyt do przenoszenia; regulowana pozycja spoczynkowa; zdejmowane ochraniacze głowy, klatki piersiowej i boku siedziska; zdejmowane pokrowce

Uruchomienie

- Należy ostrożnie zdjąć zabezpieczenia transportowe i opakowania.
- Należy zabezpieczyć części opakowania i drobne elementy przed dostępem dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia lub zadławienia.

Przeszkolenie w zakresie obsługi

Użytkownik zostanie przeszkolony przez autoryzowany personel specjalistyczny z wykorzystaniem niniejszej instrukcji obsługi w zakresie obsługi tego środka pomocniczego.

Doradca powinien zamontować fotelik w pojeździe wspólnie z użytkownikiem i dostosować fotelik do wymiarów aktualnego użytkownika.

Należy zadbać o przeszkolenie użytkownika w zakresie wszystkich funkcji produktu oraz montowania i demontowania fotelika z pojazdu.

Możliwości regulacji / Właściwości

Prosimy pamiętać:

Zintegrowany z fotelikiem samochodowym 5-punktowy pas bezpieczeństwa przeznaczony jest tylko do zastosowania zgodnie z normą ECE grupa I. Warunkiem jest, aby fotelik samochodowy był zamocowany za pomocą znajdującego się w samochodzie 3-punktowego pasa bezpieczeństwa.

Fotelik samochodowy RECARO Sport HERO Reha przeszedł pomyślnie testy obciążenia przeprowadzone przez Dekra (Drezno) zgodnie z wymaganiami normy ECE R 44/04. Fotelik samochodowy RECARO Sport HERO Reha został tym samym dopuszczony jako urządzenie zabezpieczające pasażerów zgodnie z wymaganiami specjalnymi „S”.

ECE grupa II-III (18–36 kg):

W ramach tego testu potwierdzono, że 5-punktowy pas dla dzieci powyżej 18 kg wagi może być stosowany jako dodatkowy pas pozycjonujący. Warto zabezpieczyć dziecko ZAWSZE z użyciem 3-punktowego pasa bezpieczeństwa, przestrzegając przy tym wskazówek dotyczących prawidłowej instalacji zgodnie z oryginalną instrukcją montażu i użytkowania RECARO.

Zintegrowany w obrębie fotelika 5-punktowy pas pozycjonujący NIE jest istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dziecko jest w tym przypadku przytrzymywane przez 3-punktowy pas pojazdu, pas 5-punktowy jest przeznaczony celem dodatkowego wsparcia dla dzieci o wadze od 18 do 36 kilo i używany jest do pozycjonowania. Aby RECARO Sport HERO Reha mógł być możliwie długo używany przez Państwa dziecko, system pasa 5-punktowego wraz z rurką uchylną można wymontować, Należy przy tym przestrzegać wskazówek z oryginalnej instrukcji montażu i użytkowania RECARO. Jeśli dla dużych dzieci ma być wykorzystywany także 5-punktowy pas pozycjonujący, zalecamy skorzystanie z oferowanego przez nas przedłużenia pasa.

5-punktowy

Dalsze informacje dotyczące wykorzystania pasa zawarte są w instrukcji obsługi RECARO, która jest dołączona do fotelika.

Zmiana długości pasa:

lekko podnieść tapicerkę boczną fotelika i odpiąć nakładkę materiałową przytwierdzoną rzepem. Teraz widoczna jest umieszczona w skorupie fotelika centralna regulacja pasa. Aby móc zmienić długość pasa, nacisnąć w dół dźwignię i ustawić długość pasa poprzez pociągnięcie w dół za zwisającą u dołu taśmę pasa (celem skrócenia) lub przez pociągnięcie do przodu obydwu pasów (celem wydłużenia).

Rys. 3: Zmiana długości pasa

Zamek pasa:

Celem otwarcia nacisnąć na czerwone zagłębienie zamka. Następnie wyjąć obydwie zaczepy pasa. Celem zamknięcia pasa złączyć razem obydwie górne zaczepy, włożyć je do zamka i nacisnąć je razem dopóki nie rozlegnie się słyszalne „kliknięcie” zamka.

Rys. 4: Otwieranie zamka pasa („Kliknięcie”)

Poduszka zagłówka

Naciągnąć możliwie mocno pokrowce poduszek na oparcia boczne zagłówka i zamocować je u góry na śrubach.

Rys. 5: Naciąganie poduszki zagłówka na oparcie boczne / Rys. 6: Zamocowanie na śrubę

Oslony boczne na wysokości klatki piersiowej

Celem założenia osłon bocznych należy ułożyć ją luźno w foteliku i przełożyć obydwie taśmy zapięcia na rzep za tapicerkę oparcia. Zapiąć taśmy na rzep za tapicerką.

Rys. 7: Ustawianie położenia na foteliku / Rys. 8: Zamocowanie za pomocą zapięcia na rzep

Poduszka pomniejszająca siedzisko fotelika

RECARO Sport HERO Reha jest wyposażony w system zmniejszenia fotelika. W obrębie systemu mocuje się boczne osłony fotelika. W tym celu na układ zmniejszania należy naciągnąć osłony boczne. W tym celu nasuwa się osłony boczne na boczne części układu zmniejszania. Następnie należy boczne osłony przypiąć rzepami po zewnętrznej stronie systemu zmniejszania fotelika.

Rys. 9: Naciąganie osłony na układzie zmniejszania / Rys. 10: Mocowanie na rzep

Poniższe opcje regulacji / właściwości użytkowe znajdują się w oddzielnej instrukcji obsługi RECARO Sport HERO.

Siedzenie i oparcie z 4-kierunkową regulacją wysokości zagłówka

Pas barkowy z regulacją wysokości i systemem podkładek HERO z osłoną pasa (mały)

Bardzo szerokie, boczne absorbery energii (ASP)

Uchwyt do przenoszenia

Regulowana pozycja spoczynkowa

Zdejmowane osłony

Akcesoria

Wskazówka: informacje dotyczące montażu znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej bezpośrednio do akcesoriów. W razie braku dostępu do instrukcji obsługi można pobrać ją ze strony www.thomashilfen.de. Do montażu / demontażu akcesoriów potrzebne są standardowe narzędzia.

Płyta adaptera (Rys. 11)

Płyta adaptera jest warunkiem koniecznym do zastosowania dodatkowego wyposażenia. Jest przymocowana do przedniej części powierzchni siedziska rehabilitacyjnego fotelika samochodowego.

Przed założeniem oczyścić spodnią powierzchnię fotelika z tworzywa sztucznego dostępnymi w handlu środkami czyszczącymi (np. woda z płynem do mycia naczyń), aby była zupełnie pozbawiona tłuszczu.

Zdjąć paski do mocowania na rzep (flausz) z płyty adaptera i nałożyć je pod fotelikiem. Paski mocowania na rzep (haczyki) pozostają na płycie adaptera.

Rys. 12: Ustawianie pasków zapięcia na rzep na foteliku

Ustawić fotelik pod kątem 90° dokładnie przy adapterze (Uchwyt adaptera skierowany do przodu) i przechylić fotelik na adapter tak, aby powierzchnia siedziska fotelika została przymocowana na rzep.

Rys. 13: Nakładanie fotelika na adapter

Płyta obrotowa z adapterem (Rys. 14)

Dzięki funkcji obrotowej rehabilitacyjny fotelik samochodowy można obrócić tak, aby był skierowany w stronę drzwi pojazdu. Dla opiekunów łatwiejsze jest przenoszenie użytkownika i dostęp do 5-punktowego pasa pozycjonującego fotelika. Dla użytkownika samodzielne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu staje się łatwiejsze. Dodatkowe wyposażenie można przymocować jednocześnie do przedniej części rehabilitacyjnego fotelika samochodowego.

Element łączący Seatfix (Rys. 15)

Element łączący Seatfix pozwala na zastosowanie ISOFIX w samochodzie, zwiększając tym samym stabilność rehabilitacyjnego fotelika samochodowego. Dodatkowa stabilizacja jest szczególnie potrzebna, gdy używa się również funkcji obrotu (i/lub funkcji pochylenia). Podobnie element łączący Seatfix zabezpiecza pusty fotelik w pojeździe.

Pałak stabilizujący (Rys. 16)

Pałak stabilizujący jest przymocowany do tylnej części fotela samochodowego i wsunięty w szczelinę pomiędzy powierzchnią siedziska a oparciem siedzenia pojazdu. Jest on odpowiedni w przypadku, gdy nie można zastosować systemu ISOFIX. Dodatkowa stabilizacja jest szczególnie potrzebna, gdy używa się również funkcji obrotu (i/lub funkcji pochylenia).

Podpora (Rys. 17)

Podpora zapewnia stabilizację rehabilitacyjnego fotelika samochodowego. Dodatkowa stabilizacja jest szczególnie potrzebna, gdy używa się również funkcji obrotu (i/lub funkcji pochylenia).

Podnóżek (Rys. 18)

Dzięki podnóżkowi użytkownik stabilnie siedzi w rehabilitacyjnym foteliku samochodowym, ponieważ może mocno podeprzeć nogi. Zapobiega to ześlizgnięciu się z fotelika na podłogę pojazdu. Podnóżek można złożyć, aby ułatwić wsiadanie na fotelik i zsiadanie z niego. Podnóżek może służyć do nauki samodzielnego wsiadania na fotelik i zsiadania z niego.

Należy nasunąć rury podpórek na nogi z przodu do adaptera. W tym celu wcisnąć sprężyny blokujące w obrębie podpórki na nogi. Zasadniczo podpórkę na nogi zabezpieczyć śrubą w obrębie lewej rury adaptera podpórki na nogi, tak aby nie wypadła. Większa liczba otworów w rurkach od podpórki pod nogi umożliwia dostosowanie do głębokości siedzenia.

Rys. 19: Wkładanie podnóżka

Celem oparcia podnóżka na podłodze samochodu należy dostosować wysokość prętów wsporczych poprzez ich wkręcanie i wykręcanie tak, by pręty opierały się o podłogę samochodu. Następnie unieruchomić pręty wsporcze za pomocą pokręteł gwiazdowych, aby zapobiec ich niezamierzonemu wykręceniu. Przekręcić w tym celu śruby z pokrętkami gwiazdowymi jak najdalej do góry i je mocno dokręcić.

Rys. 20: Dostosowanie wysokości do samochodu

Długość nóg:

Ustawienie długości nóg odbywa się poprzez przestawienie wysokości podnóżka. W tym celu należy poluzować obydwie zewnętrzne śruby radełkowane, a po przestawieniu dokręcić je ponownie dostatecznie mocno.

Nachylenie stóp:

Poluzować cztery śruby z prawej i lewej strony na spodzie podnóżka, aby nastawić żądany kąt nachylenia stóp nad szynami. Następnie dokręcić z powrotem śruby.

Blok podnoszący podnóżka (Rys. 21)

Blok podnoszący podnóżka zmniejsza wymaganą długość podudzia, jeśli nogi użytkownika nie są wystarczająco długie.

Podkładka klinowa fotelika, pod spodem (Rys. 22)

Podkładkę klinową fotelika (pod spodem) umieszcza się na siedzeniu samochodu pod rehabilitacyjnym fotelikiem samochodowym, aby uzyskać pochylenie siedziska. Odchylenie fotelika do tyłu jest przeznaczone dla dzieci z małym napięciem ciała i/lub słabą kontrolą głowy.

Podkładkę klinową fotelika podkłada się w środku pod fotelik. Wysoka krawędź winna znajdować się z przodu, aby uzyskać optymalną pozycję spoczynkową dla dziecka.

Uwaga: Użycie podkładki klinowej fotelika razem z płytą obrotową ogranicza znacznie jej funkcję. Dlatego też zalecamy, aby nie używać równocześnie podkładki klinowej fotelika i płyty obrotowej.

Rys. 23: Nakładanie fotelika na podkładkę klinową / Rys. 24: Pozycja krańcowa

Stół (Rys. 25)

Stół jest umieszczony przed brzuchem użytkownika. Daje użytkownikowi stabilność i bezpieczeństwo, użytkownik może się na nim oprzeć i lepiej utrzymać pozycję pionową. Jako bariera wizualna dla klamry pasa bezpieczeństwa odwraca uwagę od odpinania pasów, a użytkownik może wykorzystać powierzchnię do wykonywania czynności.

Zamontować najpierw oparcia boczne stolika naciągając je na zaokrąglone naroża siedziska fotelika. Strona z dłuższym materiałem winna być przy tym w obydwu przypadkach skierowana na zewnątrz. Zamocować materiał przewidziany do tego celu otworami w pokrowcu oparc bocznych na kółkach regulacji fotelika. Materiał wystający u dołu należy włożyć pod tapicerkę fotelika.

Rys. 26: Zakładanie oparc bocznych stolika

Następnie zamocować stolik na paskach rzepów mocujących na oparciach bocznych. Następnie poprowadź pas ponownie w bok do przodu po zewnętrznej stronie za oparciem fotelika i zapnij go na rzep (włókninę) stolika.

Rys. 27: Nakładanie stolika

Wskazówka: W razie korzystania ze stolika ze względu na brak miejsca należy zdjąć ewentualnie założoną osłonę materiałową pasa.

Ośłona pasa bezpieczeństwa (Rys. 28)

Oślonę pasa mocuje się pod sprzączką 5-punktowego pasa rehabilitacyjnego fotelika samochodowego. Chroni użytkownika przed niewygodnym uciskiem klamry pasa na brzuch oraz amortyzuje ruch i ucisk w okolicy krocza.

Miękkie nakładki na pasy (Rys. 29)

Miękkie nakładki na pasy chronią użytkownika w obszarze ramion przed bolesnym uciskiem i przecięciem pasów.

Przedłużacz pasa (Rys. 30)

Przedłużacz pasa może być potrzebny dla wyższych użytkowników, aby dopasować pas. (Tylko dla grupy ECE II + III, 18 - 36 kg.)

Kamizelka Anti-Escape (Rys. 31)

Kamizelka Anti-Escape zapobiega wyrwaniu się dziecka z pasów bezpieczeństwa. Zabezpiecza niebezpieczne szczeliny między pasem a dzieckiem, które dziecko mogłoby wykorzystać do zsunięcia pasa z ramion.

Ochraniacz na fotel samochodowy z oparciem (Rys. 32)

Ochraniacz na fotel samochodowy leży pod fotelikiem na siedzeniu i oparciu samochodu. Chroni siedzisko i oparcie fotelika samochodowego przed uszkodzeniami. W przednich kieszeniach można przechowywać drobne przedmioty.

Dane techniczne**RECARO Sport HERO Reha**

Głębokość siedziska (z poduszkami siedziska)	31 cm (26 cm)
Szerokość siedzenia przód (z poduszkami siedzenia) (z reduktorem gniazda)	31 cm (21 cm) 27 cm
Szerokość siedzenia tył (z poduszkami siedzenia) (z reduktorem gniazda)	29 cm (20 cm) 25 cm
Wysokość oparcia (siedziska)	53 - 73 cm
Wysokość ramion (prowadnica pasa)	23 - 42 cm
Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gł.)	54 x 55 (max. 81) x 52 cm
Waga siedzenia	ok. 8 kg
Waga użytkownika	9 - 36 kg

Dane materiałowe

Obicie: poliester - Trevira CS / 100% poliester - RECARO Prime

Zastosowany materiał obiciowy jest „trudnopalny“, sprawdzony według DIN EN 1021-1 oraz DIN EN 1021-2.

Stopień odporności materiałów i podzespołów na zapłon został sprawdzony według właściwych norm i oceniony jako niebudzący zastrzeżeń.

Materiał 100% Trevira CS / RECARO Prime to oddychająca tkanina o wysokiej jakości, z pozytywnym wynikiem testu biokompatybilności. (DIN EN ISO 10993-5 i 10993-10 Trevira CS, czarny)


Czyszczenie, konserwacja i naprawa

Czyszczenie, wskazówki dotyczące pielęgnacji i dezynfekcja w codziennym użytkowaniu


Obicie

Obicie jest łatwo zdejmowalne kilkoma ruchami ręki i nadaje się do oddzielnego prania. Składa się z pokrowca materiałowego i ew. wkładów z pianki. Należy sprawdzić, czy jest wyposażone w zamknięcie na suwak lub na rzep. Jeżeli tak, należy otworzyć obicie i przed praniem wyjąć ew. wkład z pianki. Należy przestrzegać również następujących wskazówek dotyczących pielęgnacji.

RECARO Prime:

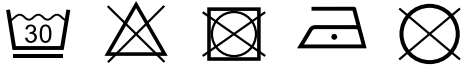

Trevira CS:

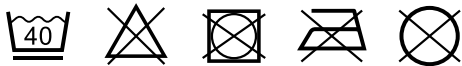

Informujemy, że również wysokiej jakości materiały mogą wyblaknąć na skutek długotrwałego i intensywnego promieniowania słonecznego lub częstego prania.

Rzepy

W celu zachowania dobrego stanu rzepów należy od czasu do czasu przeczyszczyć paski na rzepy szczotką. Podczas prania zawsze zamykać lub osłaniać rzepy.

Elementy plastikowe

Plastikowe elementy produktu można czyścić przy użyciu zwykłego mydła (neutralnego) i dezynfekować.

Elementy metalowe

Metalowe elementy produktu można czyścić przy użyciu zwykłego mydła (neutralnego) i dezynfekować.

Dezynfekowanie

Przed dezynfekcją należy wyczyścić obicie, elementy plastikowe i metalowe.

Należy przetrzeć wszystkie plastikowe i metalowe elementy produktu z dodatkiem środka do dezynfekcji. Należy używać wyłącznie środków na bazie wody. Podczas dezynfekcji należy przestrzegać wskazówek danego producenta.

Czynności serwisowe i kontrolne wykonywane przez sprzedawcę

Przygotowanie

Instrukcja obsługi musi być załączona do produktu. W przypadku braku instrukcji należy zwrócić się do producenta. Należy zapoznać się z funkcjami produktu. Jeżeli nie są one znane, przed kontrolą należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed wykonaniem kontroli. Przed rozpoczęciem kontroli należy wyczyścić produkt. Należy stosować się do wskazówek dotyczących pielęgnacji i kontroli, określonych w instrukcji obsługi. W razie dalszych pytań należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą specjalistycznym lub bezpośrednio z firmą Thomashilfen.

Prace serwisowe i naprawy produktu mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny personel. Użytkownik produktu jest zobowiązany do przestrzegania regularnego i terminowego wykonywania zalecanych przeglądów / prac konserwacyjnych. W razie zauważenia uszkodzenia użytkownik jest zobowiązany do aktywnego poinformowania i zlecenia niezwłocznego usunięcia uszkodzenia przez specjalistyczny personel.

Plan konserwacji – Kontrola roczna

	Obszar	Funkcja		Uszkodzenie		Wymiana	
1	Korpus z tworzywa	👁		👁			
2	Możliwości regulacji	👁		👁			
3	Obicie			👁			
4	Pasy	👁		👁			
5	Elementy plastikowe	👁		👁			
6	Śruby i nakrętki	👁		👁			
7	Oznaczenia			👁			
Akcesoria							
8	Obicie			👁			
9	Pasy	👁		👁			
10	Możliwości regulacji	👁		👁			
11	Elementy plastikowe	👁		👁			
12	Elementy metalowe	👁		👁			
13	Śruby i nakrętki	👁		👁			
przeprowadzone przez:				w:			
👁 = Przeglądy ✓ = Kontrola wykonana							

Części zamienne

Do naprawy można używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Wykaz części zamiennych jest dostępny w internecie na stronie www.thomashilfen.de. Do otrzymania właściwych części zamiennych lub do ew. technicznego wycofania z obrotu potrzebujemy zasadniczo podania numeru seryjnego / UDI-PI oraz dokładnego UDI-DI.

Demontaż / montaż części zamiennych może być zasadniczo wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel! W razie konieczności odesłania produktu należy zadbać o zapakowanie go w sposób zabezpieczający podczas transportu.

Przechowywanie

Jeżeli produkt nie jest używany, należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Podczas przechowywania produktu nie wolno stawiać ani kłaść na nim żadnych ciężkich przedmiotów. Należy chronić produkt przed wpływem czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, silne nasłonecznienie i mróz. Jeżeli produkt zostanie zmoczony, przed odstawieniem do przechowywania należy wytrzeć części metalowe i plastikowe do sucha oraz wysuszyć obicie.

Utylizacja

Jeżeli produkt nie nadaje się już do użytku ze względu na swój stan lub jeżeli okres jego eksploatacji dobiegł końca, może zostać przekazany celem utylizacji do właściwego lokalnego przedsiębiorstwa utylizacyjnego. Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt oraz ew. warianty i akcesoria są zgodne z zasadniczymi przepisami. Aktualną deklarację zgodności UE można pobrać w internecie ze strony www.thomashilfen.de lub uzyskać bezpośrednio od nas.

Gwarancja

Thomashilfen udziela dwuletniej ustawowej gwarancji na ten produkt. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu przekazania towaru. Gwarancja obejmuje wszystkie roszczenia ograniczające funkcjonalność. Z gwarancji wyłączone są szkody powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania (np. przeciążenia) oraz naturalnego zużycia.

Okres użytkowania

Okres użytkowania produktu wynosi maksymalnie 6 lat pod warunkiem prawidłowego i regularnego serwisowania zgodnie z zaleceniami producenta. Produkt może być używany również po upływie tego okresu, jeżeli jest w bezpiecznym stanie i jest sprawny technicznie.

Teoretyczny okres użytkowania nie jest gwarantowany. Jest zależny od intensywności użytkowania oraz zawsze wymaga indywidualnego sprawdzenia przez specjalistę.

Okres użytkowania kończy się przed podanym terminem, jeżeli użytkownik osiągnął maksymalną wagę ciała lub maksymalny wzrost umożliwiający bezpieczne korzystanie z produktu.

Okres użytkowania nie dotyczy elementów zużywalnych, takich jak obicie, pokrowce itp.

Okres eksploatacji

Okres eksploatacji produktu wynosi 8 lat, jeżeli spełnione są warunki określone w punkcie dotyczącym okresu użytkowania. Okres eksploatacji składa się z okresu użytkowania i czasu składowania.

Ponowne wykorzystanie

Produkt nie nadaje się do ponownego użytku. Funkcjonalność fotelików samochodowych dla dzieci nie może być bezpiecznie zapewniona w przypadku teoretycznej zmiany użytkownika. Produkt może mieć niewidoczne uszkodzenia, wykluczające dalsze bezpieczne użytkowanie. W związku z tym producent wyklucza możliwość sprzedaży i zakupu używanych dziecięcych fotelików samochodowych.

Dystrybutor



Timago International Group

spółka z o. o. i spółka – spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/11

43-316 Bielsko-Biała

Phone: +48 33 499 50 00

Fax: +48 33 499 50 11

info@timago.com

www.timago.com



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de