


RECARO Sport HERO Reha

 **Brugsanvisning** – Reha-autostol RECARO Sport HERO Reha

CE


Thomashilfen





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32

Kære kunde,

Vi er glade for, at du har valgt vores produkt, og vi vil gerne sige tusind tak for tilliden. For at sikre, at håndteringen af dit nye produkt er sikker, praktisk og komfortabel for både dig og brugeren, bedes du først læse denne brugsanvisning. På den måde undgår du skader og betjeningsfejl. Sørg for, at denne brugsanvisning bliver sammen med produktet, og at den står til rådighed for enhver bruger.

Denne brugsanvisning er et supplement til den oprindelige RECARO-brugsanvisning. På grund af modifikationen af Reha-autostolen er håndteringen af autostolen ændret på enkelte punkter. Ændringerne er beskrevet i denne supplerende brugsanvisning.

Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du kontakte forhandleren eller os.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

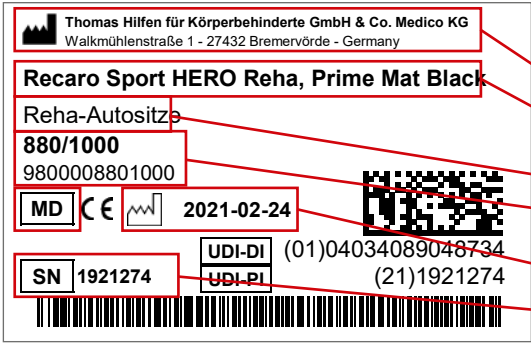

Walkmühlenstraße 1
27432 Bremervörde / Tyskland
Telefon: +49 (0) 4761 8860
www.thomashilfen.de

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer. Dette kan medføre forskelle mellem dit produkt og fremstillingen i medierne.

Indholdsfortegnelse

Illustrationer	3
Forord / Fabrikant	6
Mærkning / Modelidentifikation	7
Generel information / Sikkerhedsadvarsel	8
Anvendelsesformål og brugssted	9
– Brug / Anvendelsesområde i overensstemmelse med reglerne	9
– Indikation / Patientmålgruppe, tilsigtet bruger	9
– Anvendelsesrisici og kontraindikationer	9
Produktbeskrivelse	9
– Leveringsomfang / Basisudstyr	9
– Ibrugtagning	9
– Oplæring i brug	9
Indstillingsmuligheder / Ydeevneegenskaber	10
– Tilbehør	11
– Tekniske data	13
– Materialeoplysninger	13
Rengøring, vedligeholdelse og reparation	14
– Rengøring, plejeanvisning og desinfektion til hverdag	14
– Vedligeholdelse og inspektion hos forhandleren / Vedligeholdelsesplan	15
– Reservedele	15
– Opbevaring / Bortskaffelse	15
EU-overensstemmelseserklæring	15
Garanti	16
Brugstid / Levetid	16
Genanvendelse	16
Distributør	16

Mærkning / Modelidentifikation

Mærkning	Betydning
	<p>Stregkodelabel</p> <p>Placering på produkt (Ill. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrikant - Produktnavn - Produktgruppe - Artikelnummer kort / langt - MD = Medicinsk udstyr - Produktionsdato - Serienummer
	<p>Maskinskilt</p> <p>Placering på produkt (Ill. 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrikant - Produktnavn - Brugervægt - CE-mærkning - Følg brugsanvisningen

Information

Generel information

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden produktet tages i brug, eller få eventuelt brugsanvisningen læst op. Hvis du ikke har brugsanvisningen, kan du downloade den på www.thomashilfen.de. Indholdet i den digitale brugsanvisning kan forstørres.
- Undersøg emballagen for transportskader, og kontrollér, om produktet er i upåklagelig stand.
- Ændringer af produktet er kun tilladt som led i de planlagte indstillingsmuligheder.
- Den daglige rengøring og pleje kan udføres af pårørende og hjælpere. Vedligeholdelse og inspektion sker hos forhandleren.
- I nogle lande kræves det, at der medbringes en lægeattest.
- Reha-autostolen kan anvendes både på et af bagsæderne og på passagersædet. Det valgte sæde SKAL være fremadvendt.
- Alle mærker skal forblive på produktet og må ikke ændres på nogen måde.

Sikkerhedsadvarsel

- Kontrollér som minimum hver 3. måned, om indstillingerne for produktet fortsat passer til brugerens aktuelle kropsvægt. Lad en forhandler/ortopædtekniker justere indstillingerne om nødvendigt.
- Kontrollér regelmæssigt (ugentligt) funktionsdygtigheden for indstillingsmulighederne på produktet.
- Overbelast ikke produktet, og overhold den maksimale brugervægt og den maksimale bæreevne (se de tekniske data).
- Efterlad aldrig brugeren alene med produktet uden opsyn.
- Produktet må til enhver tid kun anvendes af en enkelt bruger. Der må ikke placeres flere personer i eller på produktet.
- Alle brugere skal være bekendt med produktets funktioner. Så kan brugeren hurtigt frigøres fra produktet i en nødsituation.
- Lad ikke brugeren komme ind i eller ud af produktet uden opsyn. Ved for stærk belastning af fodstøtten er der risiko for at glide af eller vælte.
- Brugeren skal altid placeres med 5-punktsselen (basisudstyr). Sæde og bruger skal altid fastspændes med køretøjets 3-punktssikkerhedssele.
- Ved stærk sol og varme kan produktets overfladetemperatur bliver høj. Det medfører risiko for at komme til skade ved berøring. Brug først produktet igen, når det er kølet tilstrækkeligt af. Beskyt generelt produktet mod direkte sollys.
- Overhold af hensyn til brugerens sikkerhed de sikkerhedsnormer, der gælder for dit køretøj, og som er angivet i brugsanvisningen.
- Brugsanvisningen skal blive sammen med produktet.
- Skulle der mod forventning opstå alvorlige problemer med produktet, bedes du omgående orientere vores virksomhed og den relevante myndighed om dette.

Anvendelsesformål og brugssted

Brug / anvendelsesområde i overensstemmelse med reglerne

Reha-autostolen RECARO Sport HERO Reha er medicinsk udstyr i klasse 1.

Den er udviklet til bagudrettet transport og til efterlevelse af en sikker siddeposition for børn i motorkøretøjer. Sædet monteres altid sikkert med 3-punktssikkerhedsselen i køretøjet. 5-punktsselen i Reha-autostolen sørger for, at barnet sidder i en understøttet og opret siddeposition. Derudover har Reha-autostolen en integreret sædehældning.

Reha-autostolen giver ekstra stabilitet med en sikker siddeposition, stabilisering af hovedkontrol og stabil placering i bækkenområdet samt understøttelse i fodområdet. Desuden findes der et omfattende udvalg af produkttilbehør til individuel tilpasning.

Enhver anden form for brug gælder ikke som i overensstemmelse med reglerne.

Indikation / patientmålgruppe, tilsigtet bruger

Reha-autostolen anvendes til børn med strukturelle og/eller funktionelle begrænsninger eller fejlstillinger i hoved- og torsoområdet. Den sørger for en stabil og fysiologisk placering, når gængse børneautostole ikke er tilstrækkelige til en stabil siddestilling i køretøjet.

Anvendelsesrisici og kontraindikationer

Ved korrekt brug er der ingen risici ved anvendelse. Der er intet kendskab til kontraindikationer.

Produktbeskrivelse

Leveringsomfang

Produktet bliver leveret med basisudstyret monteret. Eventuelt tilbehør, der også er bestilt, leveres sammen med produktet og skal monteres efterfølgende. Der følger en brugsanvisning med produktet.

Basisudstyr

Sæde og ryg med højdejusterbar nakkestøtte i 4 positioner; integreret 5-punkts-sele med central justering; højdejusterbar skuldersele med HERO-selepolstringssystem inkl. seleskjoldspolstring (lille); ekstra brede sidelæns energiabsorbere (ASP); bærehåndtag; justerbar hvileposition; aftagelige puder til hoved, brystkasse og sædets sider; aftagelige betræk

Ibrugtagning

- Fjern omhyggeligt transportsikringen og emballagen.
- Sørg for at holde emballage og eventuelle små dele væk fra børn for at undgå, at de sluger delene eller bliver kvalt.

Oplæring i brug

Brugeren bliver oplært i brug af dette hjælpemiddel af autoriseret fagpersonale i henhold til brugsanvisningen.

Fagkonsulenten skal sammen med brugeren sætte stolen i køretøjet og indstille sædet, så det passer til den aktuelle bruger.

Det er for at sikre, at brugeren er oplært i alle produktets funktioner samt i ind- og udtagning af køretøjet.

Indstillingsmuligheder / Ydeevneegenskaber

Bemærk venligst:

Den i børnesædet integrerede 5-punkts-sikkerhedssele er kun bestemt til brug i ECE gruppen. Forudsætning er, at børne-autostolen først er blevet sikret med den i køretøjet tilstedeværende 3-punkts-sele.

Barneautostolen RECARO Sport HERO Reha har hos Dekra (Dresden) bestået en overbelastningstest på basis af ECE R 44/04 kravene. RECARO Sport HERO Reha er derfor tilladt som tilbageholdelsesindretning til specielle krav "S".

ECE gruppen II-III (18–36 kg):

I forbindelse med denne test blev det godkendt, at 5-punkts-selen til børn med over 18 kg kropsvægt kan anvendes som ekstra positioneringssele. Sikr dit barn i dette tilfælde ALTID med den i køretøjet anbragte 3-punkts-sikkerhedssele og vær herved opmærksom på oplysningerne til korrekt installation iht. den originale RECARO monterings- og brugsanvisning.

Den i autostolen indbyggede 5-punkts-positioneringssele er IKKE sikkerhedsrelevant. Barnet holdes herved tilbage af køretøjets 3-punkts-sele, 5-punkts-selen er ved børn fra 18 til 36 kg kropsvægt kun tænkt som ekstra understøttende positioneringssele.

For at RECARO Sport HERO Reha så længe som muligt kan anvendes af dit barn, kan 5-punkts-selesystemet inklusive omstyringsrør afmonteres. Vær herved opmærksom på oplysningerne i den originale RECARO monterings- og brugsanvisning. Hvis der også skal anvendes en 5-punkts-positioneringssele til store børn, anbefaler vi at anvende vores seleforlænger.

5-punkts-sele

Du finder yderligere informationer vedr. selens brug i den vedlagte RECARO brugsvejledning.

Ændring af selelængde:

Løft stolens polster let op og løs strøppen vha. burrelukningen. Nu ser du den centrale selejustering, som er indbygget i stolens skal. For at justere selens længde, trykkes løftestangen ned og selen justeres ved at man trækker i den fornedede hængende sele (afkorte) eller ved at man trækker begge seler frem (forlænge).

Ill. 3: Skift selelængde

Selens lukning:

For at åbne selen, tryk på den røde fordybning i lukningen. Adskil derefter de to øvre seleholdere. For at lukke selen, fører du de to seleholdere sammen igen, stikker disse i lukningen foroven og trykker denne sammen, til den lukkes med et hørbart „klik“.

Ill. 4: Åben selens lukning („klik“)

Hovedpelotte

Træk pelottens betræk muligt stramt over hovedstøttens sidedele og fastgør den foroven ved skruerne.

Ill. 5: Træk hovedpelotten over sidedel / Ill. 6: Fastgørelse på skrue

Thorax-pelotte

Til anbringelse af thorax-pelotten lægger du denne løst i sædet og fører så burrelukningsbåndene bag rygpolsteret. Luk burrebåndene bag polsteret.

Ill. 7: Anbringelse på sædet / Ill. 8: Fastgørelse med burrer

Stol-sidepelotte

RECARO Sport HERO Reha er udstyret med en støttepude. På denne støttepude anbringes autostolens sidepelotter. Træk hertil sidepelotterne hen over støttepudens sidedele. Sæt så sidepelotterne fast på støttepudens yderside.

Ill. 9: Træk sidepelotten hen over støttepuden / Ill. 10: Burrebåndbånd

Für folgende Einstellmöglichkeiten / Leistungsmerkmale beachten Sie die separate RECARO Sport HERO Gebrauchsanweisung.

Sæde og ryg med 4-vejs højdejusterbar nakkestøtte

Højdejusterbart skulderbælte med HERO-bæltepudsystem inkl. bælteskjold (lille)

Ekstra brede, laterale energiabsorbere (ASP)

Bærehåndtag

Justerbar hvileposition

Aftagelige dæksler

Tilbehør

Tip: Oplysninger om montering findes i den tilhørende brugsanvisning, som følger med tilbehøret. Hvis du ikke har brugsanvisningen, kan du downloade den på www.thomashilfen.de. Montering/afmontering af tilbehør sker med almindeligt værktøj.

Adapterplade (Ill. 11)

Adapterpladen er en forudsætning for brug af yderligere tilbehør. Dette kan anbringes foran på sædet på Reha-autostolen.

Inden fastgørelsen rengøres kunststoffladen på stolens underside med et gængs middel (f. eks. vand og opvaskemiddel), til den er fuldkommen fedtfri.

Fastgør nu burrestrimlerne (den bløde del) fra adapterpladen og anbring denne under stolen. Burrestrimlerne (krogene) forbliver på adapterpladen.

Ill. 12: Positionering af burrebåndsstrimlerne på stolen

Anbring nu sædet, så den rører foran på adapteren i en vinkel på 90° (adapterens håndtag peger fremad) og vip stolen over adapterne, så stolens flade lukkes fast med burrelukningerne.

Ill. 13: Sæt stolen på adapteren

Drejeplade med adapter (Ill. 14)

Med drejefunktionen kan Reha-autostolen drejes mod køretøjets dør. For hjælperen bliver flytning af brugeren og adgangen til 5-punktsselen på sædet dermed nemmere. For brugeren bliver det lettere selv at komme ind og ud. På adapteren kan der samtidig anbringes yderligere tilbehør foran på Reha-autostolen.

Seatfix-adapter (Ill. 15)

Med Seatfix-adapteren kan der anvendes ISOFIX i køretøjet, hvilket øger Reha-autostolens stabilitet. Den ekstra stabilisering er især vigtig, når der også anvendes en drejefunktion (og/eller vippefunktion). Seatfix-adapteren sikrer også det tomme sæde i køretøjet.

Stabiliseringsbøjle (Ill. 16)

Stabiliseringsbøjlen anbringes bag Reha-autostolen og skubbes ind i revnen mellem sædet og ryglænet i køretøjet. Den er velegnet, hvis der ikke kan benyttes ISOFIX. Den ekstra stabilisering er især vigtig, når der også anvendes en drejefunktion (og/eller vippefunktion).

Støtteben (Ill. 17)

Støttebenet sørger for stabilisering af Reha-autostolen. Den ekstra stabilisering er især vigtig, når der også anvendes en drejefunktion (og/eller vippefunktion).

Fodstøtte (Ill. 18)

Med fodstøtten sidder brugeren stabilt i Reha-autostolen, idet han/hun kan støtte benene på den. Det forhindres, at brugeren kan glide fra sædet og ned på bunden af køretøjet. Fodstøtten kan foldes sammen for at lette ind- og udstigning. Med fodstøtten er det muligt at træne selvstændig ind- og udstigning fra sædet.

Skub fodstøttens rør foran ind i adapteret. Tryk hertil låsefjederen på fodstøtten ind. Sikr fodstøtten altid med stjerne-skruen på venstre rør af fodstøttens adapter mod at falde ud. Flere huller i fodstøtterørene gør det muligt at tilpasse den til dybden af dit bilsæde.

Ill. 19: Indfør støtte

Til stabilisering af fodstøtten i bunden af køretøjet tilpasses støttestangens højde ved at dreje den ind eller ud på en sådan måde, at stængerne får kontakt med køretøjets bund. Konter derefter støttestængerne vha. stjernegrebene, for at undgå en uønsket uddrejning. Drej dertil stjernegrebs-skrueerne så langt som muligt op og spænd dem fast.

Ill. 20: Højdejustering køretøj**Underlårslængde:**

Justering af underlårslængden sker via fodstøttens højdejustering. Dertil løsner du de to ydre fingerskruer og spænder dem efterfølgende fast igen.

Fodvinkel:

Løsn de fire skruer til højre og venstre på fodstøttens underside for at indstille den ønskede fodvinkel via skinnerne. Spænd efterfølgende skruerne fast igen.

Forhøjelsesblok til fodstøtte (Ill. 21)

Forhøjelsesblokken til fodstøtten reducerer den nødvendige længde af underbenet, når brugerens ben ikke er lange nok.

Siddekile, under (Ill. 22)

Siddekilen (under) lægges på køretøjets sæde under Reha-autostolen for at opnå en sædehældning. Vipning af sædet bagud anvendes til børn med ret lidt kropsspænding og/eller svag kropskontrol.

Siddekilen anbringes midt under autostolen. Den høje kant er forest, for at opnå en optimal hvilestilling til barnet.

Obs: Brug af siddekile sammen med drejpladen begrænser dennes funktion betydeligt. Vi anbefaler derfor ikke at bruge siddekile og drejplade samtidig.

Ill. 23: Sæt stol på siddekile / Ill. 24: Slutposition**Bord (Ill. 25)**

Bordet anbringes foran brugerens mave. Det giver brugeren stabilitet og sikkerhed, og brugeren kan støtte sig til det og nemmere holde sig oprejst. Idet det spærrer udsynet til sikkerhedsselespændet, bliver brugeren ikke opmærksom på at kunne åbne spændet, og overfladen kan anvendes til forskellige aktiviteter.

Monter først bordets sidedele ved at trække dem på stolens runde hjørnepunkter. Siden med det længere stof skal der ved pege udad. Fastgør stoffet på sidejusteringshjulene med den dertil bestemte åbning i sidedelens betræk. Nedadtil overskydende stof klemmes ind under sædepolstret.

Ill. 26: Anbring sidedele

Fastgør efterfølgende bordet på sidedelens burrestrimler. Før derefter bæltet sidelæns igen til forsiden på ydersiden bag sædets ryg og fastgør det til bordets burrebåndet (fleece).

Ill. 27: Sæt bordet på

Henvisning: af hensyn til pladsen bør et evt. seleskilt fjernes under brug.

Selebeskyttelsespudder (Ill. 28)

Selebeskyttelsespudden skal placeres under selespændet på Reha-autostolens 5-punktssele. Den beskytter brugeren mod et ubehageligt tryk fra selespændet mod maven og fungerer som affjedring ved bevægelse og tryk i skridtområdet.

Sele-softpuder (Ill. 29)

Sele-softpuderne beskytter brugerens skulderregion mod smertefuldt tryk og mod, at selen strammer ubehageligt.

Seleforlænger (Ill. 30)

Seleforlængerens skal bruges til større brugere, så selen stadig passer. (Kun til ECE gruppe II + III, 18-36 kg.)

Anti-escape-vest (Ill. 31)

Anti-escape-vesten forhindrer, at barnet kan sno sig ud af autostolens sele. Farlige huller mellem sele og barn bliver dækket til, så barnet ikke kan bruge dem til at trække selen væk fra skuldrene.

Autostolbeskyttelse med ryg (Ill. 32)

Autostolbeskyttelsen ligger under børneautostolen på køretøjets sæde og på ryglænet. Den beskytter køretøjets sæde og ryglæn mod skader. I lommerne foran kan der opbevares mindre genstande.

Tekniske data

RECARO Sport HERO Reha

Sædedybde (med sædepuder)	31 cm (26 cm)
Sædebredde foran (med sædepuder) (med reduceret sæde)	31 cm (21 cm) 27 cm
Sædebredde bag (med sædepuder) (med reduceret sæde)	29 cm (20 cm) 25 cm
Ryghøjde (sæde)	53 - 73 cm
Skulderhøjde (bælteføring)	23 - 42 cm
Samlede mål (B x H x D)	54 x 55 (max. 81) x 52 cm
Vægt af sæde	ca. 8 kg
Brugervægt	9 - 36 kg

Materialeoplysninger

Polster: Polyester – Trevira CS / 100% Polyester - RECARO Prime

Det anvendt polstermateriale er „brandhæmmende“, certificeret i henhold til DIN EN 1021-1 samt DIN EN 1021-2.

Graden af modstandsdygtighed over for antændelse for materialer og komponenter er certificeret i henhold til standarden og vurderet som ufarlig.

Stoffet, som er 100 % Trevira CS / RECARO Prime, er et førsteklases, åndbart tekstil og blev testet positiv i forhold til biokompatibilitet. (DIN EN ISO 10993-5 og 10993-10 Trevira CS sort)

Rengøring, vedligeholdelse og reparation

Rengøring, plejeanvisning og desinfektion til hverdag

Polster

Polsteret er nemt at tage af og kan vaskes separat. Det består af et stofbetræk og eventuelt et indlæg af skumstof. Kontrollér, om polsteret har lynlås eller burrelukning. Hvis det er tilfældet, skal du åbne polsteret og tage indlægget af skumstof ud inden vask. Vær opmærksom på følgende plejeanvisning.

RECARO Prime:



Trevira CS:



Vi gør opmærksom på, at også stof af høj kvalitet kan blive bleget ved konstant og intensivt sollys eller ved hyppig vask.

Burrelukning

For at bevare burrelukningens funktionalitet skal burrebåndet med jævne mellemrum børstes med en børste. Ved vask skal burrebåndet altid lukkes eller dækkes til.

Kunststofdele

Produktdele af kunststof kan rengøres og desinficeres med almindelig sæbe (neutral).

Metaldele

Produktdele af metal kan rengøres og desinficeres med almindelig sæbe (neutral).

Desinfektion

Rengør inden desinfektion polsteret, kunststofdele og metaldele.

Tør alle kunststof- og metaldele på produktet af med desinfektionsmiddel. Der må udelukkende anvendes vandbaserede midler. Ved desinfektion skal anvisningerne for brug fra den pågældende producent overholdes.

Polsteret og betrækket skal desinficeres, inden det sættes på igen.

Vedligeholdelse og inspektion hos forhandleren

Forberedelse

Der skal følge en brugsanvisning med produktet. Hvis der ikke følger en med, skal du bede producenten om en. Lær produktets funktioner at kende. Hvis du ikke kender produktet, skal du læse brugsanvisningen, inden du tager det i brug. Rengør produktet inden ibrugtagning. Overhold plejeanvisningerne og de produktspecifikke tips til anvendelse i brugsanvisningen. Hvis du har flere spørgsmål, bedes du kontakte din fagkonsulent eller kontakte Thomashilfen direkte.

Service og reparation af produktet må kun udføres af faglært personale. Brugeren af dette produkt skal sørge for, at de foreskrevne undersøgelser og den anbefalede vedligeholdelse udføres regelmæssigt og rettidigt. Hvis der er synlige skader, skal brugeren aktivt informere fagpersonalet og straks lade dem udbedre skaden.

Vedligeholdelsesplan – Årlig undersøgelse

	Område	Funktion	Skade	Udskiftning
1	Kunststofkorpus	👁	👁	
2	Justeringsmuligheder	👁	👁	
3	Polster		👁	
4	Sele	👁	👁	
5	Kunststofdele	👁	👁	
6	Skruer og møtrikker	👁	👁	
7	Mærkning		👁	
Tilbehør				
8	Polster		👁	
9	Sele	👁	👁	
10	Justeringsmuligheder	👁	👁	
11	Kunststofdele	👁	👁	
12	Metaldele	👁	👁	
13	Skruer og møtrikker	👁	👁	
udført af:			d.:	
👁 = Undersøgelse ✓ = Kontrol udført				

Reserve dele

Kun originale reservedele må anvendes til reparationer. Du kan finde en liste med reservedele på hjemmesiden www.thomashilfen.de. For at få den rigtige reservedel eller en eventuel teknisk tilbagekaldelse skal vi have angivet serienummer/UDI-PI og det korrekte UDI-DI.

Afmontering/montering af reservedele må grundlæggende kun udføres af fagpersonale! Ved påkrævet returnering skal du sørge for, at produktet er emballeret korrekt og sikkert.

Opbevaring

Opbevar produktet et sikkert sted, når det ikke er i brug. Undgå at lægge eller stille tunge genstande på produktet under opbevaring. Beskyt produktet mod vind og vejr, f.eks. regn, stærk sol og frost. Hvis produktet bliver vådt, skal du tørre metal- og kunststofdele af og tørre polsteret, inden produktet sættes til opbevaring.

Bortskaffelse

Hvis produktet grundet sin tilstand ikke længere er funktionsdygtigt, eller hvis det har nået slutningen af sin levetid, kan det genanvendes af lokale kompetente virksomheder. Vær i den forbindelse opmærksom på de bestemmelser, der lokalt er gældende for genanvendelse og bortskaffelse.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed at være eneansvarlig for, at dette produkt og diverse varianter og tilbehør overholder de grundlæggende bestemmelser. En aktuell EU-overensstemmelseserklæring kan downloades på www.thomashilfen.de eller fås ved direkte henvendelse til os.

Garanti

Thomashilfen tilbyder to års lovmæssig garanti på dette produkt. Perioden starter på tidspunktet for overdragelse af varen. Garantien omfatter alle krav, der forringer funktionen. Undtaget er skader, der opstår grundet uhensigtsmæssig brug (f.eks. overbelastning) eller naturlig slitage.

Brugstid

Produktet har en brugstid på op til 6 år ved korrekt og regelmæssig vedligeholdelse baseret på producentens anvisninger. Produktet kan anvendes ud over denne periode, hvis det er i en sikker og teknisk upåklagelig tilstand.

Den teoretiske brugstid er ikke en garanteret brugstid. Den afhænger af brugsintensiteten og er altid underlagt en undersøgelse af forhandleren fra gang til gang.

Brugstiden ender inden det angivne tidsrum, hvis brugeren har nået den maksimale kropsvægt eller den maksimale kropsstørrelse for sikker anvendelse af produktet.

Brugstiden henviser ikke til sliddele som polster, betræk osv.

Levetid

Produktet har en levetid på 8 år eller 2 genanvendelser (3 brugere), når de angivne forudsætninger for brugstiden er opfyldt. Levetiden består af både brugstiden og opbevaringstiden mellem genanvendelser lagt sammen.

Genanvendelse

Dette produkt er ikke egnet til genanvendelse. Funktionsdygtigheden for autostole til børn kan ikke fastslås med sikkerhed ved et teoretisk skift af bruger. Produktet kan have ikke synlige skader, som udelukker fortsat sikker anvendelse. Salg og køb af brugte autostole til børn er derfor udelukket af producenten.

Distributør



Meyland-Smith A/S

Mads Clausens Vej 1
9800 - Hjørring
Phone: +45 9896 1985
Fax: +45 9896 1986
info@meyland-smith.dk
www.meyland-smith.dk





Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de