

RECARO Sport HERO Reabilitacija



Naudojimo instrukcija - Reabilitacinė automobilio kėdutė
RECARO Sport HERO Reabilitacija

CE


Thomashilfen





1



2



3




4



5



6

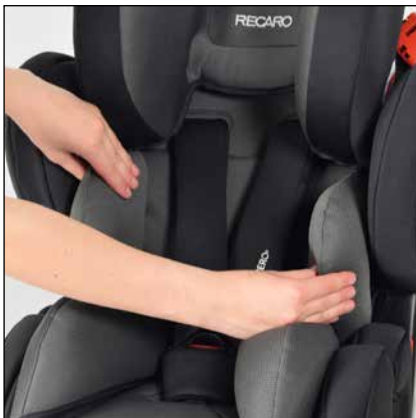

7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32

Geriamas kliente,

Pasirinkote mūsų gaminį ir norėtume padėti už patikėjimą mumis. Kad naujojo gaminio naudojimas būtų saugus, praktiškas ir patogus jums ir naudotojui, pirmiausia perskaitykite šias naudojimo instrukcijas. Tai padės išvengti pažeidimų ir veikimo klaidų. Užtikrinkite, kad šios naudojimo instrukcijos liktų kartu su gaminiu ir būtų prieinamos kiekvienam naudotojui.

Ši naudojimo instrukcija papildo originalią RECARO naudojimo instrukciją. Dėl reabilitacinės automobilinės kėdutės modifikacijos kai kuriuose taškuose pasikeičia kėdutės valdymas. Pakeitimai aprašyti šiose papildomose naudojimo instrukcijose.

Jei turite klausimų, kreipkitės į specializuotą prekybos atstovą arba tiesiogiai į mus.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG



Walkmühlenstraße 1
27432 Bremervörde / Vokietija
Telefonas: +49 (0) 4761 8860
www.thomashilfen.de

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus. Dėl to gali atsirasti nukrypimų tarp jūsų produkto ir jo pateikimo žiniasklaidoje.

Turinys

Iliustracijos	3
Įžanga / Gamintojas	6
Etiketės / modelio identifikavimas.	7
Bendroji informacija / saugos instrukcijos	8
Tikslas	9
– Numatomas naudojimas / taikymo sritys	9
– Indikacija / tikslinė pacientų grupė, numatomi naudotojai	9
– Vartojimo rizika ir kontraindikacijos	9
Produkto aprašymas	9
– Pristatymo apimtis / pagrindinė įranga	9
– Užsakymas	9
– Naudokite mokymus.	9
Nustatymo parinktys / veikimo funkcijos	10
– Priedai	11
– Techniniai duomenys	13
– Medžiagos specifikacijos.	13
Valymas, priežiūra ir remontas.	14
– Valymas, priežiūros instrukcijos ir dezinfekavimas kasdieniame gyvenime	14
– Techninė priežiūra ir tikrinimas pagal specialisto profesiją / Techninės priežiūros grafikas.	15
– Atsarginės dalys	15
– Laikymas / šalinimas	15
ES atitikties deklaracija.	15
Garantija	16
Naudingo tarnavimo laikas / tarnavimo laikas.	16
Pakartotinis naudojimas	16
Prekybininkai.	16

Etiketės / Modelio identifikavimas

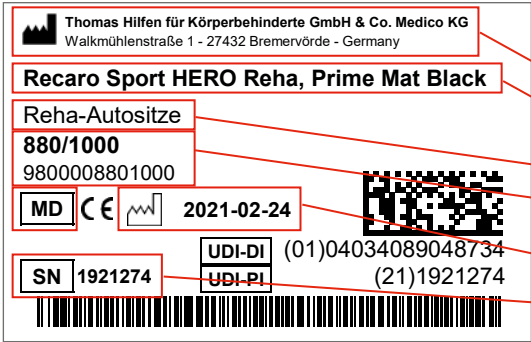Lipdukas	Reikšmė
 <p> Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG Walkmühlenstraße 1 - 27432 Bremervörde - Germany Recaro Sport HERO Reha, Prime Mat Black Reha-Autositze 880/1000 9800008801000 MD CE 2021-02-24 UDI-DI (01)04034089048734 UDI-PI (21)1921274 SN 1921274 </p>	<p>Brūkšninio kodo etiketė</p> <p>Padėtis ant gaminio (1 pav.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gamintojas - Produkto pavadinimas - Produktų grupė - Prekės numeris trumpas / ilgas - MD = medicinos prietaisas - Pagaminimo data - Serijos numeris
 <p> Thomashilfen Walkmühlenstraße 1 27432 Bremervörde Germany RECARO Sport HERO Reha Rückhalteeinrichtung für spezielle Anforderungen <i>restraint system</i> <i>for special needs</i> S 9 – 36 kg 19.8 – 79.4 lbs CE </p>	<p>Vardinė lentelė</p> <p>Padėtis ant gaminio (2 pav.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gamintojas - Produkto pavadinimas - Vartotojo svoris - CE ženklas - Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis

Pastabos

Bendrosios pastabos

- Prieš pirmą kartą naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją arba paprašykite, kad jums ją perskaitytų, jei jums sunku skaityti. Jei trūksta naudojimo instrukcijų, jas galite atsisiųsti iš www.thomashilfen.de. Skaitmeninės naudojimo instrukcijos turinį galima padidinti.
- Patikrinkite, ar nepažeista pakuotė ir ar produktas yra nepriekaištingos būklės.
- Gaminio pakeitimai leidžiami tik pagal numatytas pritaikymo galimybes.
- Kasdienį tvarkymą ir valymą gali atlikti giminaičiai ir slaugytojai. Techninę priežiūrą ir patikrą atlieka specializuoti specialistai.
- Kai kuriose šalyse būtina turėti medicininę pažymą.
- Reabilitacinę automobilinę kėdutę galima naudoti ant vienos iš galinių sėdynių ir keleivio sėdynės. Pasirinkta automobilinė kėdutė PRIVALO būti nukreipta į priekį.
- Visi žymenys turi likti ant gaminio ir jų negalima pažeisti

Saugos instrukcijos

- Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius patikrinkite, ar gaminio nustatymai vis dar atitinka dabartinius naudotojo kūno matmenis. Jei reikia, pakoreguokite nustatymus pas specializuotą pardavėją / ortopedijos techniką.
- Reguliariai (kas savaitę) tikrinkite gaminio reguliavimo parinkčių veikimą.
- Neperkraukite gaminio ir laikykitės didžiausio naudotojo svorio arba didžiausios apkrovos (žr. techninius duomenis).
- Niekada nepalikite naudotojų su gaminiu be priežiūros.
- Vienu metu gaminį gali naudoti tik vienas naudotojas. Į gaminį ar ant jo negalima dėti jokių kitų asmenų.
- Visi naudotojai turi būti supažindinti su gaminio funkcijomis. Tokiu būdu avariniu atveju naudotojas gali būti greitai išlaisvintas iš gaminio.
- Nepalikite naudotojo be priežiūros, kai jis įlipa į gaminį arba išlipa iš jo. Jei kojų atrama per daug apkrauta, kyla pavojus, kad ji gali paslysti arba apvirsti.
- Naudotojas visada turi būti įsitaisęs 5 taškų padėties nustatymo diržu (pagrindinė įranga). Sėdynė ir naudotojas visada turi būti pritvirtinti transporto priemonės 3 taškų saugos diržu.
- Stiprūs saulės spinduliai ir karštis gali sukelti aukštą gaminio paviršiaus temperatūrą. Tuomet kyla pavojus susižeisti liečiant gaminį. Nenaudokite gaminio tol, kol jis pakankamai atvės. Apskritai saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Kad užtikrintumėte naudotojo saugumą, laikykitės transporto priemonės naudojimo instrukcijoje nurodytų saugos standartų, taikomų jūsų transporto priemonei.
- Naudojimo instrukcijos turi likti ant gaminio.
- Jei, priešingai nei tikėtasi, su gaminiu įvyktų rimtas incidentas, nedelsdami apie tai praneškite mūsų įmonei ir kompetingai institucijai.

Tikslas

Numatomas naudojimas / Taikymo sritys

"RECARO Sport HERO Reha" reabilitacinė automobilinė kėdutė yra 1 klasės medicinos prietaisas.

Jis skirtas vežti neįgalius vaikus ir užtikrinti saugią vaikų sėdėjimo vietą motorinėse transporto priemonėse. Sėdynė visada tvirtinama transporto priemonės 3 taškų saugos diržu. Penkių taškų saugos diržai, kuriais prisegama reabilitacinė automobilinė kėdutė, yra naudojami tam, kad vaikas sėdėtų vertikaliaje padėtyje ir ją palaikytų. Be to, reabilitacinėje automobilinėje kėdutėje integruotas sėdynės pakreipimas.

Reabilitacinė automobilinė kėdutė suteikia papildomą atramą saugiam sėdėjimui, stabilizuoja galvos valdymą ir stabilią sėdynę dubens srityje, taip pat atramą pėdų srityje. Be to, prie gaminio siūloma daugybė priedų, kuriuos galima pritaikyti individualiai.

Bet koks kitoks naudojimas arba naudojimas už šios ribos laikomas netinkamu.

Indikacija / tikslinė pacientų grupė, numatyta Vartotojai

Reabilitacinė automobilinė kėdutė naudojama vaikams, turintiems struktūrinių ir (arba) funkcinių galvos ir liemens srities apribojimų ar padėties sutrikimų. Ji užtikrina stabilią ir fiziologišką padėtį, kai standartinės vaikiškos automobilinės kėdutės nepakanka stabiliai sėdėti transporto priemonėje.

Vartojimo rizika ir Kontraindikacijos

Tinkamai naudojant, galima išvengti rizikos, kylančios naudojant. Kontraindikacijos nežinomos.

Produkto aprašymas

Pristatymo apimtis

Jūsų gaminys pristatomas iš anksto surinktas ir yra pagrindinės konfigūracijos. Visi užsakyti priedai pridedami prie gaminio ir turi būti sumontuoti vėliau. Naudojimo instrukcija pridedama prie gaminio.

Pagrindinė įranga

Sėdynė ir atlošas su 4 kryptimis reguliuojamo aukščio galvos atrama; integruoti 5 taškų saugos diržai su centriniu reguliatoriumi; reguliuojamo aukščio pečių diržai su HERO saugos diržų paminkštinimo sistema, įskaitant saugos diržų skydo paminkštinimą (mažą); itin platūs šoniniai energijos sugėrikliai (ASP); nešiojimo rankena; reguliuojama poilsio padėtis; nuimamos galvos, krūtinės ląstos ir sėdynės šoninės pagalvėlės; nuimami užvalkalai.

Užsakymas

- Atsargiai nuimkite transportavimo užraktus ir pakuotę.
- Užtikrinkite, kad pakuotės medžiagos ir mažų dalių negalėtų paimti vaikai, kad išvengtumėte prarijimo ar užspringimo pavojaus.

Naudotojų mokymas

Naudotoją naudotis šia priemone instruktuoja įgalioti specialistai, remdamiesi šia naudojimo instrukcija.

Techninis konsultantas turėtų kartu su naudotoju sumontuoti sėdynę automobilyje ir pritaikyti ją pagal atitinkamus naudotojo matmenis.

Būtina įsitikinti, kad naudotojas buvo instrukuotas apie visas gaminio funkcijas, taip pat apie montavimą ir išmontavimą iš transporto priemonės.

Nustatymo parinktys / Veikimo funkcijos

Atkreipkite dėmesį:

Vaikiškoje kėdutėje integruotas 5 taškų saugos diržas skirtas naudoti tik I ECE grupėje (iki 18 kg). Būtina sąlyga yra ta, kad vaikiška automobilinė kėdutė prieš tai būtų pritvirtinta transporto priemonėje esančiu 3 taškų saugos diržu.

"RECARO Sport HERO Reha" vaikiška automobilinė kėdutė "Dekra" (Drezdenas) sėkmingai išlaikė apkrovos bandymą pagal ECE R 44/04 reikalavimus. Todėl "RECARO Sport HERO Reha" yra patvirtinta kaip specialiųjų reikalavimų "S" apsaugos sistema.

II-III ECE grupės (18-36 kg):

Šiuo bandymu patvirtinta, kad 5 taškų diržą galima naudoti kaip papildomą padėties nustatymo diržą vaikams, sveriantiems daugiau kaip 18 kg kūno svorio. Tokiu atveju VISADA pritvirtinkite vaiką 3 taškų saugos diržu transporto priemonėje ir laikykitės teisingo įrengimo nurodymų pagal originalias RECA-RO įrengimo ir naudojimo instrukcijas.

Vaikiškoje kėdutėje įmontuotas 5 taškų padėties nustatymo diržas NĖRA svarbus saugai. Šiuo atveju vaikas yra prisegamas transporto priemonės 3 taškų diržu; 5 taškų diržas yra skirtas tik kaip padėties nustatymo diržas, skirtas papildomai prilaikyti vaikus, kurių kūno svoris yra nuo 18 iki 36 kg.

Siekiant užtikrinti, kad RECARO Sport HERO Reha jūsų vaikas galėtų naudoti kuo ilgiau, 5 taškų diržų sistemą, įskaitant atlenkimo vamzdelį, galima nuimti. Vadovaukitės originalioje RECARO montavimo ir naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais. Jei 5 taškų padėties nustatymo diržą reikia naudoti ir didesniems vaikams, rekomenduojame naudoti mūsų diržo ilgintuvą.

5 taškų saugos diržai

Daugiau informacijos apie diržų naudojimą rasite kartu su sėdyne pateikiamoje RECARO naudojimo instrukcijoje.

Diržo ilgio keitimas:

Šiek tiek pakelkite sėdynės pagalvėlę ir atlaisvinkite "Velcro" dirželį. Dabar pamatysite sėdynės apvalkalė įmontuotą centrinį diržo reguliatorių. Norėdami pakeisti diržo ilgį, paspauskite svirtį žemyn ir reguliuokite diržą traukdami žemyn kabantį diržą (trumpindami) arba traukdami abu diržus į priekį (ilgindami).

3 pav.: Diržo ilgio keitimas

Diržo tvirtinimo įtaisais:

Paspauskite raudoną sagties įdubimą, kad ją suteptumėte. Tada atskirkite du viršutinius diržo laikiklius. Norėdami užsegti diržą, vėl suimkite abu viršutinius diržo laikiklius, įstatykite juos į sagties viršų ir paspauskite, kol jie užsifikuos su girdimu "spragtelėjimu".

4 pav.: Saugos diržo sagties atidarymas ("spragtelėjimas")

Galvos pagalvėlė

Patraukite pelotinių pagalvėlių dangtelius kuo tiesiau per šonines galvos atramos dalis ir pritvirtinkite juos prie viršuje esančių varžtų.

5 pav.: galvos pagalvėlės užtraukimas ant šoninės dalies / 6 pav.: pritvirtinimas prie varžto

Krūtinės ląstos pelotės pagalvėlė

Norėdami pritvirtinti krūtinės ląstos pelotės pagalvėlę, laisvai padėkite ją ant sėdynės, tada du velcro dirželius užkiškite už atlošo apmušalo. Už apmušalą užveržkite dirželius užtrauktukais.

7 pav.: padėtis ant sėdynės / 8 pav.: Velcro tvirtinimas

Sėdynės šoninė pagalvėlė

"RECARO Sport HERO Reha" turi sėdynės reduktorių. Sėdynės šoninės pagalvėlės tvirtinamos prie šio sėdynės reduktoriaus. Norėdami tai padaryti, patraukite sėdynės šonines pagalvėles per sėdynės reduktoriaus šonines dalis. Tada prie sėdynės reduktoriaus išorinės pusės pritvirtinkite sėdynės šonines pelotines pagalvėles.

9 pav.: Sėdynės šoninės pagalvėlės užtraukimas ant sėdynės reduktoriaus / 10 pav.: Velcro tvirtinimas

Dėl šių nustatymų parinkčių / veikimo funkcijų žr. atskirą RECARO Sport HERO naudojimo instrukciją.

Sėdynė ir atlošas su 4 kryptimis reguliuojamo aukščio galvos atrama

Reguliuojamo aukščio pečių diržai su HERO diržų paminkštinimo sistema, įskaitant diržų skydo paminkštinimą (mažą), ypač platų, šoninius energijos sugėriklius (ASP)

Nešiojimo rankena

reguliuojama poilsio padėtis nuimami

dangteliai

Priedai

Pastaba: informacijos apie montavimą rasite atitinkamose naudojimo instrukcijose, kurios pridedamos prie priedų. Jei trūksta naudojimo instrukcijų, jas galite atsisiųsti iš www.thomashilfen.de. Priedai montuojami / demontuojami naudojant standartinius įrankius.

Adapterio plokštelė (11 pav.)

Adapterio plokštelė yra būtina sąlyga norint naudoti kitus priedus. Jis tvirtinamas prie reabilitacinės automobilinės kėdutės sėdynės priekinės dalies.

Prieš montuodami sėdynės apačioje esantį dirbtinį paviršių nuvalykite komercinėmis priemonėmis (pvz., plovikliu), kol ant jo visiškai neliks riebalų.

Dabar nuo adapterio plokštės nuimkite "Velcro" juosteles (vilną) ir pritvirtinkite jas po sėdyne. Velcro juostelės (kabliukai) lieka ant adapterio plokštės.

12 pav.: Velcro juostelės tvirtinimas prie sėdynės

Dabar pastatykite sėdynę lygiai 90° kampu adapterio priekyje (adapterio rankena nukreipta į priekį) ir pritvirtinkite sėdynę prie adapterio plokštės taip, kad sėdynė būtų priveržta.

13 pav.: Uždėkite sėdynę ant adapterio

Sukamasis stalas su adapteriu (14 pav.)

Naudojant pasukimo funkciją, reabilitacinę automobilinę kėdutę galima pasukti automobilio durų link. Slaugytojams lengviau perkelti naudotoją ir pasiekti sėdynės 5 taškų padėties nustatymo diržą. Naudotojui lengviau savarankiškai įlipti ir išlipti iš automobilio. Tuo pat metu prie adapterio, esančio reabilitacinės automobilinės kėdutės priekyje, galima prijungti kitus priedus.

Sėdynės adapteris (15 pav.)

Naudojant "Seatfix" adapterį, ISOFIX galima naudoti transporto priemonėje, kad padidėtų reabilitacinės automobilinės kėdutės stabilumas. Papildomas stabilizavimas ypač reikalingas, jei naudojama ir pasukimo (ir arba) pakreipimo funkcija. Seatfix adapteris taip pat pritvirtina tuščią sėdynę transporto priemonėje.

Stabilizavimo laikiklis (16 pav.)

Stabilizavimo strypas pritvirtinamas prie reabilitacinės automobilinės kėdutės galinės dalies ir įstumiamas į tarpą tarp sėdynės paviršiaus ir sėdynės atlošo. Jis tinka, jei negalima naudoti ISOFIX. Papildomas stabilizavimas ypač reikalingas, jei taip pat naudojama pasukimo (ir arba) pakreipimo funkcija.

Atraminė kojėlė (17 pav.)

Atraminė kojėlė stabilizuoja reabilitacinę automobilinę kėdutę. Papildomas stabilizavimas ypač reikalingas, jei taip pat naudojama pasukimo (ir arba) pakreipimo funkcija.

Kojų atrama (18 pav.)

Naudodamas kojų atramą naudotojas stabiliai sėdi reabilitacinėje kėdutėje, nes gali tvirtai remtis kojomis. Taip išvengiama slydimo iš sėdynės ant automobilio grindų. Kojų atramą galima nulenksti, kad būtų lengviau įlipti ir išlipti iš automobilio. Kojų atramą galima naudoti mokantis savarankiškai įlipti ir išlipti iš sėdynės.

Įstumkite priekyje esančius kojų atramos vamzdelius į adapterį. Norėdami tai padaryti, paspauskite kojų atramos fiksavimo spyruoklę. Kojų atramą nuo iškritimo visada pritvirtinkite žvaigždutės formos varžtu, esančiu ant kairiojo kojų atramos adapterio vamzdžio. Kelios kojų atramos vamzdžiuose esančios skylės leidžia reguliuoti pagal automobilio sėdynės gylį.

19 pav.: Įstatyti atramą

Norėdami stabilizuoti kojų atramą ant automobilio grindų, sureguliuokite atraminių strypų aukštį pasukdami juos į vidų arba į išorę taip, kad strypai liestųsi su automobilio grindimis. Tada užfiksuokite atraminius strypus žvaigždutinėmis rankenėlėmis, kad jų netyčia neatsuktumėte. Norėdami tai padaryti, pasukite žvaigždučių rankenų varžtus į viršų kiek įmanoma labiau ir tvirtai priveržkite.

20 pav.: Aukščio reguliavimo transporto priemonė

Blauzdos ilgis:

Apatinių kojų ilgis reguliuojamas reguliuojant kojų atramos aukštį. Norėdami tai padaryti, atlaisvinkite du išorinius Allen varžtus ir vėl juos pakankamai priveržkite.

Pėdos kampas:

Atlaisvinkite keturis varžtus, esančius dešinėje ir kairėje pusėje, kojų atramos apačioje, kad per bėgelius nustatytumėte norimą kojų kampą. Tada dar kartą priveržkite varžtus.

Kojų atramos pakėlimo blokas (21 pav.)

Jei naudotojo kojos nepakankamai ilgos, kojų atramos pakėlimo blokas sumažina reikiamą apatinės kojų dalies ilgį.

Sėdynės pleištai, apačia (22 pav.)

Sėdynės pleištai (toliau) dedamas ant transporto priemonės sėdynės po reabilitacine automobiliu sėdyne, kad sėdynė būtų pakreipta. Sėdynės atlenkimas atgal naudojamas vaikams, kurių kūnas mažai įtemptas ir (arba) silpnai valdo galvą.

Sėdynės pleištai dedamas centre po automobilio sėdyne. Aukštas kraštas yra priekyje, kad vaikas galėtų optimaliai ilsėtis.

Įspėjimas: naudojant sėdynės pleištą kartu su pasukama plokšte, gerokai apribojama jos funkcija. Todėl nerekomenduojame vienu metu naudoti sėdynės pleišto ir pasukamosios plokštės.

23 pav.: Sėdynės uždėjimas ant sėdynės pleišto / 24 pav.: Galutinė padėtis

Dilbio padėtis (25 pav.)

Dilbio atrama yra priešais naudotojo pilvą. Jis suteikia naudotojui stabilumo ir saugumo, naudotojas gali į jį atsiremti ir geriau išsilaikyti. Diržo sagties vizualinė kliūtis atitraukia dėmesį nuo diržo sagties atsegimo, o naudotojas gali naudotis viršutiniu paviršiumi.

Pirmiausia pritvirtinkite šonines dilbio atramos dalis patraukdami jas prie apvalių sėdynės kampų. Ilgesnė stovo pusė visada turi būti nukreipta į išorę. Prie sėdynės reguliavimo ratukų pritvirtinkite stoff su šoninių dalių dangtelyje esančiomis alyvos skylutėmis. Dabar žemyn išsikišusi stoff yra užfiksuota po sėdynės pagalve.

26 pav.: Šoninių plokščių tvirtinimas

Tada pritvirtinkite pažastų juostelę prie šoninių dalių "Velcro" juostelių. Tada nukreipkite diržą šonu į priekį, vėl už sėdynės atlošo, ir pritvirtinkite jį prie "Velcro" (vilnos), esančios po pažastimi.

27 pav.: uždėkite dilbio sąranką

Pastaba: kai naudojama dilbio padėtis, norint sutaupyti vietos, reikia nuimti diržo skydo pagalvėlę.

Saugos diržų skydo pagalvėlė (28 pav.)

Diržo skydo pagalvėlė tvirtinama po reabilitacinės automobilinės kėdutės 5 taškų diržo sagtimi. Jis apsaugo naudotoją nuo nemalonaus diržo sagties spaudimo į pilvą ir amortizuoja judesius bei spaudimą tarpvietės srityje.

Minkštas diržo paminkštinimas (29 pav.)

Minkštos diržų pagalvėlės apsaugo naudotoją pečių srityje nuo skausmingo spaudimo ir diržų įpjovimo.

Diržo ilgintuvas (30 pav.)

Didesnių dydžių naudotojams gali prireikti diržų prailginimo, kad diržai vis dar tiktų. (Tik II ir III ECE grupei, 18-36 kg.)

Liemenė prieš pabėgimą (31 pav.)

Nuo ištrūkimo apsauganti liemenė neleidžia vaikui išsisukti iš automobilio saugos diržo. Tarp diržo ir vaiko lieka pavojingi tarpai, kuriais vaikas galėtų pasinaudoti, kad nustumtų diržą nuo pečių.

Automobilio sėdynės apsauga su nugarėle (32 pav.)

Automobilinės kėdutės apsauga dedama po vaikiška automobiline kėdute ant automobilio sėdynės ir atlošo. Jis apsaugo automobilio sėdynę ir atlošą nuo pažeidimų. Smulkius daiktus galima laikyti priekinėse kišenėse.

Techniniai duomenys**RECARO Sport HERO Reabilitacija**

Sėdynės gylis (su sėdynės pagalvėlėmis)	31 cm (26 cm)
Sėdynės plotis priekyje (su sėdynės pagalvėlėmis)	31 cm (21 cm)
(su sėdynės reduktoriais)	27 cm
Galinės sėdynės plotis (su sėdynės pagalvėlėmis)	29 cm (20 cm)
(su sėdynės reduktoriais)	25 cm
Atlošo aukštis (sėdynė)	53 - 73 cm
Pečių aukštis (diržo kreipiančioji)	23 - 42 cm
Bendrieji matmenys (plotis x aukštis x gylis)	54 x 55 (maks. 81) x 52 cm
Sėdynės svoris	apie 8 kg
Vartotojo svoris	9 - 36 kg

Medžiagų specifikacijos

Apmušalai: Poliesteris - Trevira CS / 100 % poliesteris - RECARO Prime

Naudojama nedegi apmušalų medžiaga, išbandyta pagal DIN EN 1021-1 ir DIN EN 1021-2.

Medžiagų ir mazgų atsparumo užsidegimui laipsnis buvo išbandytas pagal standartus ir nustatyta, kad jis yra saugus.

100% "Trevira CS Stoff / RECARO Prime" yra aukštos kokybės, orui pralaidus audinys, kurio biologinio suderinamumo testai buvo teigiami. (DIN EN ISO 10993-5 ir 10993-10 Trevira CS Black).


Valymas, priežiūra ir remontas Valymas, pflleiding ir

dezinfekavimas kasdieniniame gyvenime


Minkštimas

Pagalvėles lengva nuimti vos keliais judesiais ir jas galima skalbti atskirai. Juos sudaro stovo dangtį ir, jei reikia, putplasčio stovo įdėklus. Patikrinkite, ar pagalvėlė turi užtrauktuką arba "Velcro" užtrauktuką. Jei taip, prieš skalbdami atidarykite pagalvėlę ir, jei reikia, išimkite putplasčio įdėklą. Taip pat laikykitės šių priežiūros nurodymų.

RECARO Prime:

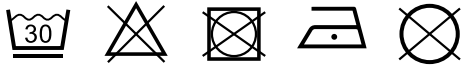

Trevira CS:

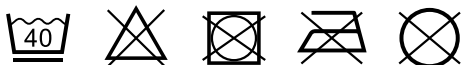

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad net aukštos kokybės stogeliai gali išblukti dėl ilgo ir intensyvaus saulės spindulių poveikio arba dažno skalbimo.

Velcro užsegimai

Norėdami išlaikyti "Velcro" užsegimų funkcionalumą, retkarčiais šepetėliu nušveiskite "Velcro" juosteles. Skalbdami visada užveržkite arba uždenkite velcro dirželius.

Plastikinės dalys

Plastikinės gaminio dalis galima valyti ir dezinfekuoti prekyboje esančiais muilais (neutraliu muilu).

Metalinės dalys

Metalinės gaminio dalis galima valyti ir dezinfekuoti prekyboje esančiais muilais (neutraliu muilu).

Dezinfekcija

Prieš dezinfekuodami nuvalykite apmušalus, plastikines ir metalines dalis.

Nuvalykite visas plastikines ir metalines gaminio dalis drėgnu dezinfekavimo skysčiu. Turėtų būti naudojamos tik vandens pagrindo priemonės. Dezinfekuodami laikykitės atitinkamo gamintojo naudojimo instrukcijų.

Specialistų atliekama techninė priežiūra ir tikrinimas

Paruošimas

Prie gaminio turi būti pridėta naudojimo instrukcija. Jei jų nėra, paprašykite gamintojo. Susipažinkite su gaminio funkcijomis. Jei nesate susipažinę su gaminiu, prieš bandydami perskaitykite naudojimo instrukciją. Prieš pradėdami bandymą išvalykite gaminį. Laikykitės naudojimo instrukcijose pateiktų naudojimo instrukcijų ir konkrečiam gaminiui skirtų bandymų instrukcijų. Jei turite daugiau klausimų, kreipkitės į savo apmokytą specialistą konsultantą arba tiesiogiai į "Thomashilfen".

Gaminio priežiūrą ir remontą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. Šio gaminio naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų reguliariai ir laiku atliekamos nustatytos patikros ir (arba) techninė priežiūra. Jei pastebimi pažeidimai, naudotojas turi apie tai pranešti kvalifikuotam personalui ir nedelsdamas pasirūpinti, kad pažeidimai būtų pašalinti.

Priežiūros planas - metinis patikrinimas

	Plotas	Funkcija	Žala	Pakeisti
1	Plastikinis korpusas	👁	👁	
2	Reguliavimo parinktys	👁	👁	
3	Pagalvėlė		👁	
4	Diržai	👁	👁	
5	Plastikinės dalys	👁	👁	
6	Varžtai ir veržlės	👁	👁	
7	Rodikliai		👁	
Priedai				
8	Pagalvėlė		👁	
9	Diržai	👁	👁	
10	Reguliavimo parinktys	👁	👁	
11	Plastikinės dalys	👁	👁	
12	Metalinės dalys	👁	👁	
13	Varžtai ir veržlės	👁	👁	
atlieka:			am:	
👁 = Patikrinimas 🔄 = Pakartotinis naudojimas ✓ = atliktas				

Atsarginės dalys

Remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis. Atsarginių dalių sąrašą galite rasti internete adresu www.thomashilfen.de. Kad gautume tinkamas atsargines dalis arba galimo techninio atšaukimo atveju, visada reikalaujame nurodyti serijos numerį / UDI-PI ir tikslų UDI-DI.

Atsarginių dalių išmontavimo / surinkimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas personalas! Prireikus grąžinti gaminį, įsitinkite, kad jis yra saugiai supakuotas, kad jį būtų galima transportuoti.

Saugykla

Nenaudojamą gaminį laikykite saugioje vietoje. Sandėliavimo metu ant gaminio nedėkite ir nelaikykite sunkių daiktų. Saugokite gaminį nuo oro sąlygų, pavyzdžiui, lietaus, stiprių saulės spindulių ir šalčio. Jei gaminys yra drėgnas, prieš laikydami gaminį sausai nuvalykite metalines ir plastikines dalis ir išdžiovinkite trinkeles.

Šalinimas

Jei gaminio nebegalima naudoti dėl jo būklės arba jei jo naudojimo laikas jau pasibaigęs, jį galima perdirbti vietinėje atliekų tvarkymo įmonėje. Laikykites vietinių perdirbimo ir šalinimo taisyklių.

ES Atitikties deklaracija

Mes savo atsakomybe pareiškiame, kad šis gaminys, visi jo variantai ir priedai atitinka pagrindines taisykles. Galiojančią ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti iš interneto adresu www.thomashilfen.de arba paprašyti tiesiogiai iš mūsų.

Garantija

"Thomashilfen" šiam gaminiui suteikia dvejų metų teisinę garantiją. Šis laikotarpis prasideda nuo prekių perdavimo momento. Garantija apima visas pretenzijas, susijusias su funkcija. Žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo (pvz., perkrovos), taip pat dėl natūralaus nusidėvėjimo, neįtraukiamos.

Naudingo tarnavimo laikas

Tinkamai ir reguliariai prižiūrint gaminį pagal gamintojo nurodymus, jis gali būti naudojamas iki 6 metų. Jei gaminys yra saugus ir techniškai tvarkingas, jį galima naudoti ir pasibaigus šiam laikotarpiui.

Teorinis tarnavimo laikas nėra garantuotas tarnavimo laikas. Tai priklauso nuo naudojimo intensyvumo ir kiekvienu konkrečiu atveju jį visada tikrina specialistai.

Naudojimo laikotarpis baigiasi anksčiau nei nurodytas laikotarpis, kai naudotojas pasiekia didžiausią kūno svorį arba ūgį, leidžiantį saugiai naudoti gaminį.

Eksplotavimo laikas nesusijęs su dėvimomis dalimis, pvz., apmušalais, dangčiais ir pan.

Visą gyvenimą

Gaminio eksploatavimo trukmė yra 8 metai, jei laikomasi eksploatavimo trukmei nurodytų sąlygų. Eksploatavimo trukmę sudaro naudingo tarnavimo laikas ir laikymo laikas.

Pakartotinis naudojimas

Produktas netinkamas pakartotinai naudoti. Vaikiškų automobilinių kėdučių funkcinio tinkamumo negalima tiksliai nustatyti teoriškai pasikeitus naudotojui. Gali būti nepastebimų gaminio pažeidimų, dėl kurių gaminio negalima toliau saugiai naudoti. Todėl gamintojas negali parduoti ir pirkti naudotų vaikiškų automobilinių kėdučių.





Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de