


Ersatzteilliste / Spare parts list

trio Gehwagen / trio walker

Art. 9800020501100;9800020451100

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

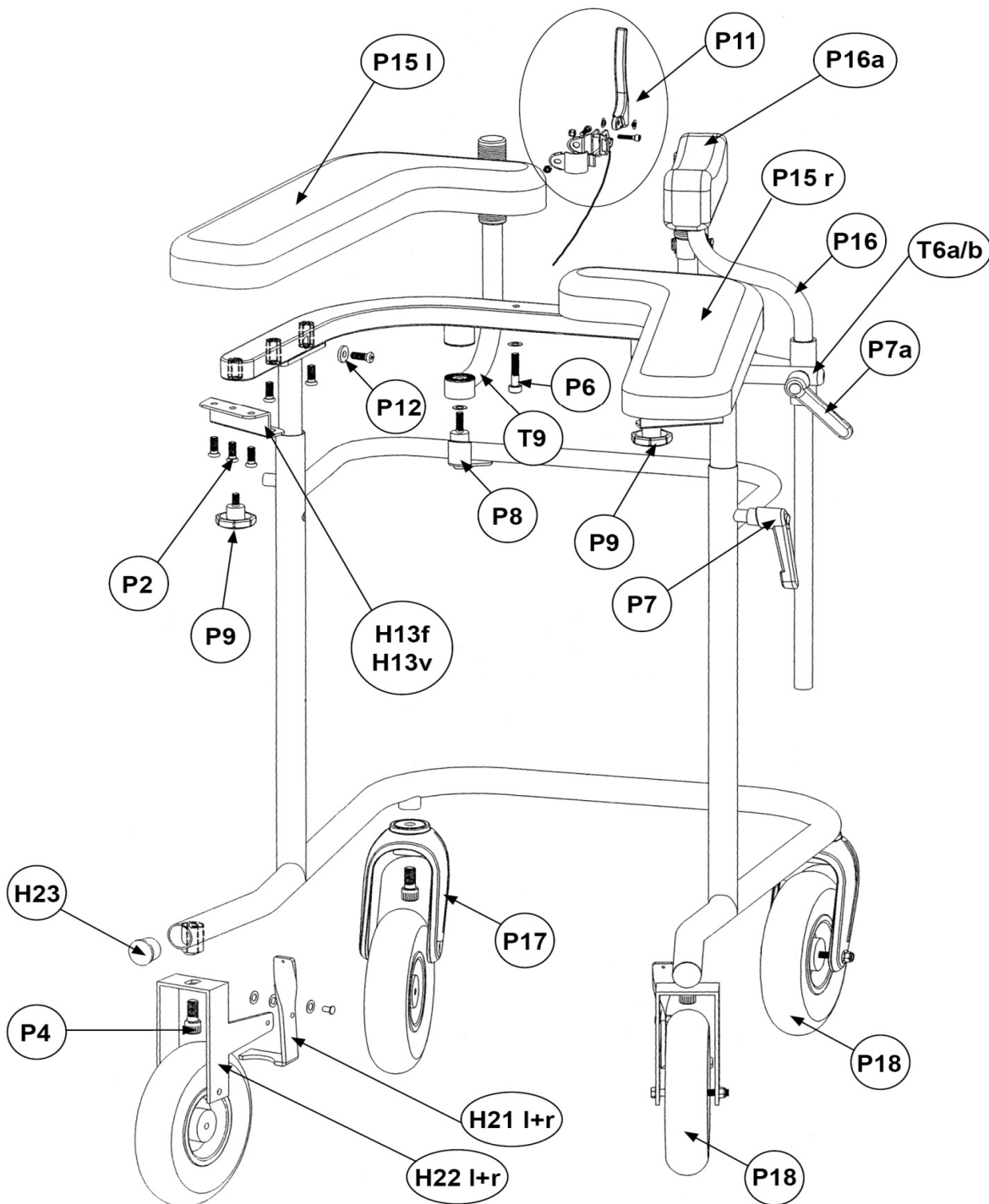

Ersatzteilliste / Spare parts list

trio Gehwagen / trio walker

Art. 9800020501100;9800020451100

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations
 Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity
P15	9700182000000	Armauflagen, schwarz (R+L)	arm support, black (right+left)	1
H13v	9700182010000	Armauflagen-Befestigung, variabel	fastening for arm support, variable	2
H13f	9700182220000	Armauflagen-Befestigung, fix	fastening for arm support, fix	2
P16	9700182201000	Achselstützen, R/L komplett (ohne Halterungen)	arm pit, right/left, complete with polster	*
P16a	9700182020000	Achselstützen-Auflage, schwarz	arm pit support cushion, black	*
P11a	9700182030000	Handbremse li. m. Bowdenzug,kplt.	handbrake left with bowden wire,complete	1
P11b	9700182031000	Handbremse re. m. Bowdenzug,kplt.	handbrake right, with bowden wire, complete	1
H21r	9700182040000	VA-Bremsbügel,rechts	VA brake arm, right	1
H21l	9700182050000	VA-Bremsbügel,links	VA brake arm, left	1
H22r	9700182060000	Hinterrad-Adapter,rechts	back wheel adapter,right	1
H22l	9700182070000	Hinterrad-Adapter, links	back wheel adapter,left	1
H23	7502018039905	Lamellenstopfen 32 x 5 (Trio)	blade plug 32 x 5 (Trio)	1
T9	9700182080000	Haltebügel mit Griff	holder with grip	2
T6a	9700182090000	Achselstützen-Adapter, rechts	arm pit adapter, right	*
T6b	9700182100000	Achselstützen-Adapter, links	arm pit adapter, left	*
P2	9700182110000	Schraube M8x20 (P2)	screw M8x20 (P2)	*
P4	9700182120000	Schraube M12x25 (P4)	screw M12x25 (P4)	4
P6	9700182130000	Schraube M8x40 (P6)	screw M8x40 (P6)	2
P7	9700180050000	Knebelschraube M10x20-SW	toggle screw M10x20	2
P7a	9700182230000	Knebelschraube M10x25 (P7a)	toggle screw M10x25 (P7a)	*
P8	9700182150000	Handbügel-Knebelschraube (P8)	toggle screw for hand bow (P8)	2
P9	9700182160000	Sterngriffschraube (P9)	star nut group (P9)	2
P12	9700182170000	U-Scheibe 20x8,2x3,0 (P12)	washer 20x8,2x3,0 (P12)	*
P18	9700182180000	Flexel-Rad 200x50, grau	flexibel wheel 200x50, grey	4
P17	9700182190000	Kunststoffgabel,schwarz	wheel fork (plastic), black	2
	9700182210000	Endhülse für Bowdenzug (Trio)	end sleeve für bowden wire (Trio)	1