


Ersatzteilliste / Spare parts list

tGo Gehtrainer Gr. 1 / gait trainer size 1

Art. 9800018870000

Stand / status: 2019-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

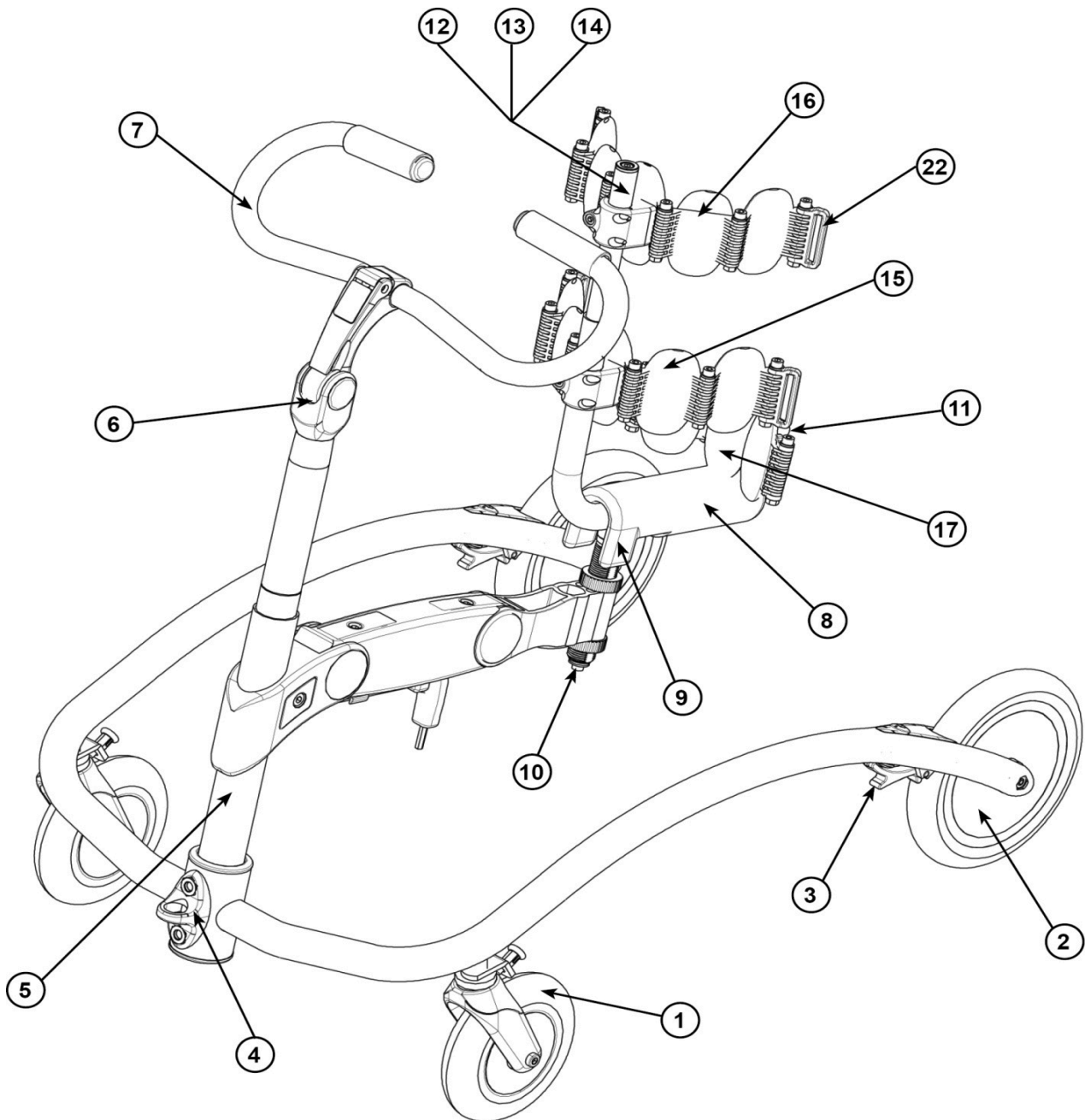

Ersatzteilliste / Spare parts list

tGo Gehtrainer Gr. 1 / gait trainer size 1

Art. 9800018870000

Stand / status: 2019-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations



Ersatzteilliste / Spare parts list

tGo Gehtrainer Gr. 1 / gait trainer size 1

Art. 9800018870000 tGo Gehtrainer Gr. 1 / tGo gait trainer size 1

Stand / status: 2019-01-18, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT


Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity
1	9700285000000	Vorderrad mit Lenkstopp	castoring front wheel with steering lock	2
2	9700285010000	Hinterrad	rear wheel	2
3	9700285020000	Schleif- und Parkbremse	parking brake and friction brake	2
4	9700285030000	Inbusschrauben inkl. Kunststoffauge mit Muttern	plastic eye incl. allen screws, nuts	1
5	9700285040000	Zentralrohr Gr. 1	central tube size 1	1
-	9700285260000	Aufnahme Zentralrohr	admission central tube	1
6	9700285050000	Lenkerstange Gr. 1 inkl. Höhenverstellung	handlebar tube size 1 incl. height adjustment	1
7	9700285060000	Lenker Gr. 1 inkl. Griffgummis	handlebar size 1 incl. padding	1
8	9700285070000	Sattelbezug Gr. 1	saddle padding size 1	1
9	9700285081000	Sattelgestänge Gr. 1 (tGo)	saddle frame size 1 (tGo)	1
10	9700285090000	Gewindestange, schwarz inkl. Satz Muttern	threaded rod, black incl. nuts	1
11	9700285100000	Rumpfstütze (ohne Pelotten)	torso rest (without pads)	1
12	9800018980000	Brustpelottenrohr Länge 20 cm	chest pad tube, 20 cm	1
13	9800018990000	Brustpelottenrohr Länge 30 cm	chest pad tube, 30 cm	1
14	9800019000000	Brustpelottenrohr Länge 40 cm	chest pad tube, 40 cm	1
15	9700285110000	Beckenpelotten (5 Stück) inkl. Aufnahme	pelvis pads (5 elements) incl. tube locator	1
16	9700285120000	Brustpelotten (5 Stück) inkl. Aufnahme und Gurt	chest pads (5 elements) incl. tube locator	1
17	9700285130000	Rumpfpelotten (3 Stück) inkl. Aufnahme	torso pads (3 elements) incl. tube locator	1
18	9800018940000	Pelotte (90 x 50 mm)	additional pad	1
19	9700285140000	Pelotte (110 x 50 mm)	additional pad (110 x 50 mm)	1
20	9700285150000	Aufnahme für Pelotten 20,5 mm	tube locator for pads 20,5 mm	1
21	9700285160000	Aufnahme für Pelotten 25,5 mm	tube locator for pads 25,5 mm	2
22	9700285170000	Gurtführung für Pelottenring	belt lead for pad elements	6
23	9700285180000	Gurtband 100 cm inkl. Klettverschluss und Gurtschnalle	100 cm belt incl. velcro and sliding buckle	1
24	9700285190000	Inbusschlüssel und Ringschlüssel	allen key and ring wrench	1

Ersatzteilliste / Spare parts list

tGo Gehtrainer Gr. 2 / gait trainer size 2

Art. 9800018880000

Stand / status: 2019-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

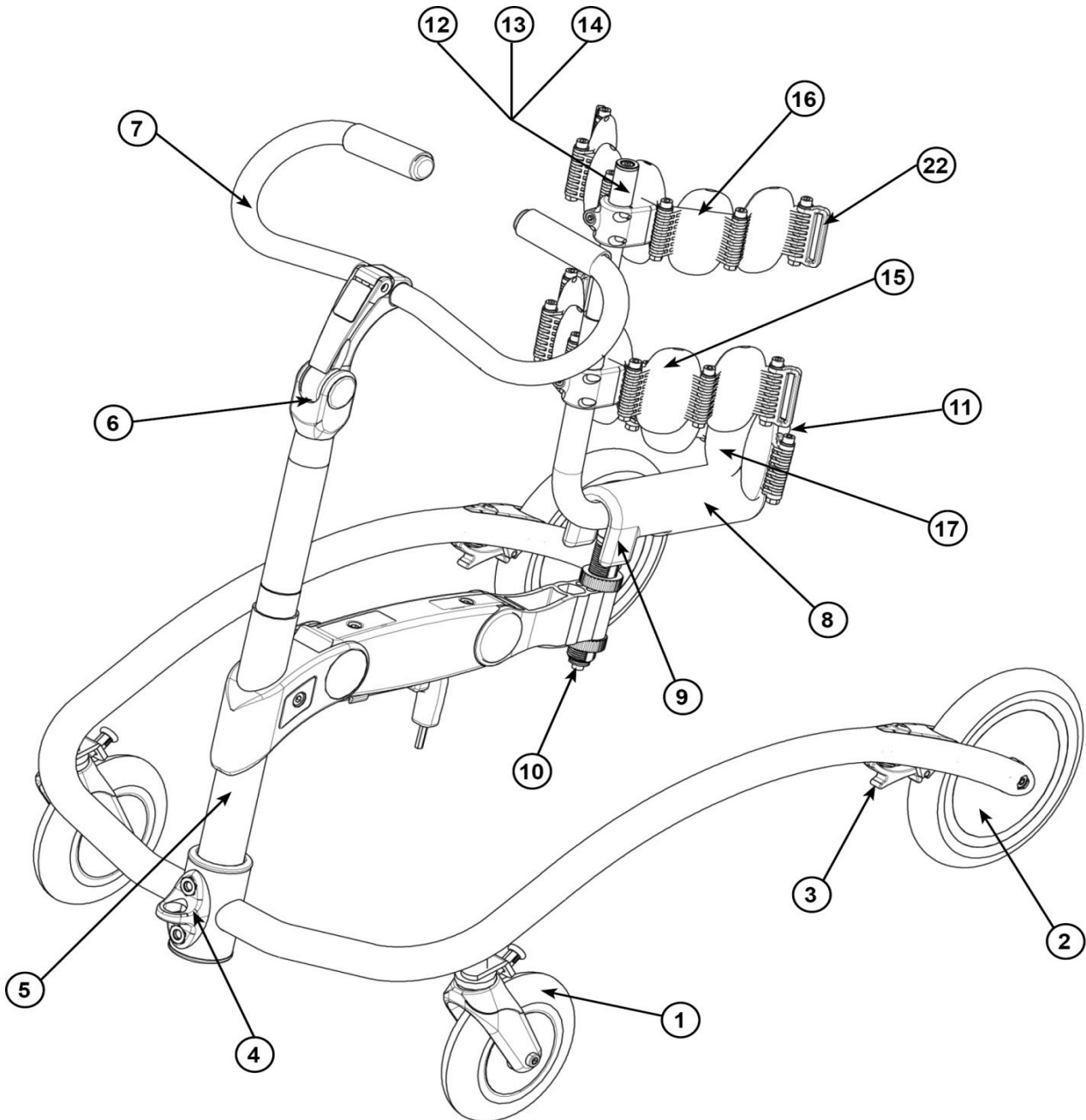


Ersatzteilliste / Spare parts list

tGo Gehtrainer Gr. 2 / gait trainer size 2

Art. 9800018880000

Stand / status: 2019-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

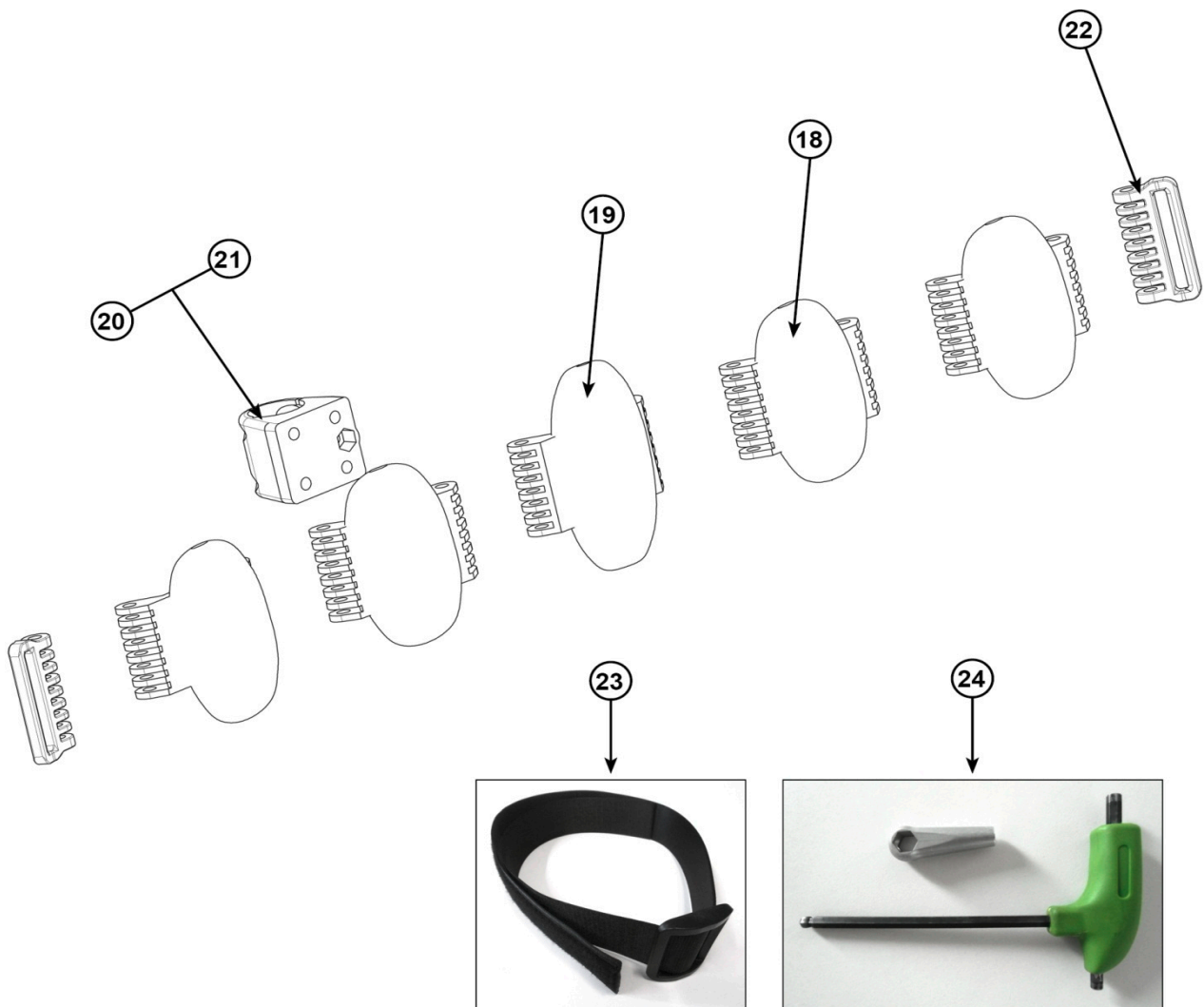

Ersatzteilliste / Spare parts list

tGo Gehtrainer Gr. 2 / gait trainer size 2

Art. 9800018870000

Stand / status: 2019-01-18, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity
1	9700285000000	Vorderrad mit Lenkstopp	castoring front wheel with steering lock	2
2	9700285010000	Hinterrad	rear wheel	2
3	9700285020000	Schleif- und Parkbremse	parking brake and friction brake	2
4	9700285030000	Inbusschrauben inkl. Kunststoffauge mit Mutter	plastic eye incl. allen screws, nuts	1
5	9700285200000	Zentralrohr Gr. 2	central tube size 2	1
-	9700285260000	Aufnahme Zentralrohr	admission central tube	1
6	9700285210000	Lenkerstange Gr. 2 inkl. Höhenverstellung	handlebar tube size 2 incl. height adjustment	1
7	9700285220000	Lenker Gr. 2 inkl. Griffgummis	handlebar size 2 incl. padding	1
8	9700285230000	Sattelbezug Gr. 2	saddle padding size 2	1
9	9700285241000	Sattelgestänge Gr. 2 (tGo)	saddle frame size 2 (tGo)	1
10	9700285090000	Gewindestange, schwarz inkl. Satz Muttern	threaded rod, black incl. nuts	1
11	9700285100000	Rumpfstütze (ohne Pelotten)	torso rest (without pads)	1
12	9800018980000	Brustpelottenrohr Länge 20 cm	chest pad tube, 20 cm	1
13	9800018990000	Brustpelottenrohr Länge 30 cm	chest pad tube, 30 cm	1
14	9800019000000	Brustpelottenrohr Länge 40 cm	chest pad tube, 40 cm	1
15	9700285110000	Beckenpelotten (5 Stück) inkl. Aufnahme	pelvis pads (5 elements) incl. tube locator	1
16	9700285120000	Brustpelotten (5 Stück) inkl. Aufnahme und Gurt	chest pads (5 elements) incl. tube locator	1
17	9700285130000	Rumpfpelotten (3 Stück) inkl. Aufnahme	torso pads (3 elements) incl. tube locator	1
18	9800018940000	Pelotte (90 x 50 mm)	additional pad	1
19	9700285140000	Pelotte (110 x 50 mm)	additional pad (110 x 50 mm)	1
20	9700285150000	Aufnahme für Pelotten 20,5 mm	tube locator for pads 20,5 mm	1
21	9700285160000	Aufnahme für Pelotten 25,5 mm	tube locator for pads 25,5 mm	2
22	9700285170000	Gurtführung für Pelottenring	belt lead for pad elements	6
23	9700285180000	Gurtband 100 cm inkl. Klettverschluss und Gurtschnalle	100 cm belt incl. velcro and sliding buckle	1
24	9700285190000	Inbusschlüssel und Ringschlüssel	allen key and ring wrench	1